


# MONTERINGSANVISNING

## Bord

## Levo Summit EI

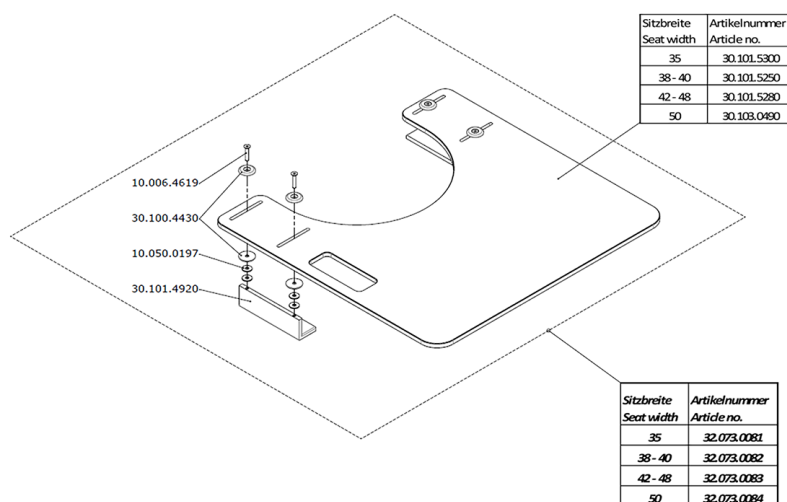

Benämning

Artikelnummer

Bord

30.101.4920



# MONTERINGSANVISNING

Montering av bord på Levo Summit EI

Montera först fast hållarna (30.101.4920) i bordet med de medföljande brickorna och skruvarna enligt bilden nedan.

Därefter skjuts bordet på plats på rullstolens armstöd och bredden justeras med hjälp av skåror. Om snävare passform önskas kan stålbrickorna skippas.





LEVO AG  
Anglikerstrasse 20  
CH-5610 Wohlen  
Switzerland

T: +41 (0)56 618 44 11  
E: [office@levo.ch](mailto:office@levo.ch)  
[www.levo.ch](http://www.levo.ch)



Sunrise Medical AB  
Neongatan 5  
431 53 Mölndal  
Sverige

T: +46 (0) 31 748 37 00  
E: [post@sunrisemedical.se](mailto:post@sunrisemedical.se)  
[www.sunrisemedical.se](http://www.sunrisemedical.se)