

REKONDITIONERINGSANVISNING LEVO Summit EL

| | |
|---------------------|------------|
| STOLSTYP: | DATUM: |
| SERIENR./INDIVIDNR: | UTFÖRT AV: |

| | Kontrollerat OK | Utbytt |
|--|--------------------|--------|
| PROVKÖRNING AV RULLSTOLEN | | |
| Kontrollera att stolen rullar lätt. | | |
| Kontrollera att stolen rullar rakt. | | |
| Kontrollera att bromsarna låser hjulen. | | |
| Kontrollera att inga missljud förekommer. | | |
| HJUL | | |
| Kontrollera att fälgarna och drivringarna är utan skador. | | |
| Kontrollera att länkhjulen sitter ordentligt fast och roterar lätt, förslitning av gummibanen samt eventuellt lufttryck (se angett lufttryck på däck). Tag bort hår eller liknande som fastnat runt axeln. | | |
| Kontrollera att gafflarna lätt svänger runt samt att de inte glappar. | | |
| Kontrollera att länkhjulshusen är inställda i en vinkel på 90° mot underlaget. | | |
| Kontrollera att drivhjulen sitter ordentligt fast och roterar lätt, förslitning av gummibanen samt eventuellt lufttryck (se angett lufttryck på däck). Tag bort hår eller liknande som fastnat runt axeln. Kontrollera avståndet till sidoskydden så att hjulen inte går emot. | | |
| Kontrollera quickreleaseaxeln och genomföringshylsan. Rengör och smörj vid behov. | | |
| SÄTE/RYGG | | |
| Kontrollera att sitt och ryggläddsel är skadefri. | | |
| Kontrollera att kardborrbanden i ryggen är skadefria. | | |
| SIDOSKYDD | | |
| Kontrollera att sidoskydden finns och är skadefria. | | |

| | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| TEKNISK DOKUMENTATION | PERIODISKT UNDERHÅLL MANUELLA RULLSTOLAR | SUNRISE MEDICAL AB |
| | NR 31200_1609 | SID 1 av 2 |

| | Kontrollerat OK | Utbytt |
|---|--------------------|--------|
| BRÖSTBÄLTE | | |
| Kontrollera att bröstbältet är utan skador samt att dess låsmekanism fungerar. | | |
| KNÄSTÖD | | |
| Kontrollera att knästödet är utan skador samt att dess hållare sitter ordentligt fast. | | |
| RAM | | |
| Kontrollera så att inga skador finns på ramen. | | |
| Kontrollera att ryggen kan fällas. | | |
| Kontrollera att ingen skevhet har uppkommit i ramen. | | |
| BROMS | | |
| Kontrollera att bromsarna tar ordentligt, lufttryck och inställn. | | |
| UPPRESNINGSFUNKTION | | |
| Kontrollera att uppresningsfunktionen fungerar | | |
| Kontrollera att stolen når full uppresning och att de främre stödbenen i detta läge når golvet samt att alla övriga hjul är i marken. | | |

Underhåll och rekonditionering:

- Kontrollera däcktrycket varje vecka. Kontrollera att inga skador eller slitage uppstått.
- Kontrollera bromsarna ungefär varje vecka för att försäkra dig om att de fungerar som de ska och att de är lätta att använda.
- Ladda batteriet regelbundet. Gärna om möjligt över natten varje dag. Kör ej stolens uppresningsfunktion då laddning utförs, detta kan skada stolens elektronik.
- Använd ett mildt rengöringsmedel när du rengör rullstolen.
- Torka av rullstolen med fuktig trasa och torka sedan torrt.

Rekonditionering för att undvika smittspridning vid återanvändning av rullstolen:

Då rullstolen ska användas av en ny person måste den förberedas ordentligt. Alla ytor som kan komma i kontakt med användaren bör torkas av och behandlas med desinfektionsmedel i sprayform. För desinfektion av ytor rekommenderas en alkoholbaserad spray.

| | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| TEKNISK DOKUMENTATION | PERIODISKT UNDERHÅLL MANUELLA RULLSTOLAR | SUNRISE MEDICAL AB |
| | NR 31200_1609 | SID 2 av 2 |