
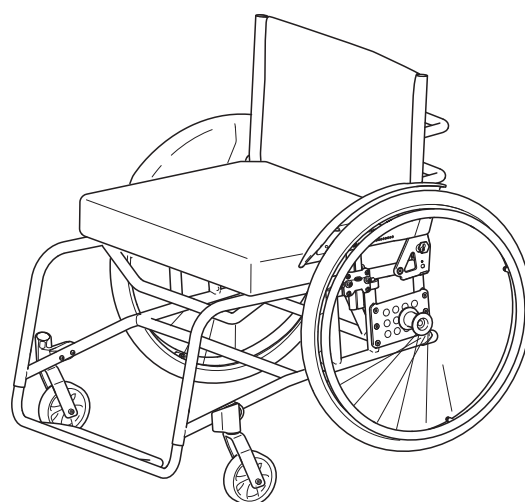
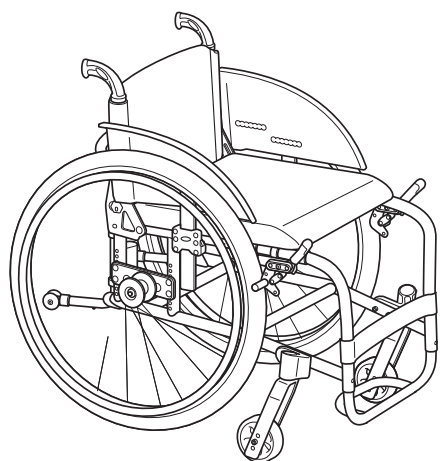
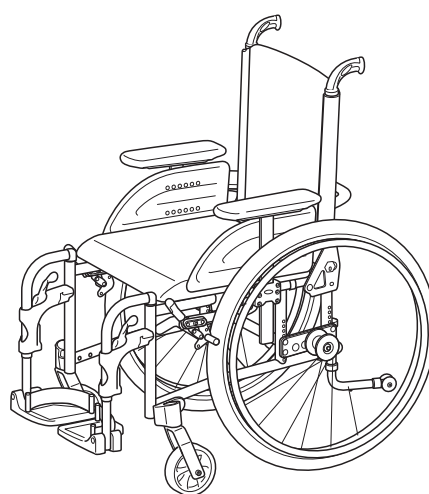


INVACARE[®] XLT

RULLSTOL

BRUKSANVISNING

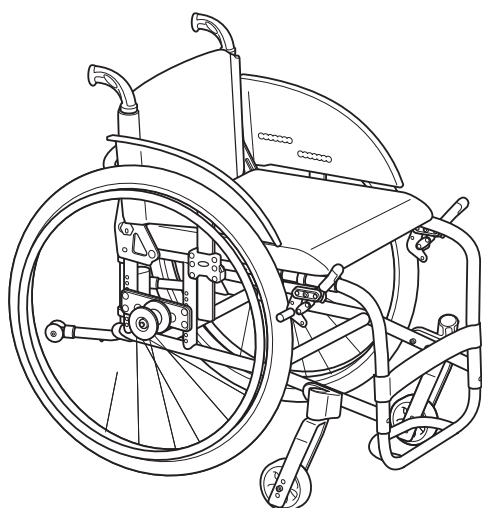

Yes, you can.[®]

© Invacare Rea AB

Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att innehållet i denna publikation är uppdaterat vid tidpunkten för tryckning. Som en del av det ständigt pågående förbättringsarbetet av våra produkter förbehåller sig Invacare Rea AB rätten att ändra befintliga modeller utan föregående meddelande. All användning av denna publikation, eller delar därav, samt varje återgivning av bilder, måste ha ett skriftligt medgivande från Invacare Rea AB.

INNEHÅLL

1. General	4		
1.1 Introduktion	4		
1.2 Symboler och signalord	4		
1.3 Garanti	4		
1.4 Garantibegränsningar	4		
1.5 Upphovsrättsskydd	4		
1.6 Kundservice	4		
1.7 Olyckor/tillbud	4		
1.8 Test	4		
1.9 Avsedd användning	5		
1.10 XLT modeller	5		
2. Säkerhet	6		
2.1 Lyft av rullstolen	6		
2.2 Daglig funktionskontroll	6		
2.3 Specifika risker	6		
3. Tekniska data	7		
3.1 Dimensioner och vikt	7		
3.2 Klädsel och ramfärger	8		
3.3 Utrustning och tillbehör	8		
3.4 Sitthöjdstabeller	9		
3.4.1 XLT active	9		
3.4.2 XLT dynamic	12		
3.4.3 XLT swing	14		
3.5 Serienummer etikett	17		
3.4.4 XLT max	17		
4. Att börja använda rullstolen	18		
4.1 Leveranskontroll	18		
4.2 Översikt rullstolen	18		
4.3 Montering	18		
4.3.1 Drivhjul	18		
4.3.2 Ryggstöd	18		
4.3.3 Armstöd	19		
4.3.4 Benstöd (xlt swing)	19		
5. Rullstolens delar och deras funktion	20		
5.1 Fotbåge	20		
5.1.1 Hög montering av fotbåge	20		
5.1.2 Fotbåge XLT max	20		
5.2 Fasta benstöd	21		
5.3 Vinkeljusterbart benstöd	21		
5.4 Vadstöd	22		
5.5 Fotplattor med justerbart djup och justerbar vinkel	22		
5.6 Hela fotplattor	22		
5.6.1 Footrest, one piece (xlt swing)	22		
5.6.2 Hel fotplatta xlt max	23		
5.7 Sits	24		
5.7.1 Justera sätets djup	24		
5.7.2 Justera formen	24		
5.8 Ryggstöd	24		
5.8.1 Vinkelinställning	24		
5.8.2 Afinjustering av ryggvinkeln	25		
5.8.3 Höjjustering	26		
5.9 Armstöd/stänkskydd	26		
5.9.1 Flip-up armstöd	26		
5.9.2 Avtagbart armstöd	26		
5.9.3 Stänkskydd	27		
5.9.4 Justering av glapp	27		
5.10 Bromsar	27		
5.10.1 Justering	27		
5.10.2 Standardbroms	27		
5.10.3 Performance broms	28		
5.10.4 Aktivbroms	28		
5.11 Drivhjul, justering	28		
5.12 Drivhjuljustering XLT max	29		
5.13 Camber	30		
5.14 Länkhjul	30		
5.14.1 Justera vinkeln	30		
5.15 Tillbehör	31		
5.15.1 Tippskydd	31		
5.15.2 Bälstöd	32		
5.15.3 Enarmsdrift	34		
5.15.4 Tipp-skydd för enarmsdrift	34		
5.15.5 Vårdarbroms	35		
5.15.6 Amputationsbenstöd	36		
5.15.7 Bakomliggande körhandtag	36		
5.15.8 Fällbara körhandtag	36		
5.15.9 Huvud- och nackstöd	37		
5.15.10 Midjebälte	37		
6. Att använda rullstolen	38		
6.1 Överflyttning till/från rullstol	38		
6.2 Sträcka och böja sig	38		
6.3 Köra uppför en sluttning	38		
6.4 Köra nedför en sluttning	38		
6.5 Trottoarkant	39		
6.6 Trottoarkant - alternativ metod	39		
6.7 Rulltrappor och trappor	39		
7. Transport	40		
7.1 Transporting av rullstol med brukare i fordon	40		
7.2 Fastspänning	41		
7.2 Hur man monterar isär xlt inför transport som bagage	42		
8. Underhåll	43		
8.1 Säkerhetsinformation	43		
8.2 Underhålls-schema	43		
8.3 Rengöring	44		
9. Återanvändning	45		

I. GENERAL

I.1 INTRODUKTION

Invacare® XLT är en rullstol med många alternativ för justering och ett flertal tillbehör. För att du ska kunna dra maximal nytta av din Invacare® XLT och för att du ska kunna utnyttja alla tänkbara möjligheter, måste stolen testas och justeras av kunnig personal. Vi hoppas att du även har fått anvisningar om hur du använder Invacare® XLT i vardagliga situationer.

Ram, fotbåge och ryggbåge på Invacare® XLT är tillverkade av titanium av hög kvalitet. För swingstolen är benstödshängaran tillverkade av aluminium. Stolsitsens överdrag är tillverkad i Jermima och ryggstödet överdrag är av nylon.

I denna handbok finns en beskrivning av stolens delar, enkla justeringsalternativ, information om hur man använder Invacare® XLT och hur man transporterar den. Läs igenom handboken noga innan stolen används.

I handboken finns även en beskrivning av hur de vanligaste tillbehören monteras samt information om inställningar som är lite mer avancerade.

Eftersom Invacare® XLT har många olika komponenter och tillbehör, kan utseendet på de tillbehör som du har till din stol variera från dem som visas i handboken.

I.2 SYMBOLER OCH SIGNALORD

I den här användarhandboken anges varningar med symboler. Varningssymbolerna har en rubrik som anger allvarighetsnivån.



VARNING

Informerar om en riskfylld situation som kan leda till allvarlig skada eller dödsfall om den inte undviks.



FÖRSIKTIGT

Informerar om en riskfylld situation som kan leda till lättare skador om den inte undviks.



VIKTIGT

Informerar om en riskfylld situation som kan leda till egendomsskada om den inte undviks.

I.3 GARANTI

Vi ger två års garanti från leveransdatumet. Skador som har uppstått till följd av normalt slitage på klädsel, däck (gummi), drivringar och länkhjul etc. omfattas inte av garantin. Skador som har orsakats av fysiskt våld eller onormal användning omfattas inte. Skador som orsakas av användare som väger mer än 135 kg omfattas inte. Garantin gäller endast om anvisningarna om underhåll har följts.

I.4 GARANTIBEGRÄNSNINGAR

Invacare Rea AB tar inget ansvar för skador som härrör från:

- Underlåtelse att följa brukarmanualen
- Felaktigt handhavande
- Förslitningsskador på t ex klädsel, däck, slangar, drivringar och länkhjul omfattas inte av garantin.
- Felaktig montering eller inställning utförd efter att rullstolen lämnat fabriken
- Tekniska modifieringar
- Ej godkända modifieringar och/eller användandet av ej anpassade reservdelar
- Skador orsakade av brukare som väger mer än den angivna brukarvikten för varje enskild modell är exkluderade

Skriftligt godkännande från Invacare Rea AB måste finnas innan några bearbetningar eller anpassningar, utöver de i manualen nämnda, får utföras på rullstolen.

I.5 UPPHOVSRÄTTSSKYDD

Den här användarhandboken är upphovsrättsskyddad. Den får inte återges i tryckt form, kopieras eller spridas till tredje part helt eller delvis utan föregående skriftligt godkännande från tillverkaren.

I.6 KUNDSERVICE

För kontaktdetaljer se sista sidan, där finns adresser till alla europeiska säljbolag.

I.7 OLYCKOR/TILLBUD

Eftersom detta är en CE-märkt produkt uppmanas du meddela ditt Invacarekontor, utan fördröjning, vid ev. olyckstillbud eller olycka som orsakats av denna rullstol och som kunnat leda till, eller lett till, personskada.

En sådan anmälan skall också göras till berörd myndighet.


I.8 TEST

Rea® Azalea är testad och godkänd på TÜV i Tyskland och är CE-märkt enligt Medicintekniska Direktivet.

1.9 AVSEDD ANVÄNDNING


- Invacare® XLT är en manuell rullstol avsedd för dem som använder rullstol under längre tidsperioder (flera timmar i sträck).
- Invacare® XLT är avsett för brukare som kan manövrera rullstolen själva samt för brukare som kräver assistans.
- Invacare® XLT har funktioner och tillbehör som gör det möjligt för brukaren att justera sittställningen så att den blir bekväm och möjlig att behålla i flera timmar.
- Invacare® XLT har många justeringsmöjligheter. Med rätt inställningar som gjorts av en professionell behörig person blir rullstolen både enkel att köra och manövrera såväl för brukare som för assistent. Användaren får en individuell anpassning av sätets form. De olika inställningarna beskrivs i bruksanvisningen som levereras tillsammans med rullstolen.
- Beroende på länkhjulets storlek (100–200) kan Invacare® XLT användas både inomhus och utomhus. Vi rekommenderar de större hjulen om rullstolen ska användas på ojämna underlag.
- Observera att Invacare® XLT kan välta bakåt när den körs i uppförbackar, i synnerhet om lutningen är mer än 8° eller om drivhjulen sitter långt fram på bakhjulsfästet. När drivhjulen är monterade på det sättet är Invacare® XLT lättare att köra tack vare den högre vikten på drivhjulen, men det innebär även att den välter bakåt lättare. Använd tipskydd när det finns risk för att rullstolen välter för att uppnå bättre stabilitet.
- Invacare® XLT är avsedd för användning med en sittdyna på sätet. Om det finns risk för trycksår rekommenderar vi användning av lämplig dyna. Dynan förbättrar brukarens hållning och gör det möjligt för honom att sitta bekvämt under längre tidsperioder i rullstolen.
- XLT kan användas som bilsäte om ryghöjden ställs in på min. 40 cm, samt att stolen är utrustad med ett nackstöd. Med andra modeller eller konfigurationer, måste brukaren flytta över till en vanlig sittplats i fordonet.

1.10 XLT MODELLER

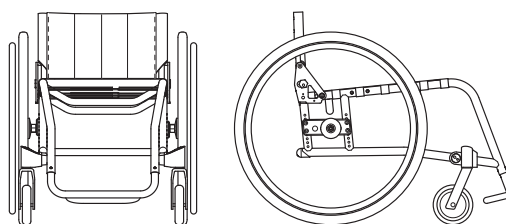


1. XLT Active (75° knävinkel)

XLT Active är konstruerad med en front som hjälper till att hålla ihop både underbenen och fötter. Levereras med fotbåge som standard.

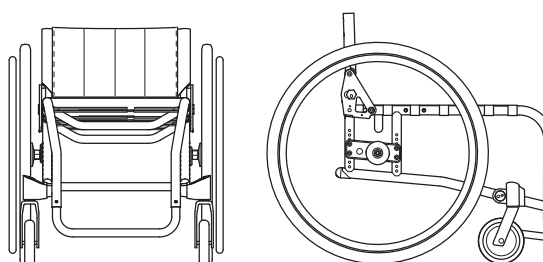


2. XLT Dynamic (90° knävinkel)

XLT Dynamic är konstruerad med en front som hjälper till att hålla ihop fötterna. Stolen är mycket kompakt och totallängden liten. Levereras med fotbåge som standard.

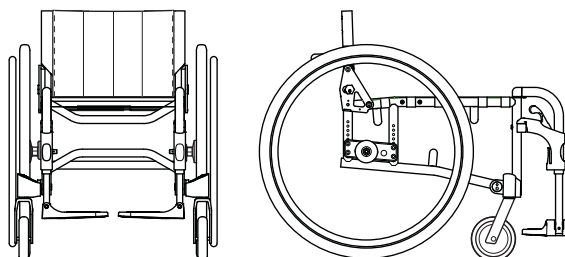

3. XLT Swing (80°, 90° och vinkeljusterbara benstöd)

XLT är konstruerad med en front som ger mer plats för underbenen och fötter. Levereras med avtagbara/ihopfällbara fotstöd som standard.


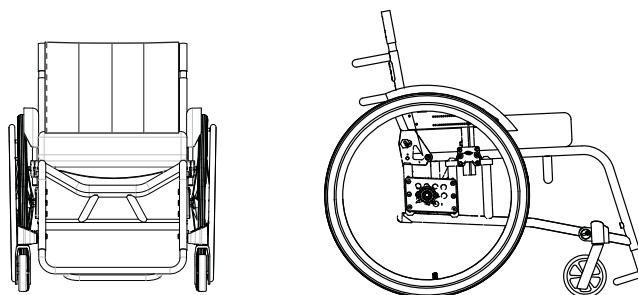


4. XLT Max (75°)

XLT Max är konstruerad för större brukare och är dimensionerad för brukare som väger upp till 180 kg.


2. SÄKERHET

2.1 LYFT AV RULLSTOLEN

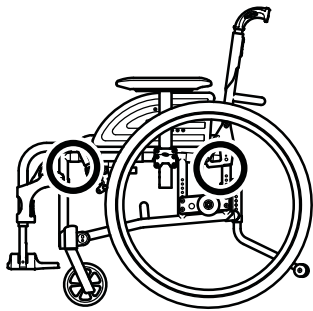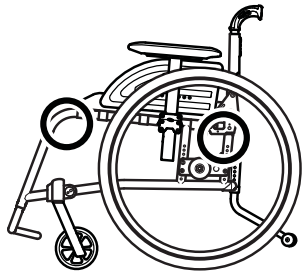

Lyft alltid rullstolen i de punkter som visas i bilden. Lyft aldrig rullstolen i de avtagbara armstöden eller benstöden. Försäkra dig om att ryggstöd och körhandtag sitter säkert fast.

Se även avsnitt Säkerhetsföreskrifter/körteknik

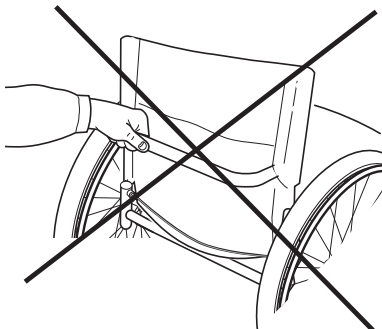

2.2 DAGLIG FUNKTIONSKONTROLL

Kontrollera att följande delar sitter fast ordentligt på rullstolen och att de fungerar som de ska:

- Hjul
- Bromsar
- Tipp-skydd, om monterade
- Körhandtag, om monterade
- Fotstöd eller fotbåge
- Bälte, om monterat
- Nack-/huvudstöd, om monterat

2.3 SPECIFIKA RISKER

Nedan ett antal punkter som påverkar din egen säkerhet. Läs det noggrant.

Invacare ansvarar endast för produktförändringar gjorda av oss behörig personal. Vi reserverar oss för eventuella förändringar på utrustning och specifikationer utan tidigare meddelande.

Med bibehållen CE märkning tillåts kombinationer med andra produkter som har kombinationsavtal med Invacare REA. Kontakta Invacare REA för lista på leverantörer.


Övriga anpassningar som görs av kund skall betraktas som "Specialanpassad produkt" med åtföljande krav på dokumentation och ansvarsövertagande av kund.

Givna instruktioner ska följas då det annars kan uppstå personskador eller skador på produkten.

- Kontrollera följande innan rullstolen tas i bruk:
 - att alla delar sitter fast på ramen
 - att alla vred och rattar är ordentligt åtdragna.
 - att alla bromsar och tippskydd fungerar ordentligt
- Bromsa alltid rullstolen innan brukaren ska flyttas i eller ur rullstolen.
- Stå aldrig på fotplattorna vid förflyttningar eftersom risk finns att rullstolen då kan välta.
- Tänk på att varje förändring av stolens balansering förändrar stolens tippbenägenhet framåt eller bakåt.
- Drivringarna kan bli varma på grund av friktionen, vilket kan skada dina händer.
- Använd tippskydden.
- Kom ihåg att effektiviteten på en brukarmanövrerad broms reduceras när underlaget är vått och halt liksom i upp-/nedförslutning.
- Kontrollera att drivhjulen är festsatta ordentligt.
- Det finns risk för tippning om kardborrbanden på ryggstödet är för slaka. Kontrollera alltid att dessa är spända ordentligt.
- Ramdelar eller klädsel som blir utsatta för långvarigt solsken kan nå en temperatur på över 41 °C.
- Vid montering av tillbehör o dyl bör du vara försiktig så att du inte klämmer fingrarna.

3. TEKNISKA DATA

3.1 DIMENSIONER OCH VIKT

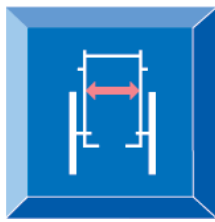


SW=Sitsbredd




SD=Sitsdjup



SH=Sitshöjd

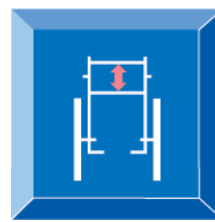

BH=Ryggstödhöjd

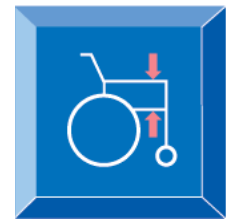

AH=Armstödhöjd




LL=Bestödslängd




SA=Sitsvinkel




BA=Ryggvinkel

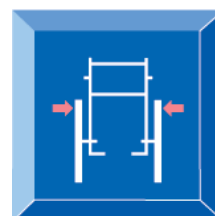

M=Totalbredd

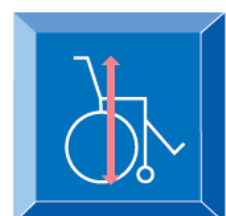

H=Totalhöjd

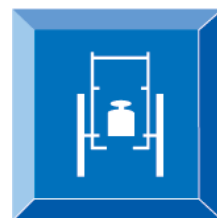

L=Totaldjup



W=Vikt



MW=Max. brukarvikt



TW=Transportvikt

* Fast/vinkeljusterbart ryggstöd

** Våra rullstolar överensstämmer med ISO norm 7176-19 och har testats i sin grundkonfiguration. Användning i andra konfigurationer har inte testats. Se avsnittet "Testrapport från dynamiskt säkerhetstest" för information om testkonfiguration. Brukaren bör använda fordonets säten och fordonets inbyggda säkerhetssystem när detta är möjligt.

	ACTIVE	DYNAMIC	SWING	MAX
SW (MM)	355/380/405/ 430/455/480	355/380/405/ 430/455/480	330/355/380/405/ 430/455/480/505	505/555/ 605
SD (MM)	360-400/410-450/ 460-500	360-400/410-450/ 460-500	360-400/410-450/ 460-500	500/550/600
SH (MM)*	400-520	400-500	390-520	440-520
BH (MM)*	200-350 / 300-490	200-350 / 300-490	200-350 / 300-490	400-490
AH (MM)	210-310	210-310	210-310	
LL (MM)*	380-505	355-485	280-510	380-480
SA (°)	0°-14°	0°-14°	0°-14°	0°-14°
BA (°)	±10°	±10°	±10°	±10°
W (MM)**	SEAT WIDTH +200 MM	SEAT WIDTH +200 MM	SEAT WIDTH +200 MM	SEAT WIDTH +210 MM
H (MM)	610-1050	610-1050	610-1050	790-1100
L (MM)	830-1030	730-880	820-1230	930-1080
M (KG)	9,8	9,8	11,3	15,5 KG
ML (KG)	135	135	135	180KG
TW (KG)***	6	6	6	11,1 KG

* med säteskudde

** med 0° camber

*** utan drivhjul och tillbehör

3.2 KLÄDSEL OCH RAMFÄRGER

Ryggklädsel

Svart nylon TR33,

Sätessklädsel

Svart Jermima TR18

Ramfärger

Svart, grå, blå, röd, grå, orange och blåstrad titanium

3.3 UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

Invacare® XLT har många tillbehör och möjligheter. Det är möjligt att inte alla tillbehör inte finns tillgängliga på din marknad och alla tillbehör är inte tillgängliga för alla modeller.

Ryggstöd

Ställbar ryggklädsel

Vinkelställbar, fast alt. ställbar höjd

Avsmalnad rygg

Sits

Ställbar alt. djupjusterbar sits

Sittdynor

Standard 5 cm

Flotech Contour***

Benstöd

Fast fotbåge*

Fast fotbåge med fotplatta**

Fotstöd helt, uppfällbart med justerbar vinkel

Fotstöd, högt monterat**

Benstöd 80° & 90° *

Benstöd vinkelställbart*

Fotplatta fast vinkel*

Fotplatta med justerbar vinkel och justerbart djup

Armstöd

Armstöd flip-up med lång eller kort dyna

Armstöd justerbart i höjddled "Rio", med lång eller kort dyna

Armstöd hemi

Komfortanrmstöd***

Länkhjul

75 - 125 mm (Dynamic),

75 - 180 mm (Swing, Active)

140 - 180 mm (Max)

Drivhjul

22", 24", 25", 26" lufthjul eller massiva

24", enarmsdrift

Broms

Brukarbroms (3 olika)

Vårdarbroms

Enarmsbroms

Övrigt

Olika typer av drivringar

Ekerskydd

Tippskydd

Bålstöd

Reflexer

Bord

Pump

Käpphållare

Verktygssats

Bakomliggande körhandtag

Midjebälte

Stänkskydd

Sidoskydd

Tramprör

Bromsspak, förlängning

Monteringsats för E-Motion och E-Fix

Enarmsdrift

* endast för XLT Swing

** endast för XLT Active och Dynamic

*** endast för XLT Max

3.4 SITTHÖJDSTABELLER

3.4.1 xlt active

SHf	SHr							L=75	L=110	L=150	mm
	1	2	3	4	5	6	*				
22"											
40				40	39	38		2			75 (3")
41			41	40	39	38		1			75 (3")
41			41	40	39	38		2			100 (4")
42			41-42	40	39	38		1			100 (4")
43		43	41-42	40	39	38			2		75 (3")
43		43	41-42	40	39	38			4		125 (5")
43		43	41-42	40	39	38			3		100 (4")
43		43	41-42	40	39	38		1			125 (5")
44	44	43	41-42	40	39	38			4		140 (5,5")
44	44	43	41-42	40	39	38			1		75 (3")
44	44	43	41-42	40	39	38			3		125 (5")
44	44	43	41-42	40	39	38			2		100 (4")
45	44	43	41-42	40	39	38			3		140 (5,5")
45	44	43	41-42	40	39	38			1		100 (4")
45	44	43	41-42	40	39	38			2		125 (5")
45	44	43	41-42	40	39	38			3		150 (6")
46	44	43	41-42	40	39	38			2		140 (5,5")
47	44	43	41-42	40	39	38			1		125 (5")
47	44	43	41-42	40	39	38			2		150 (6")
47	44	43	41-42	40	39	38				2	75 (3")
47	44	43	41-42	40	39	38				3	100 (4")
47	44	43	41-42	40	39	38				4	125 (5")
47	44	43	41-42	40	39				1		140 (5,5")
48	44	43	41-42	40	39					4	140 (5,5")
48	44	43	41-42	40	39				1		150 (6")
48	44	43	41-42	40	39				2		180 (7")
48	44	43	41-42	40						1	75 (3")
48	44	43	41-42	40						2	100 (4")
48	44	43	41-42	40						3	125 (5")
48	44	43	41-42	40						4	150 (6")
49	44	43	41-42	40						3	140 (5,5")
49	44	43	41-42	40					1		180 (7")
49	44	43	41-42							1	100 (4")
50	44	43	41-42							2	125 (5")
50	44	43	41-42							3	150 (6")
50	44	43								4	180 (7")
50	44	43								2	140 (5,5")
51	44	43								1	125 (5")
51	44	43								2	150 (6")
51	44	43								3	180 (7")
51	44	43								1	140 (5,5")
52	44	44								1	150 (6")
52	44	44								2	180 (7")

* = Inte tillämpligt SD = sitsdjup






SHf	SHr							L=75	L=110	L=150	mm
	1	2	3	4	5	6	*				
24"/25" Low profile											
40						40		2			75 (3")
41					41	40		1			75 (3")
41					41	40		2			100 (4")
42					41-42	40		1			100 (4")
43				43	41-42	40			2		75 (3")
43				43	41-42	40			4		125 (5")
43				43	41-42	40			3		100 (4")
43				43	41-42	40		1			125 (5")
44				43	41-42	40			4		140 (5,5")
44				43	41-42	40			1		75 (3")
44			44	43	41-42	40			3		125 (5")
44			44	43	41-42	40			2		100 (4")
45		45	44	43	41-42	40			3		140 (5,5")
45		45	44	43	41-42	40			1		100 (4")
45		45	44	43	41-42	40			2		125 (5")
45		45	44	43	41-42	40			3		150 (6")
46	46	45	44	43	41-42	40			2		140 (5,5")
47	46-47	45	44	43	41-42	40			1		125 (5")
47	46-47	45	44	43	41-42	40			2		150 (6")
47	46-47	45	44	43	41-42	40				2	75 (3")
47	46-47	45	44	43	41-42	40				3	100 (4")
47	46-47	45	44	43	41-42	40				4	125 (5")
47	46-47	45	44	43	41-42	40			1		140 (5,5")
48	46-47	45	44	43	41-42	40				4	140 (5,5")
48	46-47	45	44	43	41-42	40			1		150 (6")
48	46-47	45	44	43	41-42	40	* DI-4 (SD40)		2		180 (7")
48	46-47	45	44	43	41-42	40				1	75 (3")
48	46-47	45	44	43	41-42	40				2	100 (4")
48	46-47	45	44	43	41-42	40				3	125 (5")
48	46-47	45	44	43	41-42	40				4	150 (6")
49	46-47	45	44	43	41-42	40				3	140 (5,5")
49	46-47	45	44	43	41-42	40			1		180 (7")
49	46-47	45	44	43	41-42	40				1	100 (4")
50	46-47	45	44	43	41-42	40				2	125 (5")
50	46-47	45	44	43	41-42					3	150 (6")
50	46-47	45	44	43	41-42					4	180 (7")
50	46-47	45	44	43	41-42					2	140 (5,5")
51	46-47	45	44	43	41-42					1	125 (5")
51	46-47	45	44	43	41-42					2	150 (6")
51	46-47	45	44	43	41-42		* DI-5 (SD40)			3	180 (7")
51	46-47	45	44	43						1	140 (5,5")
52	46-47	45	44	43						1	150 (6")
52	46-47	45	44	43			* DI-3 (SD40)			2	180 (7")

* = Inte tillämpligt SD = sitsdjup

SHf	SHr						L=75	L=110	L=150	mm
	1	2	3	4	5	6				
26" Low profile										
41					41		1			75 (3")
41					41		2			100 (4")
42					42	41	1			100 (4")
43					42-43	41		2		75 (3")
43					42-43	41		4		125 (5")
43					42-43	41		3		100 (4")
43					42-43	41	1			125 (5")
44			44		42-43	41		4		140 (5,5")
44			44		42-43	41		1		75 (3")
44			44		42-43	41		3		125 (5")
44			44		42-43	41		2		100 (4")
45			45	44	42-43	41		3		140 (5,5")
45			45	44	42-43	41		1		100 (4")
45			45	44	42-43	41		2		125 (5")
45			45	44	42-43	41	* D4 (SD40)	3		150 (6")
46		46	45	44	42-43	41		2		140 (5,5")
47	47	46	45	44	42-43	41		1		125 (5")
47	47	46	45	44	42-43	41	* D2 (SD40)	2		150 (6")
47	47	46	45	44	42-43	41			2	75 (3")
47	47	46	45	44	42-43	41			3	100 (4")
47	47	46	45	44	42-43	41			4	125 (5")
47	47	46	45	44	42-43	41		1		140 (5,5")
48	47-48	46	45	44	42-43	41			4	140 (5,5")
48	47-48	46	45	44	42-43	41	* D2 (SD40)	1		150 (6")
48	47-48	46	45	44	42-43	41	* D2-6 (SD40)	2		180 (7")
48	47-48	46	45	44	42-43	41			1	75 (3")
48	47-48	46	45	44	42-43	41			2	100 (4")
48	47-48	46	45	44	42-43	41			3	125 (5")
48	47-48	46	45	44	42-43	41			4	150 (6")
49	47-48	46	45	44	42-43	41			3	140 (5,5")
49	47-48	46	45	44	42-43	41	* C1,DI-6 (SD40)	1		180 (7")
49	47-48	46	45	44	42-43	41			1	100 (4")
50	47-48	46	45	44	42-43	41			2	125 (5")
50	47-48	46	45	44	42-43	41	* D1 (SD40)		3	150 (6")
50	47-48	46	45	44	42-43	41	* D1-6 (SD40)		4	180 (7")
50	47-48	46	45	44	42-43	41			2	140 (5,5")
51	47-48	46	45	44	42-43	41			1	125 (5")
51	47-48	46	45	44	42-43	41			2	150 (6")
51	47-48	46	45	44	42-43	41	*DI-6 (SD40)		3	180 (7")
51	47-48	46	45	44	42-43	41			1	140 (5,5")
52	47-48	46	45	44	42-43				1	150 (6")
52	47-48	46	45	44	42-43		* DI-6 (SD40)		2	180 (7")

* = Inte tillämpligt SD = sitsdjup

3.4.2 XLT Dynamic

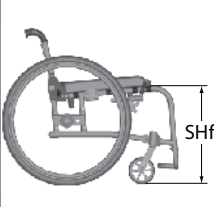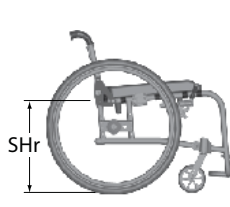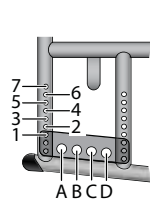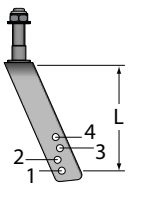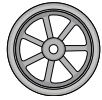											
SHf		SHr						L=75	L=110	L=150	mm
		1	2	3	4	5	6	*			
22"											
39					39	38			2		75 (3")
40				40	39	38			1		75 (3")
41				40	39	38			2		100 (4")
42			41-42	40	39	38			1		100 (4")
43		43	41-42	40	39	38				2	75 (3")
43		43	41-42	40	39	38				4	125 (5")
43		43	41-42	40	39	38			3		100 (4")
43		43	41-42	40	39	38	* D3 (SD40)	1			125 (5")
44		43	41-42	40	39	38			1		75 (3")
44		43	41-42	40	39	38	* D2 (SD40)		3		125 (5")
44	44	43	41-42	40	39	38			2		100 (4")
45	44	43	41-42	40	39	38			1		100 (4")
45	44	43	41-42	40	39	38	* D1 (SD40)		2		125 (5")
46	44	43	41-42	40			* D1 (SD40)		1		125 (5")
47	44	43	41-42	40						2	75 (3")
47	44	43	41-42	40						3	100 (4")
47	44	43	41-42							4	125 (5")
48	44	43	41-42							1	75 (3")
48	44	43	41-42							2	100 (4")
48	44	43	41-42							3	125 (5")
49	44	43	41-42							1	100 (4")
49	44	43	41-42							2	125 (5")
50	44	43								1	125 (5")
24" / 25" Low profile											
40						40			1		75 (3")
41						40			2		100 (4")
42					41-42	40			1		100 (4")
43				43	41-42	40	* D5 (SD40)		2		75 (3")
43				43	41-42	40	* D1-6 (SD40)		4		125 (5")
43				43	41-42	40	* D5 (SD40)		3		100 (4")
43				43	41-42	40	* D1-6 (SD40)	1			125 (5")
44			44	43	41-42	40	* D4-5 (SD40)		1		75 (3")
44			44	43	41-42	40	* D1-6 (SD40)		3		125 (5")
44			44	43	41-42	40	* D4 (SD40)		2		100 (4")
45		45	44	43	41-42	40	* D3-4 (SD40)		1		100 (4")
45		45	44	43	41-42	40	* D3-6 (SD40)		2		125 (5")
46	46	45	44	43	41-42	40	* D2-6 (SD40)		1		125 (5")
47	46-47	45	44	43	41-42	40	* D2-4 (SD40)			2	75 (3")
47	46-47	45	44	43	41-42	40	* D2-4 (SD40)			3	100 (4")
47	46-47	45	44	43	41-42	40	* D2-5 (SD40)			4	125 (5")
48	46-47	45	44	43	41-42	40	* D1-4 (SD40)			1	75 (3")
48	46-47	45	44	43	41-42	40	* D1-4 (SD40)			2	100 (4")
48	46-47	45	44	43	41-42	40	* D1-5 (SD40)			3	125 (5")
49	46-47	45	44	43	41-42		* D1-4 (SD40)			1	100 (4")
49	46-47	45	44	43	41-42		* D1-4 (SD40)			2	125 (5")
50	46-47	45	44	43			* D1-6 (SD40)			1	125 (5")

* = Inte tillämpligt SD = sitsdjup

SHf	SHr							L=75	L=110	L=150	mm
	1	2	3	4	5	6	*				
26" Low profile											
42						41	* D1-6 (SD40)	1			100 (4")
43					42-43	41	* D1-6 (SD40)		2		75 (3")
43					42-43	41	* D1-6 (SD40)		4		125 (5")
43					42-43	41	* D1-6 (SD40)		3		100 (4")
43					42-43	41	* D1-6 (SD40)	1			125 (5")
44				44	42-43	41	* D1-6 (SD40)		1		75 (3")
44					42-43	41	* D1-6 (SD40)		3		125 (5")
44				44	42-43	41	* D1-6 (SD40)		2		100 (4")
45			45	44	42-43	41	* D1-6 (SD40)		1		100 (4")
45			45	44	42-43	41	* D1-6 (SD40)		2		125 (5")
46		46	45	44	42-43	41	* D1-6 (SD40)		1		125 (5")
47	47	46	45	44	42-43	41	* D1-6 (SD40)			2	75 (3")
47	47	46	45	44	42-43	41	* D1-6 (SD40)			3	100 (4")
47	47	46	45	44	42-43	41	* D1-6 (SD40)			4	125 (5")
48	47-48	46	45	44	42-43	41	* D1-6 (SD40)			1	75 (3")
48	47-48	46	45	44	42-43	41	* D1-6 (SD40)			2	100 (4")
48	47-48	46	45	44	42-43	41	* D1-6 (SD40)			3	125 (5")
49	47-48	46	45	44	42-43	41	* D1-6 (SD40)			1	100 (4")
49	47-48	46	45	44	42-43	41	* D1-6 (SD40)			2	125 (5")
50	47-48	46	45	44	42-43		* D1-6 (SD40)			1	125 (5")

* = Inte tillämpligt SD = sitsdjup

3.4.3 XLT Swing

SHf		SHr							L=75	L=110	L=150	mm
		1	2	3	4	5	6	7	*			
22"												
39					39	38				2		75 (3")
40				40	39	38				1		75 (3")
41			41	40	39	38				2		100 (4")
42			41-42	40	39	38				1		100 (4")
43		43	41-42	40	39	38				2		75 (3")
43		43	41-42	40	39	38				4		125 (5")
43		43	41-42	40	39	38				3		100 (4")
43		43	41-42	40	39	38				1		125 (5")
44		43	41-42	40	39	38				4		140 (5,5")
44		43	41-42	40	39	38				1		75 (3")
44		43	41-42	40	39	38				3		125 (5")
44		43	41-42	40	39	38				2		100 (4")
45	44	43	41-42	40	39	38			* DI-2 (SD40)	3		140 (5,5")
45	44	43	41-42	40	39	38				1		100 (4")
45	44	43	41-42	40	39	38				2		125 (5")
45	44	43	41-42	40	39	38			* DI-4 (SD40)	3		150 (6")
46	44	43	41-42	40	39					2		140 (5,5")
47	44	43	41-42	40	39					1		125 (5")
47	44	43	41-42	40	39				* DI-2 (SD40)	2		150 (6")
47	44	43	41-42	40	39						2	75 (3")
47	44	43	41-42	40	39						3	100 (4")
47	44	43	41-42	40	39						4	125 (5")
47	44	43	41-42	40					* DI-2 (SD40)	1		140 (5,5")
48	44	43	41-42	40					* DI-2 (SD40)		4	140 (5,5")
48	44	43	41-42	40					* DI-3 (SD40)	1		150 (6")
48	44	43	41-42	40					* DI-6 (SD40)	2		180 (7")
48	44	43	41-42	40							1	75 (3")
48	44	43	41-42	40							2	100 (4")
48	44	43	41-42	40							3	125 (5")
48	44	43	41-42	40					* DI-2 (SD40)		4	150 (6")
49	44	43	41-42								3	140 (5,5")
49	44	43	41-42						* CI-2,DI-6 (SD40) + DI-2 (SD45)	1		180 (7")
49	44	43	41-42								1	100 (4")
50	44	43	41-42								2	125 (5")
50	44	43	41-42						* DI-2 (SD40)		3	150 (6")
50	44	43	41-42						* DI-6 (SD40)		4	180 (7")
50	44	43									2	140 (5,5")
51	44	43									1	125 (5")
51	44	43									2	150 (6")
51	44	43							* CI,DI-6 (SD40) + DI (SD45)		3	180 (7")
51	44										1	140 (5,5")
52	44								* DI-6 (SD40)		1	150 (6")
52	44								* DI-6 (SD40)		2	180 (7")

* = Inte tillämpligt SD = sitsdjup

SHf		SHr						L=75	L=110	L=150	mm	
		1	2	3	4	5	6	*				
24"/25" Low profile												
40						40			2		75 (3")	
41					41	40			1		75 (3")	
41					41	40			2		100 (4")	
42					41-42	40			1		100 (4")	
43				43	41-42	40				2	75 (3")	
43				43	41-42	40				4	125 (5")	
43				43	41-42	40			3		100 (4")	
43				43	41-42	40			1		125 (5")	
44			44	43	41-42	40		* D4-6 (SD40)		4	140 (5,5")	
44			44	43	41-42	40				1	75 (3")	
44			44	43	41-42	40				3	125 (5")	
44			44	43	41-42	40				2	100 (4")	
45		45	44	43	41-42	40		* D3-6 (SD40)		3	140 (5,5")	
45		45	44	43	41-42	40				1	100 (4")	
45		45	44	43	41-42	40				2	125 (5")	
45		45	44	43	41-42	40		* D1-6 (SD40)		3	150 (6")	
46	46	45	44	43	41-42	40		* D2-5 (SD40)		2	140 (5,5")	
47	46	45	44	43	41-42	40		* D1 (SD40)		1	125 (5")	
47	46	45	44	43	41-42	40		* D2-6 (SD40)		2	150 (6")	
47	46	45	44	43	41-42	40					2	75 (3")
47	46	45	44	43	41-42	40					3	100 (4")
47	46	45	44	43	41-42	40					4	125 (5")
47	46	45	44	43	41-42	40		* D1-5 (SD40)		1	140 (5,5")	
48	46	45	44	43	41-42	40		* D1-4 (SD40)			4	140 (5,5")
48	46	45	44	43	41-42	40				1	150 (6")	
48	46	45	44	43	41-42	40				2	180 (7")	
48	46	45	44	43	41-42	40					1	75 (3")
48	46	45	44	43	41-42	40					2	100 (4")
48	46	45	44	43	41-42	40					3	125 (5")
48	46	45	44	43	41-42	40		* D1-6 (SD40)			4	150 (6")
49	46	45	44	43	41-42			* D1-4 (SD40)			3	140 (5,5")
49	46	45	44	43	41-42					1	180 (7")	
49	46	45	44	43	41-42						1	100 (4")
50	46	45	44	43	41-42						2	125 (5")
50	46	45	44	43	41-42			* D1-6 (SD40)			3	150 (6")
50	46	45	44	43				* CI-7, D1-6 (SD40) + D1-6 (SD45)			4	180 (7")
50	46	45	44	43				* D1-3 (SD40)			2	140 (5,5")
51	46	45	44	43							1	125 (5")
51	46	45	44	43				* D1-6 (SD40)			2	150 (6")
51	46	45	44	43				* CI-6, D1-6 (SD40) + D1-6 (SD45)			3	180 (7")
51	46	45	44					* D1-3 (SD40)			1	140 (5,5")
52	46	45	44					* D1-6 (SD40)			1	150 (6")
52	46	45	44					* CI-6, D1-6 (SD40) + D1-6 (SD45)			2	180 (7")

* = Inte tillämpligt SD = sitsdjup

SHf		SHr						L=75	L=110	L=150	mm			
		1	2	3	4	5	6	*						
26" Low profile														
41							41		1				75 (3")	
41							41		2				100 (4")	
42						42	41		1				100 (4")	
43						42-43	41			2			75 (3")	
43						42-43	41			4			125 (5")	
43						42-43	41			3			100 (4")	
43						42-43	41	* D6 (SD40)	1				125 (5")	
44					44	42-43	41	* D1-6 (SD40)		4			140 (5,5")	
44						42-43	41			1			75 (3")	
44					44	42-43	41	* D5-6 (SD40)		3			125 (5")	
44					44	42-43	41			2			100 (4")	
45				45	44	42-43	41	* D1-6 (SD40)		3			140 (5,5")	
45				45	44	42-43	41	* D4 (SD40)		1			100 (4")	
45				45	44	42-43	41	* D4 (SD40)		2			125 (5")	
45				45	44	42-43	41	* C4-5,D1-6 (SD40) + D4-5 (SD45)		3			150 (6")	
46			46	45	44	42-43	41	* D1-6 (SD40)		2			140 (5,5")	
47	47	46	45	44	42-43	41	41	* D2-4 (SD40)		1			125 (5")	
47	47	46	45	44	42-43	41	41	* C2-3,D1-6 (SD40) + D2-3 (SD45)		2			150 (6")	
47	47	46	45	44	42-43	41	41				2		75 (3")	
47	47	46	45	44	42-43	41	41	* D2-3 (SD40)			3		100 (4")	
47	47	46	45	44	42-43	41	41	* D2-3 (SD40)			4		125 (5")	
47	47	46	45	44	42-43	41	41	* D1-6 (SD40)		1			140 (5,5")	
48	47	46	45	44	42-43	41	41	* D1-6 (SD40)			4		140 (5,5")	
48	47	46	45	44	42-43	41	41	* C2-3,D1-6 (SD40) + D2-3 (SD45)		1			150 (6")	
48	47	46	45	44	42-43	41	41	* B2,C1-6,D1-6 (SD40) + D1-6 (SD45)		2			180 (7")	
48	47	46	45	44	42-43	41	41				1		75 (3")	
48	47	46	45	44	42-43	41	41	* D2-3 (SD40)			2		100 (4")	
48	47	46	45	44	42-43	41	41	* D2-3 (SD40)			3		125 (5")	
48	47	46	45	44	42-43	41	41	* D1-6 (SD40) + D2 (SD45)			4		150 (6")	
49	47	46	45	44	42-43	41	41	* D1-6 (SD40)			3		140 (5,5")	
49	47	46	45	44	42-43	41	41	* B1-4,C1-3,D1-6 (SD40) + C1-2,D1-6 (SD45)		1			180 (7")	
49	47	46	45	44	42-43	41	41	* D1-2 (SD40)			1		100 (4")	
50	47	46	45	44	42-43	41	41	* D1-2 (SD40)			2		125 (5")	
50	47	46	45	44	42-43	41	41	* C1-3,D1-6 (SD40) + D1-3 (SD45)			3		150 (6")	
50	47	46	45	44	42-43	41	41	* B1,C1-7,D1-7 (SD40) + D1-6 (SD45)			4		180 (7")	
50	47	46	45	44	42-43			* D1-6 (SD40)			2		140 (5,5")	
51	47	46	45	44	42-43			* D1-2 (SD40)			1		125 (5")	
51	47	46	45	44	42-43			* C1,D1-6 (SD40) + D1 (SD45)			2		150 (6")	
51	47	46	45	44	42-43			* B1-2,C1-6,D1-6 (SD40) + C1-2,D1-6 (SD45)			3		180 (7")	
51	47	46	45	44				* D1-6 (SD40)			1		140 (5,5")	
52	47	46	45	44				* C1,D1-6 (SD40) + D1 (SD45)			1		150 (6")	
52	47	46	45	44				* C1-6,D1-6 (SD40) + D1-6 (SD45)			2		180 (7")	


* = Inte tillämpligt SD = sitsdjup

3.4.4 XLT Max

SHf	SHr							L=110	L=150	mm
	A1	A2	B1	B2	C1	C2	*			
24"										
44	*	*	44	43-42	41	40		4	*	140 (5,5")
45	*	45	44	43-42	41	40		3	*	140 (5,5")
46	*	45	44	43-42	41	40		3	*	150 (6")
47	46	45	44-43	42	41	40		2	*	140 (5,5")
47	46	45	44-43	42	41	40		2	*	150 (6")
48	46	45	44-43	42	41	40		1	*	140 (5,5")
48	46	45	44-43	42	41	40-39		1	*	150 (6")
48	46	45	44-43	42	41	40-39		2	*	180 (7")
49	46	45	44-43	42	41	40-39		*	4	150 (6")
49	46	45	44-43	42	41-40	39		*	3	140 (5,5")
49	46	45	44-43	42	41-40	39		1	*	180 (7")
50	46	45-44	43	42	41-40	39		*	3	150 (6")
50	46	45-44	43	42	41-40	39		*	4	180 (7")
50	46	45-44	43	42	41-40	39		*	2	140 (5,5")
51	46	45-44	43	42	41-40	39		*	2	150 (6")
51	46	45-44	43	42	41-40	39		*	3	180 (7")
51	46	45-44	43	42	41-40	*		*	1	140 (5,5")
52	46	45-44	43	42	41-40	*		*	1	150 (6")
52	46	45-44	43	42-41	41	*		*	2	180 (7")

* = Inte tillämpligt SD = sitsdjup

3.5 SERIENUMMER ETIKETT

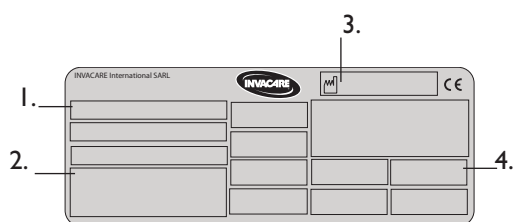



Här sitter serienummeretiketten

4. ATT BÖRJA ANVÄNDA RULLSTOLEN

4.1 LEVERANSKONTROLL

En eventuell transportskada ska genast anmälas till transportbolaget. Tänk på att behålla förpackningen tills dess att transportbolaget kontrollerat godset och en uppgörelse kommit till stånd


4.2 ÖVERSIKT RULLSTOLEN

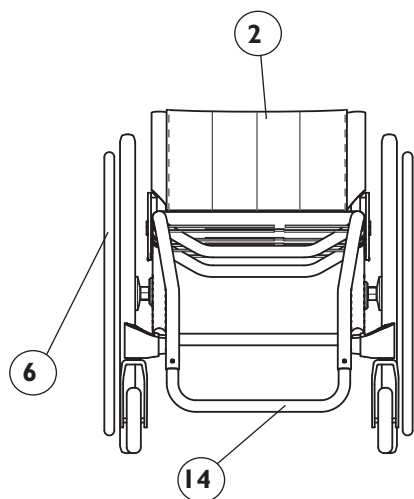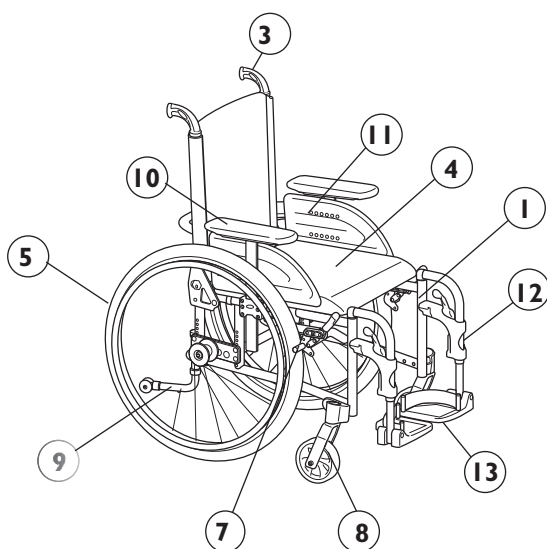

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Ram (chassi) | 8. Länkhjul |
| 2. Ryggstöd | 9. Tippskydd |
| 3. Körhandtag | 10. Armstöd |
| 4. Sits | 11. Sidoskydd |
| 5. Drivhjul | 12. Benstöd |
| 6. Drivring | 13. Fotstöd |
| 7. Bromsar | 14. Fotbåge |

4.3 MONTERING

4.3.1 Drivhjul

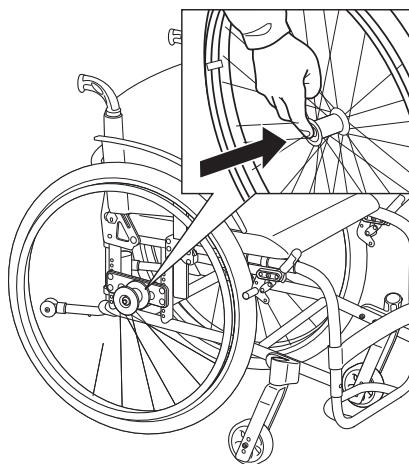


Montera drivhjulen genom att trycka på knappen mitt på navet, samtidigt som du placerar axeln i drivhjulsplattan.



Det är mycket viktigt att du kontrollerar att låsspärren faktiskt har låst fast hjulet när du har släppt knappen. Prova om det går att ta loss hjulen. Det ska **INTE** vara möjligt.

4.3.2 Ryggstöd

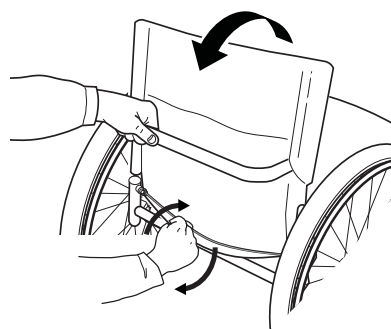


Vik upp ryggstödet genom att ta tag i vajern nertill på baksidan av ryggstödet och vrida till för att lossa låstapparna. Dra ryggstödet bakåt/uppåt tills det fästs på plats. Kontrollera att det har låsts fast ordentligt. XLT Max låses inte i nedfällt läge. Dra bara ryggen uppåt och se till att den fixeras i uppfällt läge.



Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna i ryggstödet.

4.3.3 Armstöd

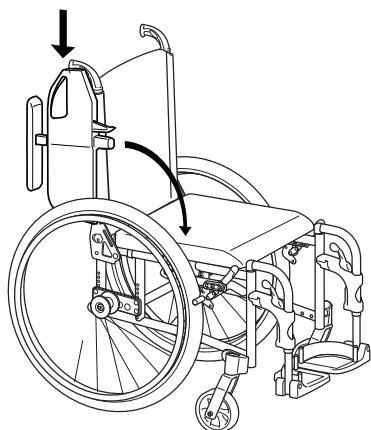


Montera armstödet genom att sätta det i fästet på ryggstödet ram och vrid sedan ner det tills det sitter på plats.



Placera inte fingrarna på sitsramen.

Om avtagbara armstöd används ska dessa föras ner i fästet på ramen.

4.3.4 Benstöd (XLT Swing)

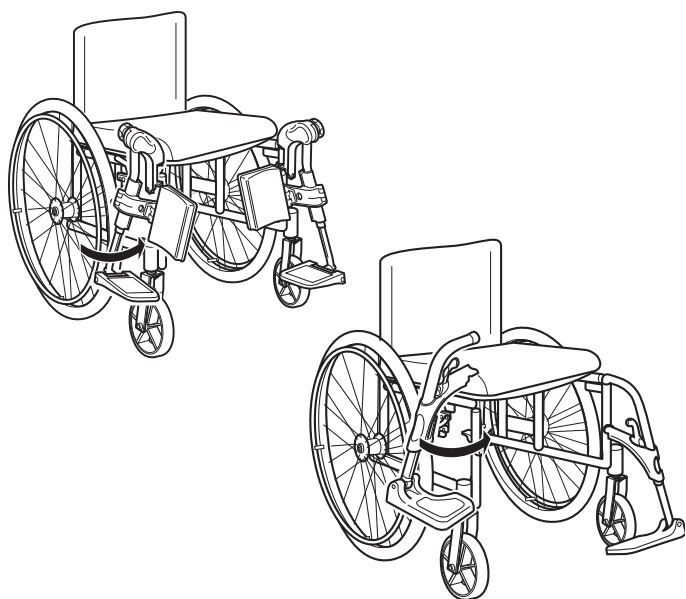

Montera benstöden genom att trycka ner röret upptill på benstöden i rören på rullstolen. Du måste vinkla ut benstöden när du monterar dem.


Lås benstöden genom att vrida dem inåt. Benstöden låses automatiskt fast, så det finns inte någon risk för att de lossnar från rullstolen.



Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan ram och benstöd.

5. RULLSTOLENS DELAR OCH DERAS FUNKTION

5.1 FOTBÅGE

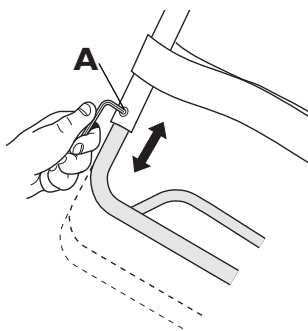


Verktyg: 4 mm insexnyckel
10 mm fast nyckel

Höjjustering, fotbåge

Lossa skruvarna med en insexnyckel, ta bort dem och justera fotbågen till den höjd som passar dig. Skruva i skruvarna igen och justera vadbandet.

! Avståndet mellan fotstödetets lägsta del och underlaget måste vara minst 40 mm.




5.1.1 Hög montering av fotbåge

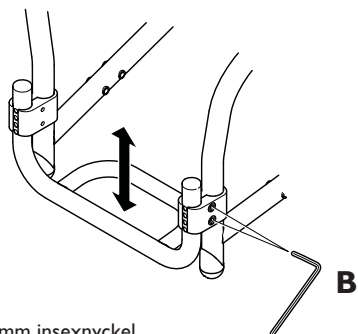

Verktyg: 5 mm insexnyckel

Lossa skruvarna med en insexnyckel och justera klämma och fotbågen till lämplig höjd. Fäst skruvarna igen och justera vadbandet.

5.1.2 Fotbåge XLT Max

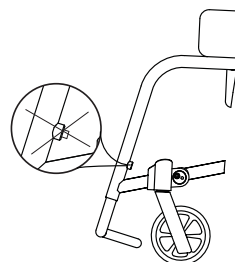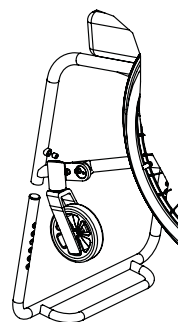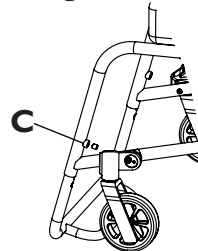

Lossa skruvarna (C) med en insexnyckel, och justera fotbågen till den höjd som passar genom att passa in skruven i ett av de sex hål som finns på röret. Skruva åt skruvarna igen och justera vadbandet. Se till att skruvarna inte sticker ut ur hylsan på röret.



Varning!


Skaderisk

Fotbågen kan falla ur om skruvarna inte är åtdragna som de ska. Se till att båda skruvarna är positionerade i hålen på röret.



Avståndet mellan fotstödetets lägsta del och underlaget måste vara minst 40 mm.

5.2 FASTA BENSTÖD

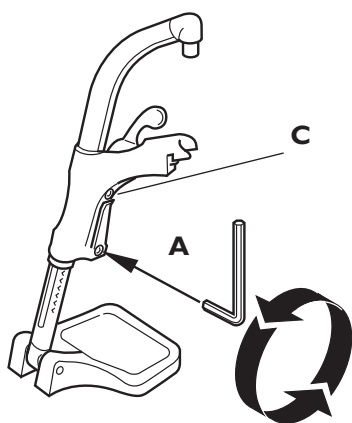

Verktyg: 5 mm insexnyckel

Höjdinställning

Justera fotstödens höjd genom att lossa skruven (A) ett halvt varv med en insexnyckel. När höjden justeras hörs ett knäppande ljud. Ett ”knäpp” är ett steg i höjddled. Dra i benstödet tills du har ställt in rätt höjd och skruven fästs i ett av lägena i benstödet rör. Dra sedan åt skruven igen.


OBS! Rör inte den övre skruven (C).




Avståndet mellan fotstödet lägsta del och underlaget måste vara minst 40 mm.

5.3 VINKELJUSTERBART BENSTÖD

1.

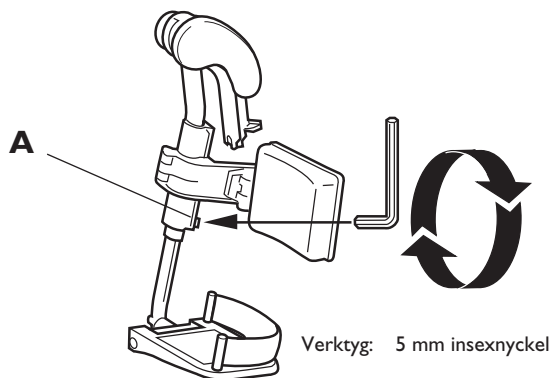

2.

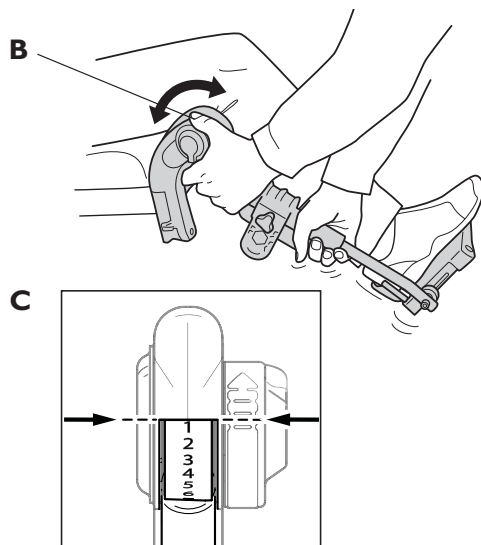

Vinkeljusterbara benstöd stödjer benen och avlastar tryck. Benstöden kan användas till bandagerade, men inte gipsade ben. Benstöden måste alltid utrustas med vaddstöd, fotstöd och hälband.

Det är viktigt att justera höjden och vinkeln för att få en så god sittställning som möjligt.

1. Höjdinställning

Justera benstödet höjd genom att lossa skruven (A) ett varv med en sexkantnyckel. Dra benstödet tills rätt höjd erhållits och skruven griper i ett av lägena på benstödet rör. Skruva åt skruven igen.

2. Benstödet vinkling

Håll in spak (B) med en hand samtidigt som du avlastar benstödet med den andra handen. När en lämplig vinkel har uppnåtts, släpp spaken och den stannar i ett av sju fasta lägen (C).




Ställ inga tunga vikter och låt inte barn sitta på benstödet. Det kan skada mekanismen.



Avståndet mellan den lägsta delen av fotplattan och underlaget måste vara minst 40 mm.

5.4 VADSTÖD

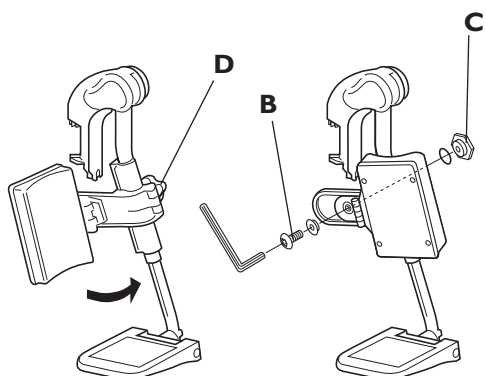


Verktyg: 5 mm insexnyckel

Vadstöden kan monteras i fyra olika djup. Vrid plattorna framåt. Lossa skruven (B) med hjälp av en insexnyckel. Ta bort den stora muttern (C) på motsatt sida och placera den i det andra hålet. Flytta vadplattan till den nya positionen och dra åt skruven.

Vadplattornas höjd kan enkelt justeras med vredet (D).

5.5 FOTPLATTOR MED JUSTERBART DJUP OCH JUSTERBAR VINKEL

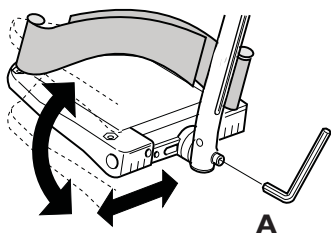


Verktyg: 5 mm insexnyckel

Justera vinkeln och djupet genom att lossa skruven (A) på fotplattans fäste med en 5 mm insexnyckel. Justera fotplattan till rätt position och dra åt skruven.




Se till att det inte finns någonting på fotplattan när skruven är lossad.

5.6 HELA FOTPLATTOR

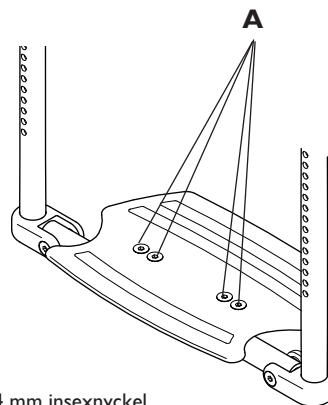


Verktyg: 4 mm insexnyckel
10 mm fast nyckel

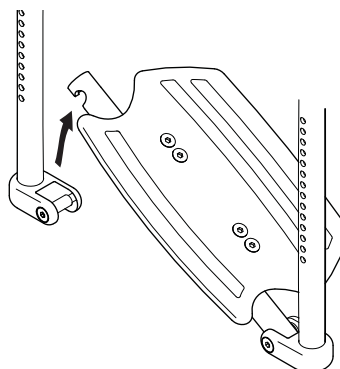


5.6.1 Footrest, one piece (XLT Swing)

1.

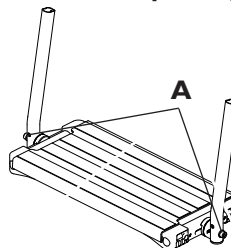

2.

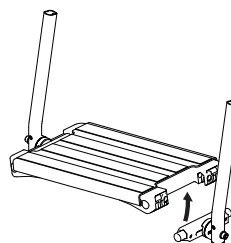

Justera vinkeln och djupet genom att lossa de fyra skruvarna (A) vid fotstödsfästet med en 5 mm insexnyckel. Justera fotstödet till korrekt position och dra åt skruvarna.




Placera ingenting på fotstödet när skruvarna är lossade.

Fotstödet kan fällas upp. Lyft den högra sidan av fotstödet uppåt.




Se upp så att du inte klämmer dina fingrar mellan fotstödet och hållaren när du faller ner det.


5.6.2 Hel fotplatta XLT Max

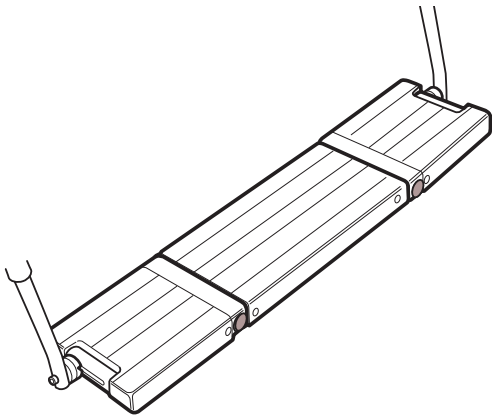

Fotplattan är en stadig konstruktion i tre delar som enkelt tas isär för att underlätta förflyttningar till och från rullstolen.

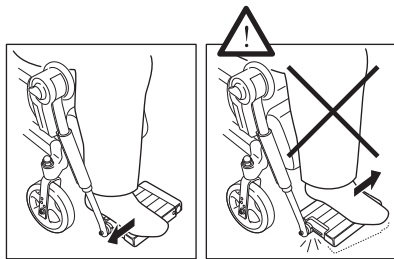


Se till att fötterna är placerade så långt ut som möjligt innan mittendelen påmonteras eller tas av. Annars kan trycket på fotplattorna orsaka skada på konstruktionen.

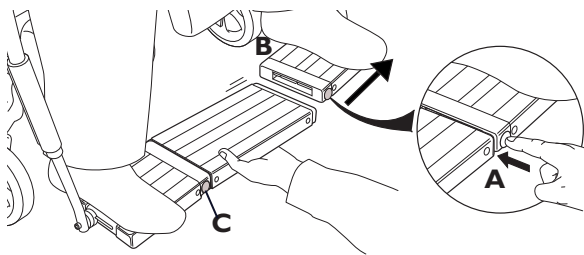


Försiktigt! Klämrisk.
När man justerar fotplattan finns det en risk att klämma fingrarna. Läktag försiktighet och se till att det inte är något tryck på fotplattan medan den justeras.

För att avlägsna mittendelen, tryck på knapp (A). Skjut den högra fotplattan (B) åt sidledes. Tryck in knapp (C) och lossa mittendelen. Se till att fötterna är placerade så långt ut som möjligt på fotplattorna då detta utförs.

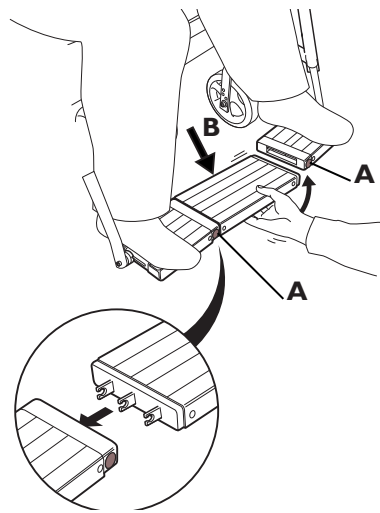

Varning! Skaderisk
Om mittendelen ej monteras korrekt kan den falla ur och brukaren skada sig allvarligt.
Knapparna (A) ska vara i utfällt läge när fotplattans mittendel är korrekt monterad och vänd åt rätt håll.

Fotplattans mittendel påmonteras genom att dess fästen förs in i fotplattorna, en sida i taget. Det finns en markering i form av ett hål som ska vara placerat på baksidan (mot rullstolen) när fotplattans mittendel är korrekt monterad.

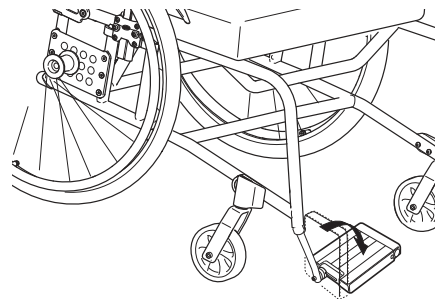


Fotplattorna kan vinklas upp för att ytterligare underlätta förflyttningar,



Försiktigt! Risk för produktskada
Fotplattan är ej konstruerad för att lyfta stolen. Håll inte i fotplattan om du behöver lyfta stolen.


5.7 SITS

5.7.1 Justera sätets djup

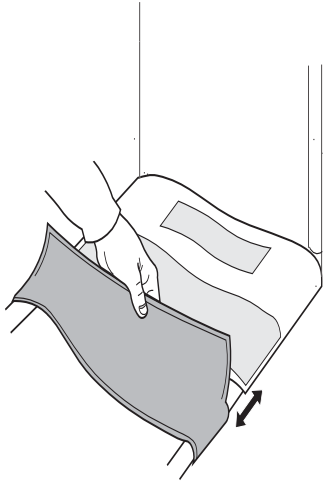

Vik upp framdelen. Dra till önskat djup.


5.7.2 Justera formen (ställbar sits)

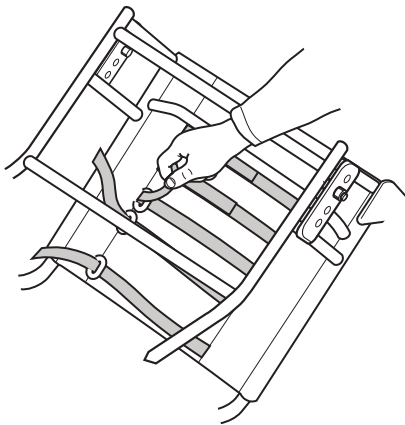


Använd banden för att justera sitsens form. Lägg alltid en dyna på sitsen vid test av den justerade formen.

5.8 RYGGSTÖD


5.8.1 Vinkelinställning

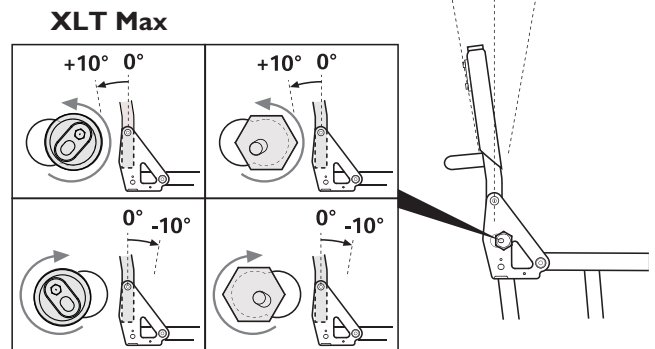


Ryggstödet can monteras i två olika positioner, båda med möjlighet att justera vinkeln. Vinkeln är steglöst justerbar med ± 10 grader.

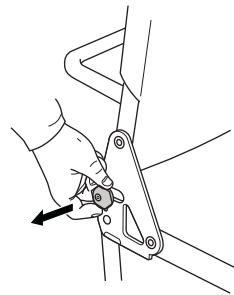

Vill du luta ryggen framåt ska du placera excenterbricken i det bakre läget (som på bilden). Då kan du justera ryggens lutning till max -10° .

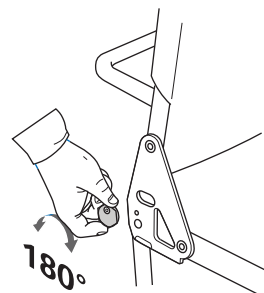

Vill du luta ryggen bakåt ska du placera bricken i det främre läget. Då kan du justera ryggens lutning till max $+10^\circ$.

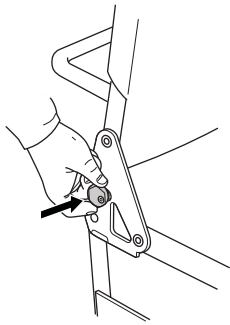


Flytta excenterbrickan genom att lossa skruven som sitter i brickan. Håll fast den inre muttern med hjälp av en 10 mm fast nyckel. Tag därefter bort brickan, vinkla ryggen, flytta fram/bak brickan och montera den i nästa läge. Håll emot med muttern på insidan och spänn fast skruven i brickan igen.

5.8.2 A Finjustering av ryggvinkeln

När du har bestämt dig, för vinkel vinkel du vill ha på ditt ryggstöd, är det dags att göra finjusteringen. Dvs att ställa in vinkeln så att den passar just dig.


Gör på följande sätt:

Verktyg:
4 mm insexnyckel
10 mm fast nyckel

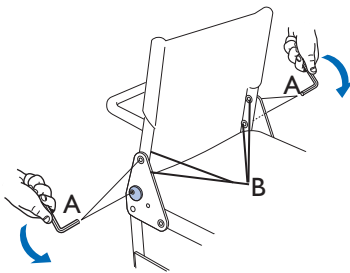


Lossa muttrarna (B) på insidan av ryggstödet, genom att skruva 1-2 varv med en 10 mm fast nyckel. Håll emot med skruvarna (A) och en 4 mm insexnyckel.

Verktyg:
24 mm fast nyckel

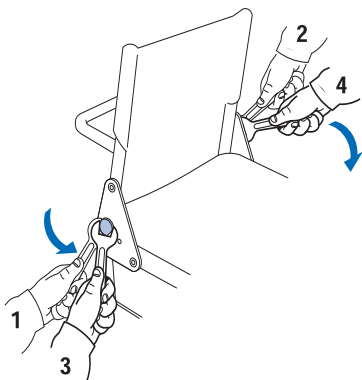

Använd därefter den fasta nyckeln nr. 24 och vrid växelvis på brickorna. Genom att arbeta på detta sätt – med växelverkan – kan du justera lutningen på stolens rygg.

Observera att du måste alternera mellan de två brickorna när du vrider på dem. Annars vrider sig ryggen och blir sned och de ergonomiska egenskaperna försvinner.

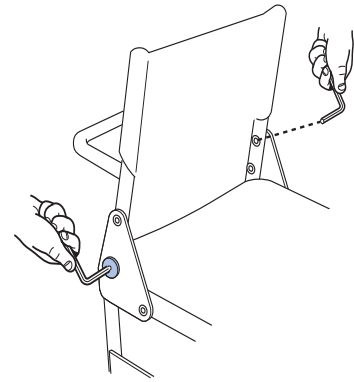


Verktyg:
5 mm insexnyckel

XLT Max

Använd en 5 mm insexnyckel och vrid växelvis på brickorna. Genom att arbeta på detta sätt – med växelverkan – kan du justera lutningen på stolens rygg.

Observera att du måste alternera mellan de två brickorna när du vrider på dem. Annars vrider sig ryggen och blir sned och de ergonomiska egenskaperna försvinner.


Verktyg:
4 mm insexnyckel
10 mm fast nyckel

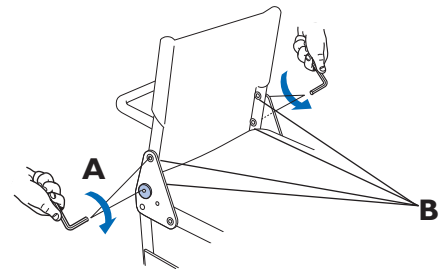

När du har funnit rätt läge drar du åt muttrarna igen. Håll emot med skruvarna (A) och en 4 mm insexnyckel..



Tipprisken ökar ju mer ryggstödet lutar bakåt.
Vi rekommenderar tippsskydd.

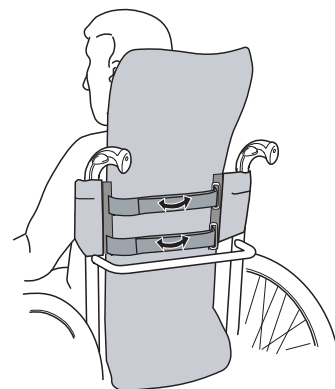


Justera ryggstödet genom att anpassa remmarna. Brukaren bör sitta i stolen under justeringen med remmarna. När justeringen är klar viks klädseln på plats igen och fästs med remmarna.




När ryggstödet lossas ökar risken för att rullstolen välter. Vi rekommenderar användning av tippsskydd

5.8.3 Höjdjustering

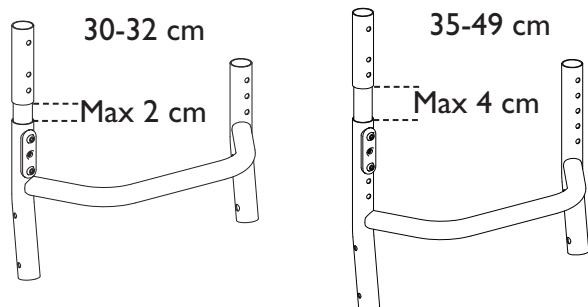

Ryggstödsförlängare kan användas för att få en höjdjusterbar rygg och för att få rygghöjder över 35 cm. Två olika förlängare finns; en för höjder 30-32 cm och en för höjder 35-49 cm.

! Viktigt.
Obeservera att förlängarna inte får höjas mer än 2 eller 4 cm

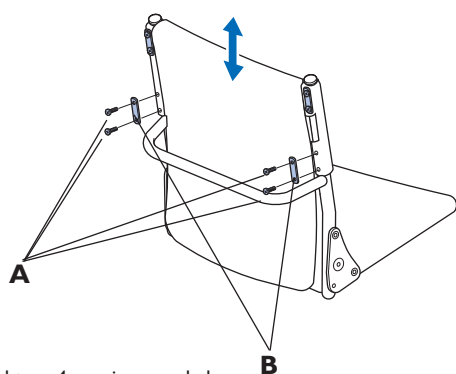


Verktyg: 4 mm insexnyckel

Lossa och ta bort skruvarna (A) och det lilla plastbeslaget (B) på baksidan av ryggstödet rör med en insexnyckel. Nu kan du höja och sänka ryggen. Sätt dit skruvar igen och dra åt, och muttrar och dra åt.

5.9 ARMSTÖD/STÄNKSKYDD

5.9.1 Flip-up armstöd

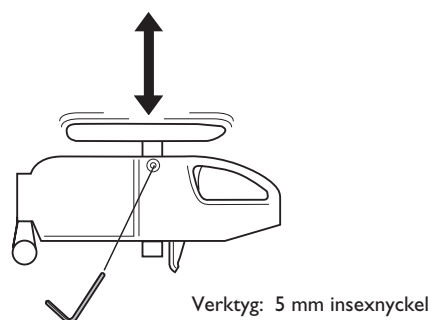


Verktyg: 5 mm insexnyckel

Om stolen är utrustad med armstöd som kan höjas eller sänkas: Lossa skruven (A), flytta armstödet till önskad position och dra åt skruven igen.

! Vid höjdjusteringen är det viktigt att du inte placerar fingrarna mellan armstödet och sidoplattan, eftersom de då kan klämma

5.9.2 Avtagbart armstöd

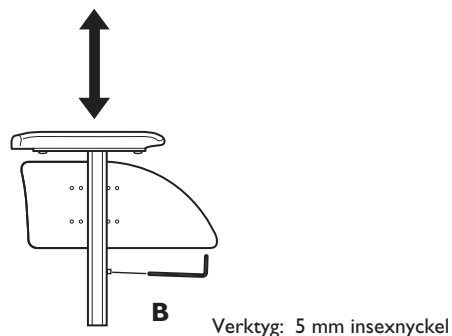


Verktyg: 5 mm insexnyckel


Om stolen är utrustad med armstöd som kan höjas eller sänkas: Dra upp armstödet och lossa skruven (B) under armstödet. Flytta upp eller ner skruven till önskad position och dra åt skruven igen. Sänk ner armstödet igen.

! Vid höjdjusteringen är det viktigt att du inte placerar fingrarna mellan sätets rör och sidoplattan, eftersom de då kan klämmas.

5.9.3 Stänkskydd

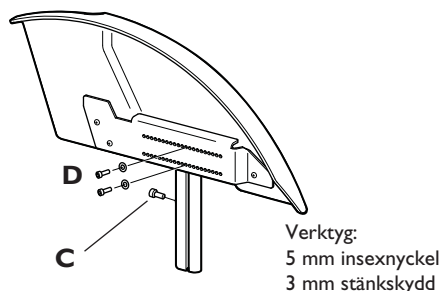


Justera stänkskyddets höjd genom att dra upp stänkskyddet och lossa skruven (C). Flytta upp eller ner skruven till önskad position och dra åt skruven igen. Sätt tillbaka stänkskyddet i fästet igen.

 Vid höjjusteringen är det viktigt att du inte placerar fingrarna mellan sätets rör och sidoplattan, eftersom de då kan klämmas.


För att justera stänkskyddets djup lossar du skruvarna (D) med en insexnyckel. Flytta stänkskyddet till önskad position och dra åt skruvarna igen.


5.9.4 Justering av glapp

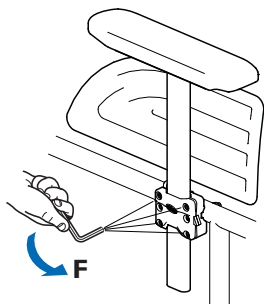

Verktyg: 5 mm insexnyckel


Armstöden och stänkskydden är utrustade med justerbara fästen som gör det möjligt att minska glappet när du drar upp eller trycker ner rören. Justera glappet genom att dra åt eller lossa skruvarna (F) i de fyra hörnen.

 Rör inte de två mittersta skruvar. Dessa håller fast fästena på ramen.


 Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan armstöd/stänkskydd och däck.

5.10 BROMSAR


5.10.1 Justering

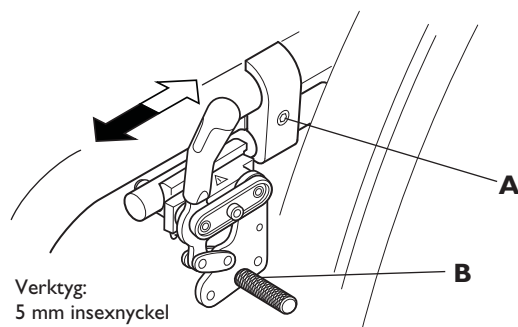

Kontrollera att däcken har korrekt lufttryck (se däcksidan). Använd sedan en insexnyckel för att lossa skruven (A) och skjut bromsen och bromsfästet till önskat läge. Dra sedan åt skruven igen. Korrekt avstånd mellan bromsspinnen (B) och däck är ca 15 mm. Bromsspinnen måste alltid vara i en horisontell position.


 Felaktig inställning eller användning av bromsen kan leda till att den inte fungerar så effektivt som den ska.

5.10.2 Standardbroms

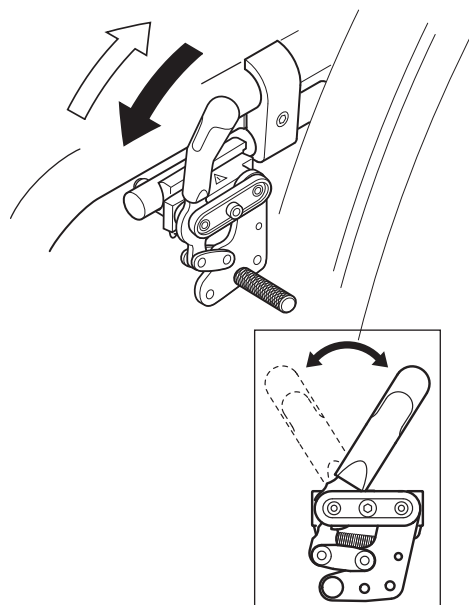

För att bromsa skjuter du fram bromsspaken tills den nåt stoppet.


För att lossa bromsen flyttar du spaken bakåt (mot dig).

 Var försiktig så att inte fingrarna fastnar mellan bromspinne och däck.

Bromsspaken, där handtaget sitter, har ett visst fritt spel. Spaken faller upp automatiskt när benstöden har svängts ut till den yttre positionen utan att bromsen har aktiverats.

Detta är för att förhindra att bromsen oavsiktligt lossar när brukaren förflyttar sig till och från rullstolen..

5. 10. 3 Performance broms

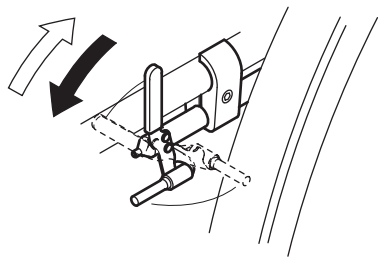


För att bromsa skjuter du fram bromsspaken tills den når stoppet.

För att lossa bromsen flyttar du spaken bakåt (mot dig).



Var försiktig så att inte fingrarna fastnar mellan bromspinne och däck..

5. 10. 4 Aktivbroms

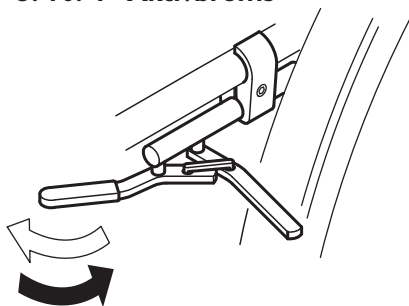

För att bromsa skjuter du fram bromsspaken (bredvid eller mellan dina ben) tills den når stoppet.


För att lossa bromsen flyttar du spaken bakåt (bredvid eller mellan dina ben).



Var försiktig så att inte fingrarna fastnar mellan bromspinne och däck.


5.11 DRIVHJUL, JUSTERING

Genom att ändra placeringen av drivhjulet på dess fäste kan du justera både sätets höjd och rullstolens manövrerbarhet/stabilitet. Ju längre fram drivhjulet sitter, desto enklare är det att manövrera stolen. Stabiliteten minskar emellertid ju längre fram drivhjulet sitter. För sitthöjder och positionering se tabellerna.

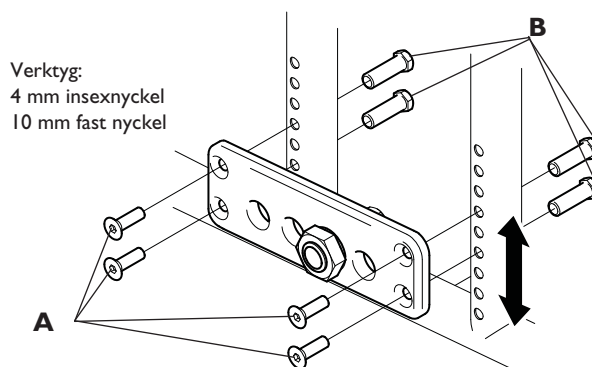

Verktyg:
4 mm insexnyckel
10 mm fast nyckel

För att justera höjden på bakhjulsplattan använder du en insexnyckel för att hålla skruvarna (A) på plats och lossar muttrarna (B) med en fast nyckel. Välj en ny position och skruva fast muttrarna igen.

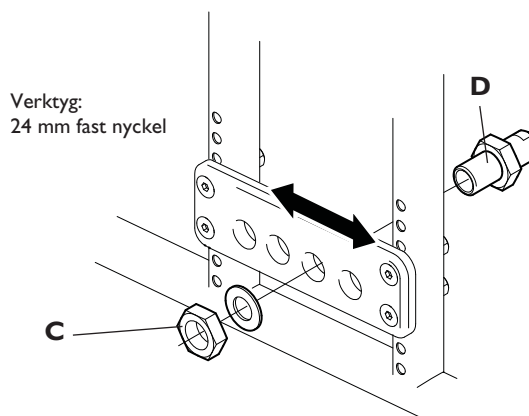

Verktyg:
24 mm fast nyckel

För att flytta drivhjulet (antingen bakåt eller framåt) på drivhjulinfästningen, avlägsna muttrarna (C), justera länkhjulshuset (D) till den önskade positionen och fäst muttrarna igen.



Tipprisken ökar om drivhjulet sitter framför ryggstödet. Använd tippskyddet.




Kom ihåg att alltid justera bromsarna när du ändrar bakhjulets position.



När du har monterat hjulen är det viktigt att du är noga med att kontrollera att skruvarna och muttrarna sitter fast ordentligt. Mutterstycket ska vara åtdraget med en manuell och kalibrerad momentnyckel som är inställd på 40 Nm. Detta är viktigt för din egen säkerhet!

5.12 DRIVHJULSJUSTERING XLT MAX

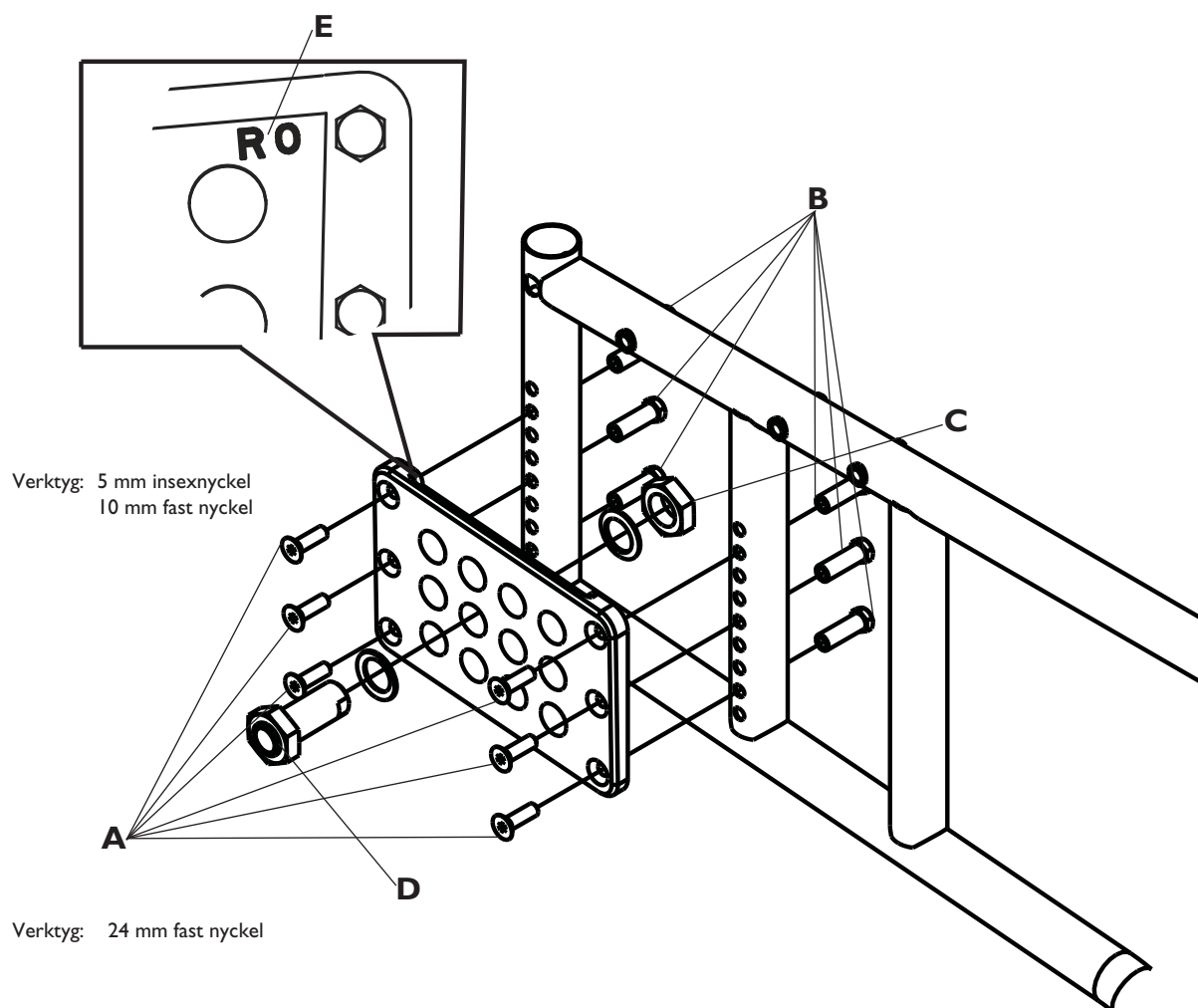

Genom att ändra placeringen av drivhjulet på dess fäste kan du justera både sätets höjd och rullstolens manövrerbarhet/stabilitet. Ju längre fram drivhjulet sitter, desto enklare är det att manövrera stolen. Stabiliteten minskar emellertid ju längre fram drivhjulet sitter. För sitthöjder och positionering se sitthöjdstabellen.

1. För att justera höjden på bakhjulsplattan använder du en insexnyckel för att hålla skruvarna (A) på plats och lossar muttrarna (B) med en fast nyckel. Välj en ny position och skruva fast muttrarna igen.
2. För att flytta drivhjulet (antingen bakåt eller framåt) på drivhjulinfästningen, avlägsna muttrarna (C), justera länkhjulshuset (D) till den önskade positionen och fäst muttrarna igen.
3. Cambern (0° eller 2°) justeras genom att man vänder på drivhjulspattan. Se markeringarna (E) på insidan av drivhjulspattan. R0 står för höger sida, 0° camber. Markeringen med den önskade cambern ska vara placerad i det övre bakersta hörnet av drivhjulspattan.



Tipprisken ökar om drivhjulet sitter framför ryggstödet. Använd tippskyddet.




Kom ihåg att alltid justera bromsarna när du ändrar bakhjulets position.



När du har monterat hjulen är det viktigt att du är noga med att kontrollera att skruvarna och muttrarna sitter fast ordentligt. Mutterstycket ska vara åtdraget med en manuell och kalibrerad momentnyckel som är inställd på 40 Nm. Detta är viktigt för din egen säkerhet!


5.13 CAMBER

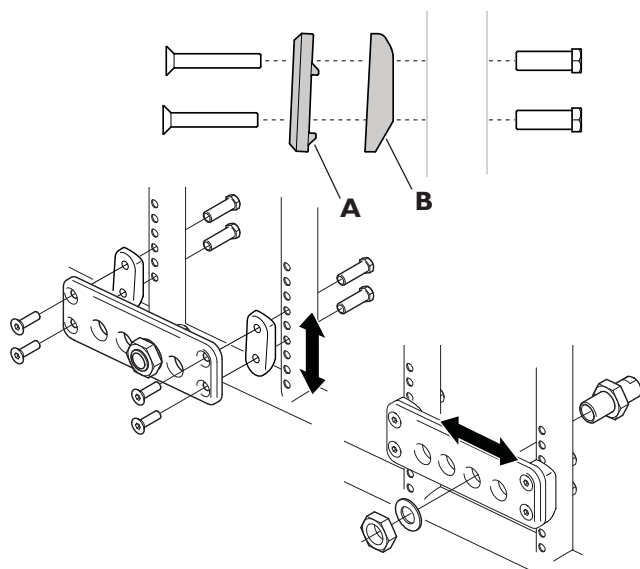

Camberinfästningen på drivhjulet monteras och justeras på samma sätt som standardinfästningen.

- I. Kontrollera att både kanten (A) på drivhjulsinfästningen och avfasningen (B) pekar neråt.


5.14 LÄNKHJUL

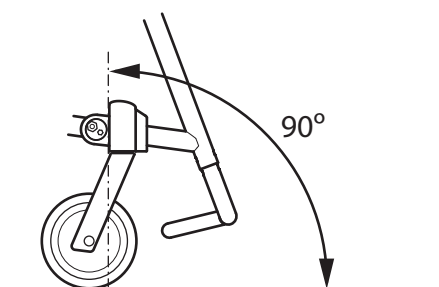

Justera länkhjulen. Rullstolens körförmåga är till stor del avhängig länkhjulen och deras förhållande till underlaget.

Vinkeln mellan länkhjulsupphängningen och underlaget ska vara 90 grader.

5.14.1 Justera vinkeln

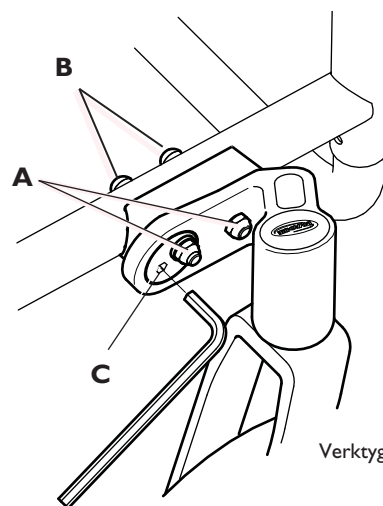

Verktyg: 4 mm insexnyckel
5 mm insexnyckel
10 mm fast nyckel

För att justera länkhjulens vinkel, lossa muttrarna (A) genom att vrida 1–2 varv med en fast nyckel. Håll samtidigt skruvarna (B) på plats med en 4 mm insexnyckel.

Justera hjulhuset till önskad vinkel genom att placera 5 mm insexnyckeln i sexkanthålet (C) och vrid fästet till rätt vinkel. Dra sedan åt muttrarna igen.




Kontrollera att hjulen sitter fast ordentligt efter justeringen.

5.15 TILLBEHÖR

5.15.1 Tippskydd

Tippskyddet är fällbart och kan justeras i både höjd- och djupled. Vänligen iakttag noggrant hur tippskyddet är placerat när det används. Ett klistermärke varnar när tippskyddet inte är aktiverat.


När det förlängda drivhjulsfästet används rekommenderas ett förlängt tippskydd, se nästa sida.

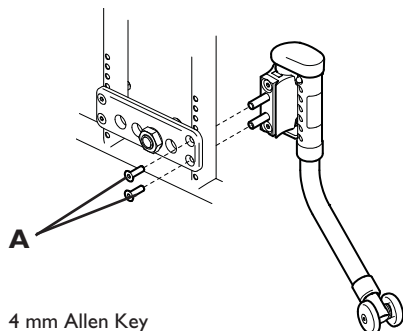

Tools: 4 mm Allen Key


Montering

Avlägsna de bakre skruvarna och muttrarna på drivhjulsfästningen. För in tippskyddet i hålen på chassits baksida. Passa in tippskyddet på skruvarna (A) och fäst.

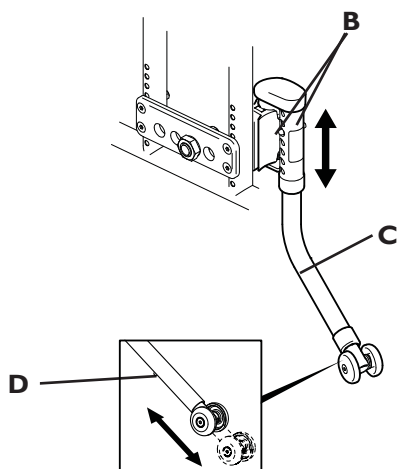


Justera höjden


För att justera höjden trycker du på de två knapparna (B) på vardera sidan om huset och drar röret (C) till önskad placering (hål). Knopparna låser fast röret på rätt plats.

 Använd inte knapparna (B) för att fälla ihop tippskyddet.

Justera djupet

Djupet justeras genom att man trycker på knoppen (D) och drar ut röret till önskat djup. Knoppen låser fast röret på rätt plats.

 Avståndet mellan tippskyddet och marken och avståndet mellan tippskyddet och drivhjulet bör vara fem centimeter.

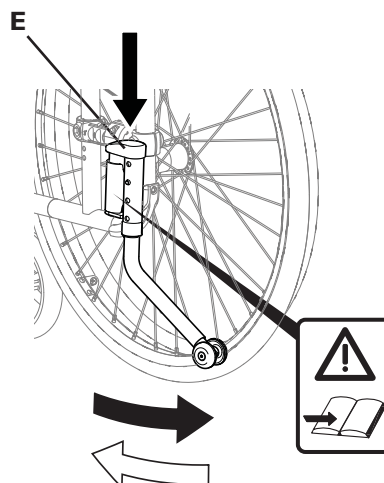


Svängmekanism


För att svänga in tippskyddet under rullstolen trycker du ner "navet" (E) och för det åt sidan.


Obs! Ett rött klistermärke varnar för tipp-risk.


För att aktivera tippskyddet vrider du det på plats igen. Det låses automatiskt fast i rätt position.


Obs! När tippskyddet är korrekt aktiverat är det röda klistermärket gömt.


 Använd foten när du faller upp tippskydden. Om du använder händerna finns det risk för att du klämmer dig mellan skyddet och röret.

 Glöm inte att fälla ut tippskydden. Rullstolen kan välta!

 Kontrollera att tippskydden är ordentligt låsta före användning.

 Använd förlängt tipp-skydd när det förlängda drivhjulsfästet används

 Använd alltid två tipp-skydd!

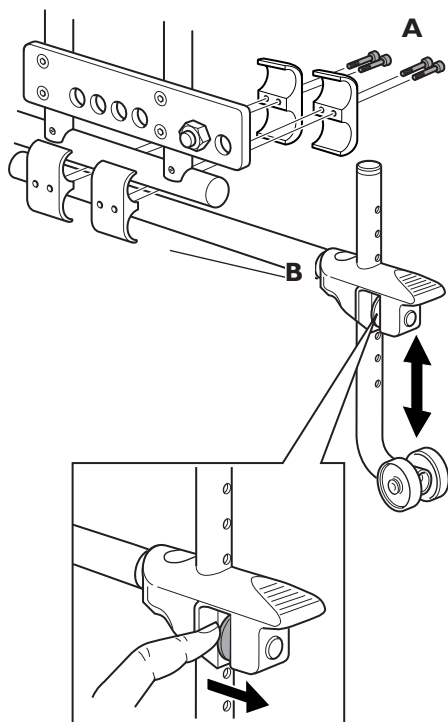

Verktyg: 5 mm insexnyckel

Tippskydd, förlängt

Tippskyddet fungerar även som trampör. Det är höj- och sänkbart och är lätt att justera.

Det förlängda tippskyddet används i första hand när ett förlängt drivhjulsfäste används. Det kan också användas till standarddrivhjulsfästet.

1. Fäst tippskyddets förlängningsrör på ramen med hållarna och skruvarna (A).
2. Dra den fjäderbelastade plastbrickan bakåt och skjut tippskyddsroret till önskad position. Försäkra dig om att tippskyddet sitter fast i det nya läget.



Drivhjulsfästet kan inte monteras i lägsta läget (B) när det förlängda tippskyddet används.



Glöm inte att fälla ut tippskydden. Rullstolen kan välta!




Avståndet mellan tippskyddet och marken och avståndet mellan tippskyddet och drivhjulet bör vara fem centimeter.




Avänd alltid två tippskydd!

5.15.2 Bålstöd

Bålstödet kan svängas åt sidan eller helt lyftas av. Höjd, djup och sidopositioner är lätta att justera.

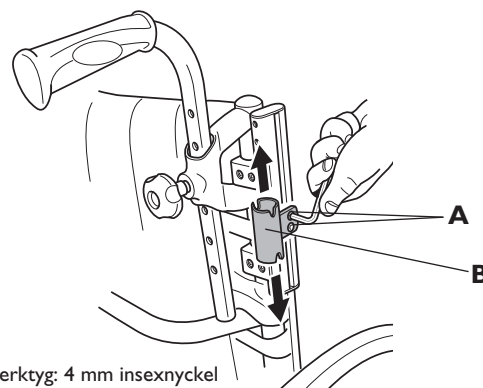


Verktyg: 4 mm insexnyckel

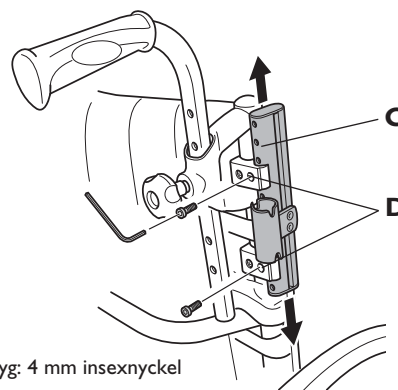

Verktyg: 4 mm insexnyckel


Justering av höjden

- 1a. Justera höjden genom att först lossa skruvarna (A) med en insexnyckel och skjuta hållaren (B) uppåt eller neråt till den önskade positionen. Fäst skruvarna igen.
- b. Hållaren (C) kan också justeras upp eller ner genom att skruvarna (D) på beslaget först avlägsnas med en insexnyckel. Flytta beslaget uppåt eller nedåt till önskad position. Skruva i skruvarna igen.

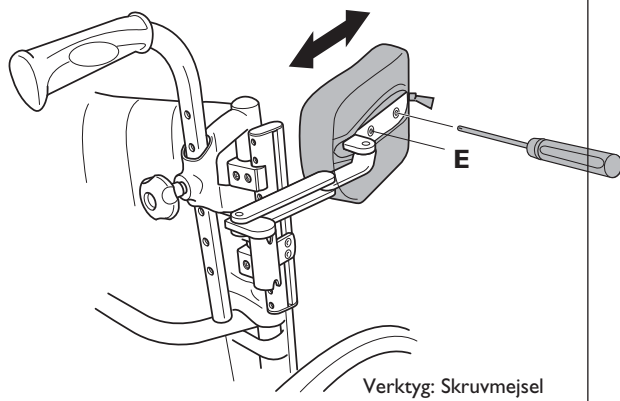

Justering av djupet

Öppna dragkedjan på fodralet för att komma åt skruvarna (E) och lossa. Justera bälstödets till önskad position och skruva åt skruvarna igen.

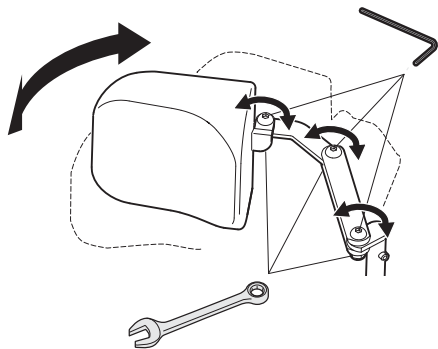


Justering av vinkeln

Tag av fodralet på bälstödets arm för att komma åt skruvarna och muttrarna. Lossa dessa och justera till önskad vinkel. Kom ihåg att skruva åt hårt igen.



Var försiktig så att du inte klämmer tummen mellan bälstödet och hjulet när du kör stolen.

5.15.3 Enarmsdrift

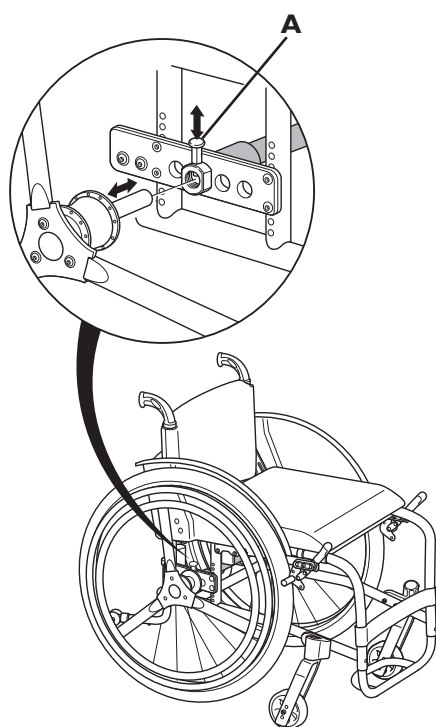

Enarmsdriften gör det möjligt att köra rullstolen med en hand. Två drivringar är monterade på samma hjul. Drivhjulet för enarmsdrift kan monteras på höger eller vänster sida.

I a. Ta av drivhjulet

Avlägsna drivhjulet genom att ta tag i knoppen (A), dra den uppåt och dra hjulet från rullstolen.


I b. Sätta på drivhjulet

När du sätter tillbaka hjulet tar du tag i knoppen (A), drar den uppåt och sätter fast drivhjulet på navet.



Det är mycket viktigt att du kontrollerar att låsspärren faktiskt har låst fast hjulet när du har släppt knappen. Prova om det går att ta loss hjulen. Det ska **INTE** vara möjligt.

Drivringarna kan placeras antingen plant med varandra (intern placering) eller med den innersta, mindre drivringen utstickande (extern placering).

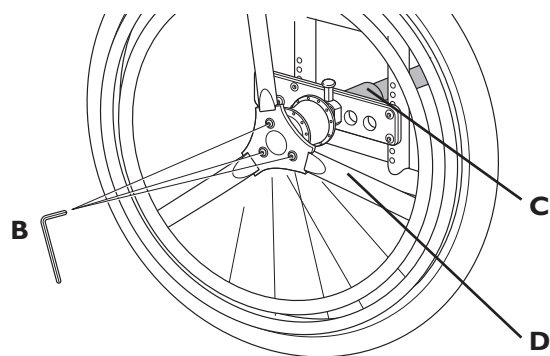

2. Byte av drivringens placering

Lossa de tre skruvarna (B), ta av drivringen och vänd den. Sätt tillbaka drivringen och skruva fast skruvarna igen.




Var försiktig när du tar bort den teleskopiska drivaxeln. Peka den bort från kroppen när du frigör den kraftfulla stålfjädern som finns inuti.

OBS! Drivaxeln (C) är en väsentlig del av rullstolen. Utan denna kommer brukaren inte att kunna köra rullstolen.



Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan drivhjulets ekrar och den yttre drivringens tre stag (D).

5.15. 4 Tipp-skydd för enarmsdrift

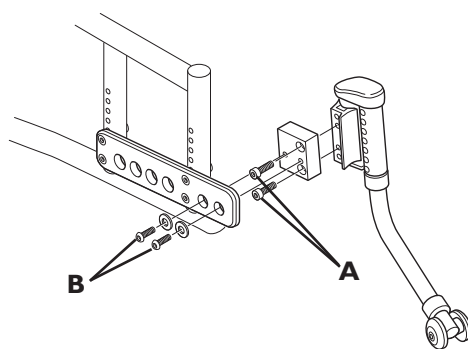


För information om användning och säkerhet, läs sidan om tippskydd i denna manual.

Montering

1. Skruva fast adapterplattan på tippskyddet med skruvarna (A) med hjälp av en 5 mm insexnyckel.
2. Fäst tippskydd och adapterplatta på drivhjulsfästet med skruvarna och brickorna (B) med hjälp av en 4 mm insexnyckel.

5.15. 5 Vårdarbroms

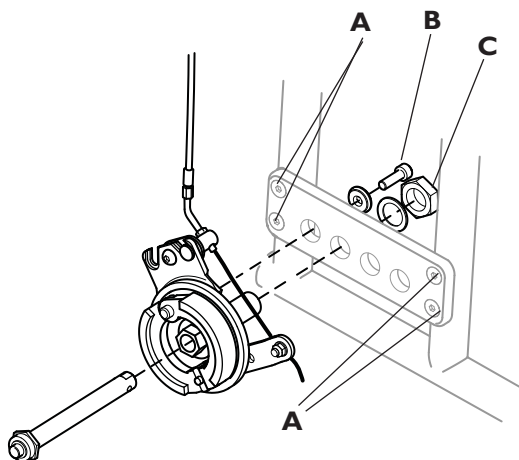


Tools:
4 mm Allen Key
10 mm fixed spanner


Aktiv drivhjulinfästning


Genom att ändra placeringen av drivhjulet på dess fäste kan du justera både sätets höjd och rullstolens manövrerbarhet/stabilitet. Ju längre fram drivhjulet sitter, desto enklare är det att manövrera stolen. Stabiliteten minskar emellertid ju längre fram drivhjulet sitter.


1. För att justera höjden på bakhjulsplattan tar du bort skruvarna (A) med en insexnyckel, väljer en ny position och sätter tillbaka skruvarna igen.


 Kom ihåg att alltid justera bromsarna när du ändrar bakhjulets position.d.

2. För att kunna flytta drivhjulet framåt eller bakåt på fästet tar du först bort skruv (B) och mutter (C), placerar hjulet i önskad position och sätter sedan tillbaka skruven och muttern igen.t.

 Tipprisken ökar om drivhjulet sitter framför ryggstödet. Använd tippskyddet.

 Kom ihåg att alltid justera bromsarna när du ändrar bakhjulets position.

 När du har monterat hjulen är det viktigt att du är noga med att kontrollera att skruvarna och muttrarna sitter fast ordentligt. Detta är viktigt för din egen säkerhet!

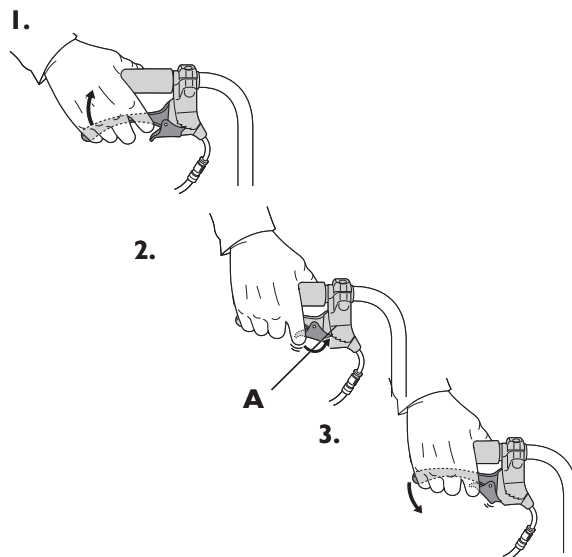

1. Bromsa under färd


Dra båda bromshandtagen uppåt (kläm på handtagen) för att aktivera bromsen.

2. Låsa fast bromsarna


Dra bromshandtaget uppåt och flytta låsspärren (A) uppåt. Släpp sedan handtagen.

3. Släppa bromsarna

Dra handtaget uppåt. Låsspärren släpper automatiskt.

 Felaktig inställning eller användning av bromsen kan leda till att den inte fungerar så effektivt som den ska.

5.15.6 Amputationsbenstöd

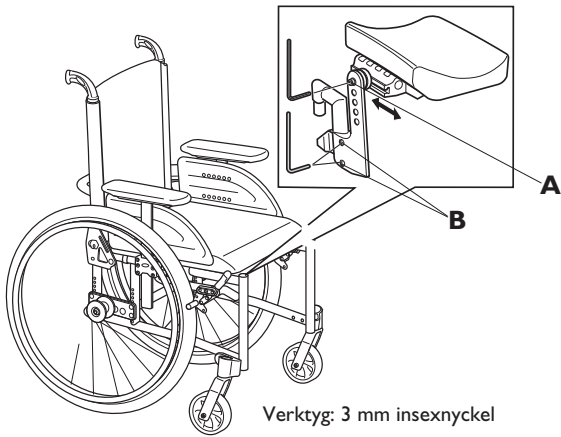


1. Haka på benstöden genom att föra ned tappan (som finns längst upp på benstöden) i rören på rullstolen. Du måste vinkla benstöden utåt när du sätter dit dem. När du sedan vrider in enstöden låses de och det finns inte någon risk för att de kan lossna på rullstolen.
2. Lossa skruven (A) vid dynans infästning för att justera dynans vinkel och dess läge i djupled. Lossa skruvarna (B) för att justera höjden.



Varning Tipprisk

Det föreligger en ökad tipprisk för amputerade brukare. Använd tippskydd och/eller ombalansera rullstolen när amputationsbenstöd används.

5.15.7 Bakomliggande körhandtag

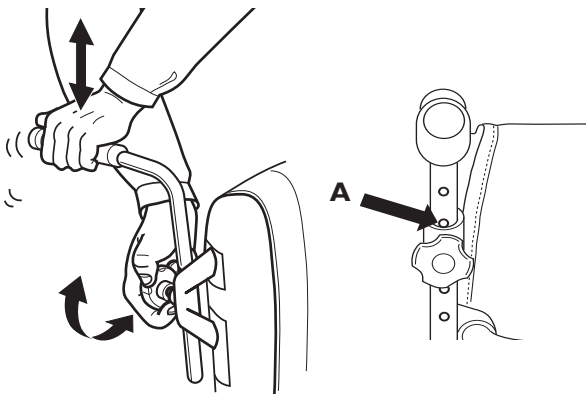




Justera körhandtagens höjd

1. För att justera höjden på körhandtagen vrider du på skruven och justerar handtagen till önskad höjd. Dra åt skruven igen när korrekt position har ställts in.
2. När hålet (A) är synligt precis ovanför fästet är handtagen i en position som kan låsas fast.



Se till att handtagen sitter fast ordentligt före användning.

5.15.8 Fällbara körhandtag

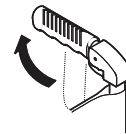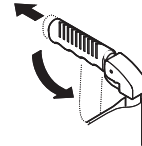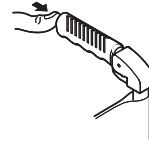

Fälla handtagen

1. Tryck och håll in in knappen, som är gömd under plasten i handtaget, med tummen.
2. Drag handtaget utåt och fäll ner det.


Vika upp handtaget

3. Drag handtaget upåt tills det knäpper på plats.



Försäkra dig om att handtaget har knäppt på plats, så att det inte faller ner när du skjuter på rullstolen.

5.15.9 Huvud- och nackstöd

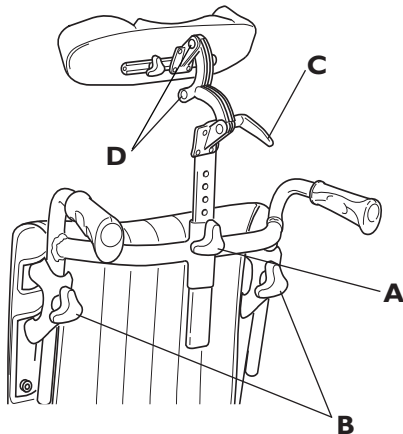

Huvud- och nackstöd för biangulär rygg


Montera huvud- eller nackstödet på ryggstödet bygelhandtag.

Höjjustering

Justera höjden genom att lossa rattarna (A, C) och ställ in önskad höjd.

Vinkeljustering

Justera vinkeln genom att lossa vreden (D). Ställ sedan in önskad vinkel och drag åt vreden igen.

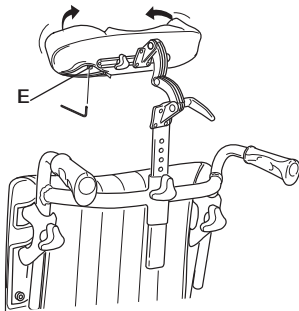


Vinkling av huvudstödet sidor

Vinkla in "vingarna" på huvudstödet genom att öppna dragkedjan på nackstödet undersida och lossa skruv (E). Ställ in önskad vinkel och drag åt igen. Gör sedan likadant på motsatta sidan.




Huvud- och nackstöd kan påverka balansen på rullstolen när det är monterat på ryggstödet. Kontrollera balansen på rullstolen och justera drivhjulen bakåt för ökad stabilitet.

5.15.10 Midjebälte

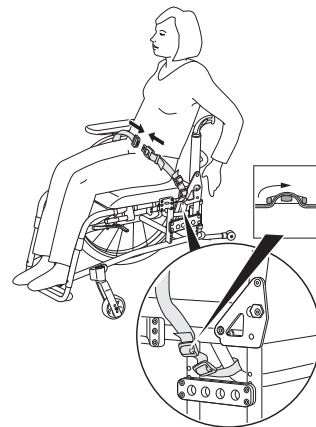

1. Midjebältet används för att ge brukaren en god hållning och för att undvika risken att glida ur stolen.

2. Midjebältet spänns fast runt röret under sitsen (A). Bältet ska träs runt röret på stolen och sedan genom de två plastspännena enligt bild.

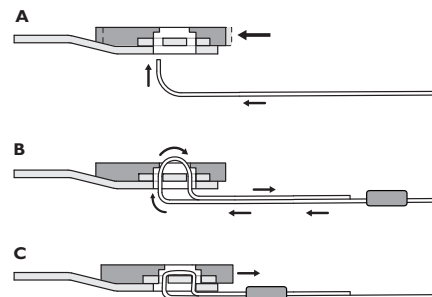


3. Om bältet lossats vid spännets metallunga ska det träs tillbaka enligt bilderna a-c. Kontrollera att bältet ej glider.

6. ATT ANVÄNDA RULLSTOLEN

Vi rekommenderar att du får stolen utprovad av behörig ordinator, som ställer in stolen efter dina önskemål och samtidigt tar hänsyn till din kroppsbyggnad och dina behov. Vi hoppas också att du fått hjälp med hur du bäst använder stolen. Börja med att träna försiktigt tills du lärt känna din rullstols möjligheter och begränsningar.

6.1 ÖVERFLYTTNING TILL/FRÅN RULLSTOL

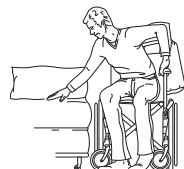


Kör rullstolen så nära den nya sittplatsen som möjligt. Bromsa stolen. Ta bort/fäll upp armstöden och haka av/fäll ut benstöden. Ta inte stöd mot fotplattorna, eftersom stolen då kan tippa framåt.

6.2 STRÄCKA OCH BÖJA SIG



Ställ rullstolen så nära som möjligt. När du sträcker och böjer dig skall ryggen alltid ha kontakt med ryggstödet, annars kan rullstolen tippa. Det är inte rekommendabelt att sträcka sig bakåt över ryggstödet.

6.3 KÖRA UPPFÖR EN SLUTTNING

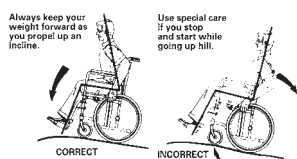

Många erfarna brukare klarar av att ta sig uppför en lutning själva. För att inte förlora greppet om styrningen och för att undvika att du tippas bakåt, bör du alltid luta dig framåt medan du tar dig uppför lutningen. Driv fram rullstolen med korta och snabba tag i drivringarna för att bibehålla hastighet och styrförmåga.


Vid en kraftig lutning behövs i allmänhet hjälp.

Om du måste stanna mitt i en lutning, se då särskilt till att du inte gör någon plötslig eller oväntad rörelse bakåt, när du återupptar rullstolens rörelse framåt. Eftersom rullstolen redan lutar bakåt kan en sådan rörelse resultera i att rullstolen tippas bakåt.



En rullstol som har en klisterlapp med denna symbol är särskilt tippkänslig. Var extra försiktig när du kör uppför en ramp eller sluttning som lutar mer än 9°. Använd alltid tipskydd!


6.4 KÖRA NEDFÖR EN SLUTTNING

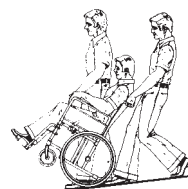

Vi rekommenderar att du använder dig av Assistent/ Assistenten i branta och våta lutningar.

Kontrollera först lutningen och se om det finns särskilda risker; gropar, hala partier etc. Använd aldrig blockbromsen för att sakta ner farten. När man bromsar i en nedförsbacke spärras hjulen och rullstolen kan plötsligt dra iväg åt ett håll, tippa åt sidan eller tvärstanna, så att du kastas ur stolen. Kontrollera alltid hastigheten med hjälp av drivringarna. Tänk på att drivringarna kan bli varma till följd av friktionen och kan orsaka skada i händerna. Försök att köra så rakt ner för lutningen som möjligt. Ändra aldrig riktning under nedförskörning. Kör aldrig upp eller nedför en backe på tvären.

6.5 TROTTOARKANT

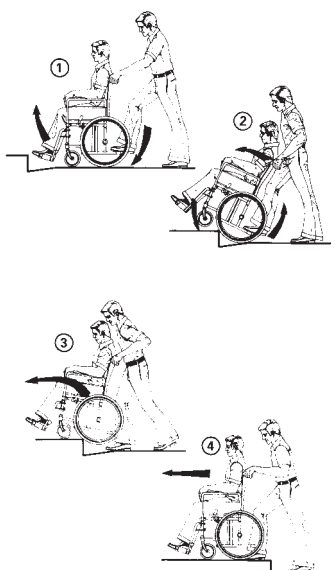

Denna metod bygger på att Assistenten alltid är bakom rullstolen och skapar största säkerhet för brukaren.

Följande råd gäller Assistenten:

Skiss 1) Justera upp tippskydden. Se till att brukarens fötter vilar säkert på fotstöden och inte kan glida av, innan du vinklar rullstolen bakåt och skjuter den framåt mot trottoarkanten.


Skiss 2) Sänk ner rullstolens framedel på trottoaren och ställ dig så nära rullstolen som möjligt, innan du lyfter upp hela rullstolen.

Skiss 3) Luta dig framåt och lyft/rulla rullstolen över trottoarkanten.

Skiss 4) Sänk ner rullstolen på trottoaren så att vikten fördelas på alla fyra hjulen. Se till att rullstolen inte rullar bakåt.

Följ den omvända proceduren (steg 4, 3, 2, och 1) för att komma ner för trottoarkanten.


6.6 TROTTOARKANT - ALTERNATIV METOD

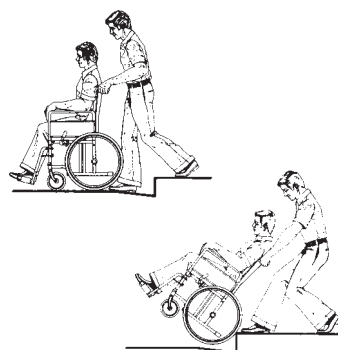

Denna metod används i regel av erfarna Assisterter som är starkare än genomsnittet. Metoden kan även användas när trottoarkanten eller trappsteget är lågt och endast utgör ett minnligt hinder.

Assistenten går baklänges uppför trottoaren och drar rullstolen efter sig. Som Assistent är det viktigt att använda kroppen på rätt sätt för att förhindra skada. Tippa rullstolen bakåt och rulla stolen över trottoarkanten upp på trottoaren. Var extra försiktig om trottoarkanten är våt eller hal.

6.7 RULLTRAPPOR OCH TRAPPOR

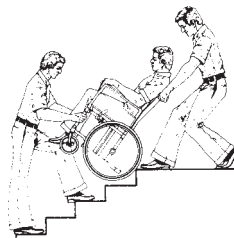

Åk inte rulltrappa med rullstol. Undersök om det finns en hiss i närheten.

Vi råder dig till att i första hand undvika att köra rullstolen i trappor och istället välja annan väg.

Vi rekommenderar att du tar hjälp av två Assisterter för att ta dig upp och ner för en trappa. En Assistent går framför och håller i rullstolens ram och en går bakom och håller i körhandtagen. Justera upp tippskydden. Balansera rullstolen på drivhjulen tills balanspunkten nås. Stolen rullas sedan trappsteg för trappsteg nedför trappan genom att man låter drivhjulen rulla över trappstegskanten. Som Assistent är det viktigt att tänka på att inte hålla i avtagbara arm- eller benstöd. Som Assistent bör man tänka på att lyfta rätt. Använd benen och håll ryggen så rak som möjligt.


7. TRANSPORT

Invacare Reas rullstolar är utvecklade för att ge brukaren bästa möjliga komfort och säkerhet under användning i en mängd olika situationer i det dagliga livet. Detta betyder att kompromisser måste göras för att produkten ska vara användbar. Därför är det under transport i fordon alltid säkrast att åka i fordonets ordinarie säte fastspänd med det ordinarie säkerhetsbältet. Om det av någon anledning är omöjligt att transporteras på annat sätt kan rullstolen användas som säte i ett särskilt anpassat fordon om de följande anvisningarna följs.


Vi vill poängtera att det alltid föreligger en risk då man transporteras sittande i rullstolen. Risken för skada vid en eventuell incident ökar då du har en rullstol med låg ryghöjd. Ju lägre ryggen är, desto större är risken för skada. Därför avråder Invacare från användandet av XLT som säte under transport i fordon om ryggstödet är lägre än 40 cm.

Även om Invacares produkter och dessa anvisningar är menade att öka säkerheten under transport kan ändå person- och egendomsskador uppstå om en olycka skulle inträffa. Invacare lämnar inga som helst garantier för utgången vid en eventuell olycka.

7.1 Transporting av rullstol med brukare i fordon

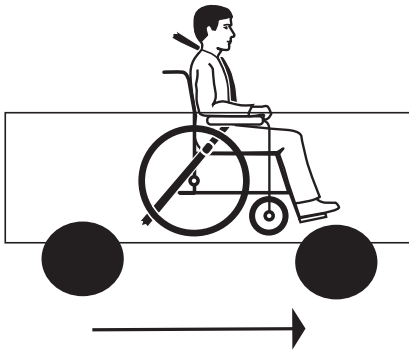


1. Rullstol med brukare ska transporteras framåtvänd i fordonets färdriktning. All extra utrustning såsom bord, bälstöd, abduktionskudde etc ska plockas bort innan färd och förvaras så att de ej kan skada någon vid ett eventuellt tillbud

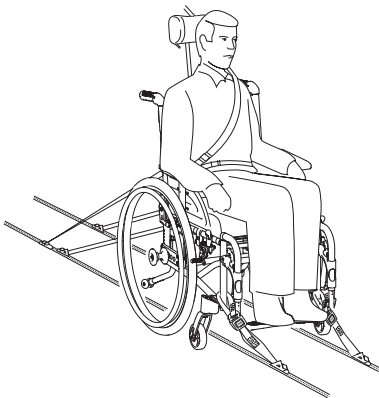


2. Rullstolen ska spännas fast i fordonet med ett fyrpunkts bandsystem. Brukaren ska använda ett trepunkts säkerhetsbälte fastsatt i bilens kaross. Båda ska vara godkända enligt ISO10542-2. Rullstolens sits bör vara horisontellt inställd och ryggen ska vara så vertikal som möjligt.




3. De fästpunkter på rullstolen där spännbanden ska fästas är utmärkta med denna symbol

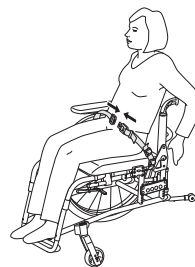

4. För att få användas vid transport i fordon måste rullstolen vara utrustad med midjebälte.

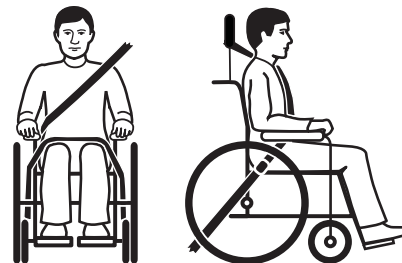


5. Bilens säkerhets bälte ska sitta så tätt som möjligt mot brukarens kropp utan att vara obekvämt. Den övre delen av bältet ska ligga an mot brukarens axel. Ingen del av bältet får vara vridet.

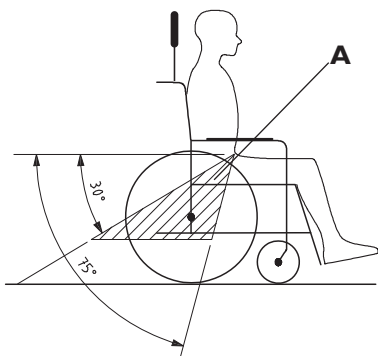

6. Midje-delen av bilens säkerhetsbälte ska sitta lågt ner mot brukarens bäcken så att vinkeln på midjebältet hamnar inom 30° till 75° från det horisontella planet. Ju högre vinkel desto bättre, dock aldrig mer än 75°.






7. Säkerhetsbältet får inte hållas ifrån brukarens kropp av delar på rullstolen, såsom armstöd, hjul etc.

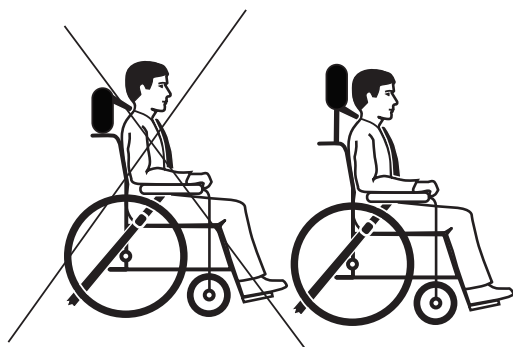

8. Nackstöd ska alltid användas vid transport i bil och detta bör vara inställt enligt bild.

7. 2 FASTSPÄNNING

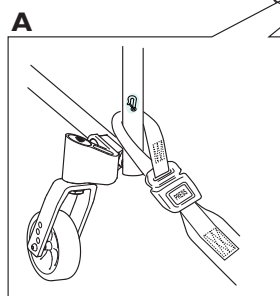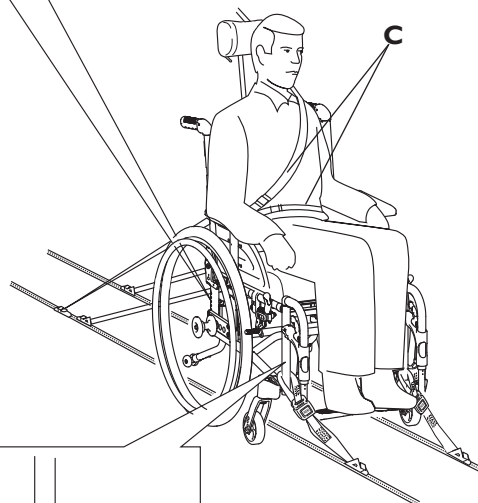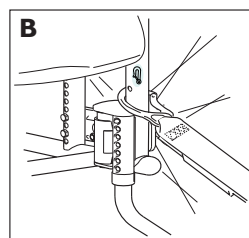

A. Fastspänning fram med spännband

1. Spänn fast de främre spännbanden runt den främre ramen på stolen, precis ovanför det nedre polyamidblocket, se bild A.
2. Lossa rullstolens bromsar och spänn de främre spännbanden genom att dra stolen bakåt.
3. Aktivera bromsarna igen.

B. Fastspänning bak


1. Haka fast karbinhakarna i ramen ovanför hjulin-fästningen, se bild B.
2. Dra åt spännbanden.

C. Midjebälte och trepunktssäkerhetsbälte

1. Kontrollera att midjebältet sitter fast ordentligt i rullstolen, justera längden och spänn fast det runt brukaren.
2. Spänn fast trepunktsbältet runt brukaren.

7. 2 HUR MAN MONTERAR ISÄR XLT INFÖR TRANSPORT SOM BAGAGE

När du ska transportera Invacare® XLT kan du enkelt ta bort vissa delar för att göra stolen mindre och lättare.

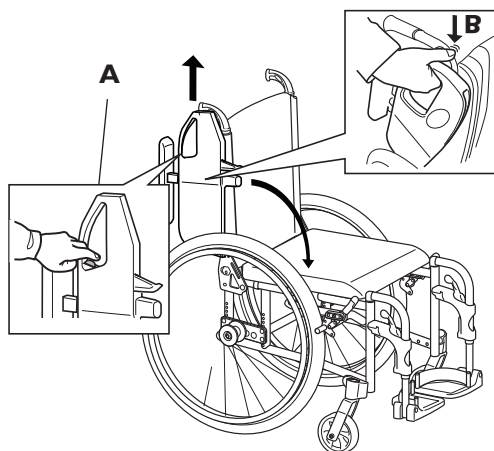


1. Börja med att ta bort armstöden.

Uppfällbara armstöd

Tryck på knappen (A) för att vrida upp armstödet. Lyft rakt upp. Du kan behöva hålla det lite grann framåt och sedan lyfta rakt upp (B).

Avtagbara armstöd

Om rullstolen har avtagbara armstöd, lyfter du dem bara rakt upp.

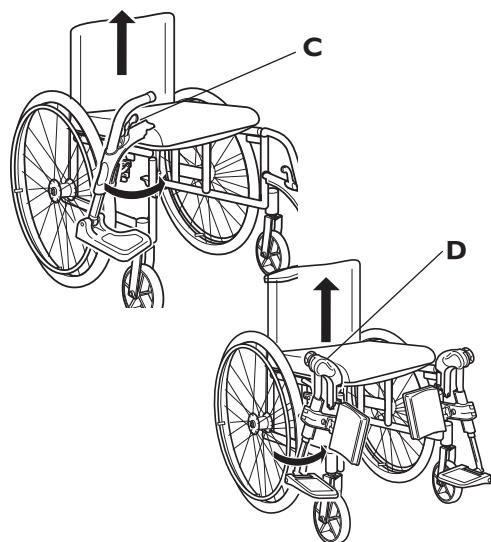


2a. Ta bort de fasta benstöden genom att trycka på spaken (B), medan du vrider fotstöden utåt eller inåt och drar dem rakt upp.

2b. Ta bort de justerbara benstöden genom att trycka på spaken (C), medan du vrider fotstöden utåt och drar dem rakt upp.





Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan ram och benstöd.

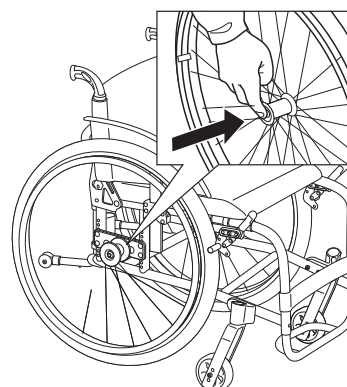

3. Avlägsna drivhjulen genom att trycka på knappen i mitten av navet medan du drar hjulet från rullstolen. Det är samma tillvägagångssätt när du sätter tillbaka hjulet: tryck in knappen och sätt fast.



Det är mycket viktigt att du kontrollerar att låsspärren faktiskt har låst fast hjulet när du har släppt knappen. Prova om det går att ta loss hjulen. Det ska INTE vara möjligt.

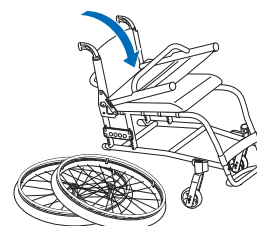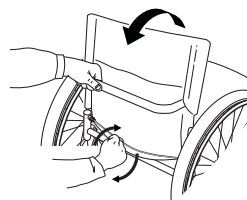

4. Efter att hjulen avlägsnats faller man ryggstödet genom att gripa tag i vajern nedertill på baksidan av ryggstödet och vrider den för att frigöra låsningen till ryggstödet.



Var försiktig då du faller ryggstödet framåt mot sätet då det finns en risk att klämma fingrarna.

Viktigt!

! Försök inte lyfta rullstolen i ryggröret. XLT har ingen låsningsmekanism i fällt läge och ryggen kan

8. UNDERHÅLL

8.1 SÄKERHETSINFORMATION

Regelbundna kontroller och underhåll av rullstolen säkerställer brukarens säkerhet och rullstolens förväntade livslängd.

8.2 UNDERHÅLLS-SCHEMA

Kontrollera	Vecka	Månad	6 månader
Däcktryck	X		
QR axlar	X		
Skruvar och muttrar		X	
Länkhjul		X	
Tippskydd			X
Chassi			X
Klädsel			X
Bromsar		X	

Däcktryck

Rekommenderat däcktryck för drivhjul:

Standard däck	3.5 bar	50 psi
Low profile däck	7.0 bar	90 psi

Rekommenderat däcktryck för länkhjul:

(200 mm) 8"	4.0 bar
-------------	---------

Snabbkoppling för drivhjul

Pull on the rear wheel to check that the removable axle does not come off.

Alla skruvar och muttrar

Skruvar och muttrar kan lossa under användning. Kolla att allt sitter åt ordentligt på länkhjulsgafflar, fotstöd, sidostöd, rygg, handtag etc. Skruva åt det som sitter löst.

Länkhjul

Kontrollera att länkhjulen roterar fritt. Ta bort smuts och hår.

Tippskydd

Kontrollera att tipskydden är lätta att justera och fälla.

Chassi

Kontrollera slitaget på chassit; lösa delar, sprickor eller andra defekter. Ett skadat chassi bör kontrolleras av en specialist.

Klädsel

Kontrollera slitaget på kädslen; lösa delar, revor eller andra defekter.

Bromsar

Kontrollera att trumbromsarna fungerar ordentligt på båda hjulen. Kontrollera positionen på brukarbromsen.

8.3 RENGÖRING

Torka regelbundet metalldelar och klädseln med en fuktig trasa. Eventuellt kan ett mildt rengöringsmedel (såpa) användas. Vid behov kan klädseln tvättas i 40° C. Vanligt tvättmedel kan användas.

För desinficering ska endast rengöringsmedel baserat på alkohol användas.

Tvätt och Desinfektion

1. Tag av alla löstagbara klädselar och tvätta dessa i tvättmaskin, enligt anvisningarna på respektive klädsel.
2. Spreja rullstolen med tvättmedel, t.ex. fordonstvättmedel med vax, och låt verka.
3. Spola av rullstolen med högtrycksstråle eller vanlig vattenstråle beroende på smutsgrad. Spruta ej mot lager och dräneringshål. Tvättas rullstolen i tvättmaskin skall gradantalet ej överstiga 60 grader.
4. För att desinficera stolen spreja den med sprit.
5. Låt stolen torka i torkrum. Plocka bort de delar där vatten lätt samlas t.ex. ändavslutningar, doppskor o.dyl. Om stolen är tvättad i maskin rekommenderar vi att den även blåses av med tryckluft.

9. ÅTERANVÄNDNING

Rullstolen kan delas upp i följande huvudkomponenter:

- Chassi
- Plastdetaljer
- Klädsel
- Hjul, däck och slangar
- Förpackning

Chassi

Chassit är tillverkat i titan och är återvinningsbart.

Plastdetaljer

Rullstolens plastdelar är tillverkade i plast som tillhör gruppen ”termoplast” och är märkt med symboler för återvinning. (Ska återvinnas där det är möjligt på grund av delarnas storlek.) Det huvudsakliga plastmaterialet är polyamid. Detta material kan återvinnas eller förbrännas på godkända anläggningar.

Klädsel

Klädseln är tillverkad i polyester, nylon eller PVC. Det effektivaste sättet att återvinna denna är förbränning på godkänd anläggning.

Hjul, däck och slangar

- Drivringar, fälgar, ekrar och nav är tillverkade i stål, rostfritt stål, aluminium eller titan och kan återvinnas enligt ovan.
- Däck och slangar är tillverkade i gummi och kan återvinnas enligt ovan.

Förpackning

Allt Invacare® Rea AB:s förpackningsmaterial har utvecklats för att passa produkterna optimalt för att undvika onödig användning av material. Alla kartonger är återvinningsbara.

Kontakta din lokala återvinningsmyndighet för korrekt information om hantering av ovan nämnda material.

Ytbehandling

Lackerade ytor är lackerade med polyester. Vissa ståldelar är förzinkade. Ej lackerade aluminiumdetaljer är anodiserade. Synliga trädelar är lackerade.

Manufacturer



Invacare Rea AB
Box 200
SE-343 75
Diö SWEDEN

Sales Companies

Belgium & Luxemburg:

Invacare nv, Autobaan 22, B-8210 Loppem
Tel: (32) (0)50 83 10 10, Fax: (32) (0)50 83 10 11
belgium@invacare.com / www.invacare.be

Denmark:

Invacare A/S, Sdr. Ringvej 37, DK-2605 Brøndby
Tel: (45) (0)36 90 00 00, Fax: (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com / www.invacare.dk

Deutschland:

Invacare GmbH, Alemannenstraße 10, D-88316 Isny
Tel: (49) (0)75 62 7 00 0, Fax: (49) (0)75 62 7 00 66
kontakt@invacare.com / www.invacare.de

Ulrich Alber GmbH, Vor dem Weissen Stein 21, D-72461
Albstadt-Tailfingen
Tel: (49) (0)7432 2006 0, Fax: (49) (0)7432 2006 299
info@ulrich-alber.de

European Distributor Organisation:

Invacare, Kleiststraße 49, D-32457 Porta Westfalica
Tel: (49) (0)57 31 754 540, Fax: (49) (0)57 31 754 541
edo@invacare.com / www.invacare.eu.com

España:

Invacare SA, c/Areny s/n, Poligon Industrial de Celrà, E-17460
Celrà (Girona)
Tel: (34) (0)972 49 32 00, Fax: (34) (0)972 49 32 20
contactsp@invacare.com / www.invacare.es

France:

Invacare Poirier SAS, Route de St Roch, F-37230 Fondettes
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66, Fax: (33) (0)2 47 42 12 24
contactfr@invacare.com / www.invacare.fr

Ireland:

Invacare Ireland Ltd, Unit 5 Seatown Business Campus, Seatown
Road, Swords, County Dublin - Ireland
Tel: (353) 1 810 7084, Fax: (353) 1 810 7085
ireland@invacare.com / www.invacare.ie

Italia:

Invacare Mecc San s.r.l., Via dei Pini 62, I-36016 Thiene (VI)
Tel: (39) 0445 38 00 59, Fax: (39) 0445 38 00 34
italia@invacare.com / www.invacare.it

Nederland:

Invacare BV, Celsiusstraat 46, NL-6716 BZ Ede
Tel: (31) (0)318 695 757, Fax: (31) (0)318 695 758
nederland@invacare.com / www.invacare.nl
csede@invacare.com

Norge:

Invacare AS, Grensesvingen 9, Postboks 6230, Etterstad, N-0603
Oslo
Tel: (47) (0)22 57 95 00, Fax: (47) (0)22 57 95 01
norway@invacare.com / www.invacare.no
island@invacare.com

Österreich:

Invacare Austria GmbH, Herzog Odiolstrasse 101, A-5310
Mondsee
Tel: (43) 6232 5535 0, Fax: (43) 6232 5535 4
info-austria@invacare.com / www.invacare.at

Portugal:

Invacare Lda, Rua Estrada Velha, 949, P-4465-784 Leça do Balio
Tel: (351) (0)225 1059 46/47, Fax: (351) (0)225 1057 39
portugal@invacare.com / www.invacare.pt

Sverige & Suomi:

Invacare AB, Fagerstagatan 9, S-163 91 Spånga
Tel: (46) (0)8 761 70 90, Fax: (46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com / www.invacare.se
finland@invacare.com

Switzerland:

Invacare AG, Benkenstrasse 260, CH-4108 Witterswil
Tel: (41) (0)61 487 70 80, Fax: (41) (0)61 487 70 81
switzerland@invacare.com / www.invacare.ch

United Kingdom:

Invacare Limited, Pencoed Technology Park, Pencoed, Bridgend
CF35 5AQ
Switchboard Tel: (44) (0)1656 776200, Fax: (44) (0)1656 776201
Customer services Tel: (44) (0)1656 776222, Fax: (44) (0)1656
776220
UK@invacare.com / www.invacare.co.uk