



Rekonditioneringsinstruktioner Invacare Elektriska rullstolar

Instruktionerna är ämnade som hjälp för Hjälpmedelscentralens tekniker vid Rekonditionering, underhållsservice leveranskontroll etc. av Invacares elektriska rullstolar

- **Rengöring**

Rengör rullstolen med fuktig trasa, spola inte med vatten. Använd en mjuk borste och milt, miljömärkt rengöringsmedel om så krävs. Använd inte alkohol, skur- eller blekmedel. Efter rengöring låt stolen vid behov torka i ett rum eller på en plats med god ventilation.

- **Säkerhet**

Kontrollera belysning och körriktningssvisare.
Kontrollera att signalhornet fungerar felfritt.

- **Bromsar och bromsprov**

När motorens frikopplingsspak står i drivläge skall det inte vara möjligt att skjuta rullstolen framåt eller bakåt. Kontrollera också att rullstolen inte går att köra när spaken står i friläge.

Prova att skjuta joystick sakta framåt, båda motorens magnetbromsar skall släppa (klicka till) samtidigt. Då joystick släpps skall bromsarna aktiveras igen inom någon sekund. Denna test kan upprepas och då påverka joystick i olika riktningar.

- **Joystick**

Kontrollera med avslagen stol att joysticken inte är krökt eller på annat sätt skadad och att den återgår till neutralläge när den släpps. Det ska inte vara möjligt att slå på rullstolen när joysticken är påverkad.

Kontrollera att gummibälgen runt joystick är hel.

- **Däcktryck**

Kontrollera att hjulen har ett jämt däcktryck. Knappt 2,0 bar är lämpligt, maximalt 2,1 till 2,5bar, beroende på modell.

- **Chassi**

Kontrollera chassi så att inga sprickbildningar uppstått.

- **Mekanik**

Kontrollera och efterdrag om nödvändigt skruvar och muttrar på t.ex. armstöd, benstöd, manöverbox, och tillbehör

Kontrollera att tippskydden är hela och att hjulen rullar utan stor påverkan.

Kontrollera att motorerna inte läcker olja.

Kontrollera att motorer och växellådor inte låter onaturligt mycket.



- **Elektronik**

Kontrollera att kablage och kontakter är oskadade och korrosionsfria.

Kontrollera att batterierna sitter fast ordentligt.

Kontrollmät att batterierna ej har några skadade eller defekta celler.

- **Smörjning**

Smörj om nödvändigt rörliga delar t.ex. sitslyft, tilt och liknande. Använd ett syrafritt och miljömärkt fett.

- **Provkörning**

Kontrollera att rullstolen har en jämn och balanserad gång.

- **Laddning**

Ladda rullstolen innan återlämnade



Underhållsprotokoll Invacare Elektriska rullstolar

Storm3	<input type="checkbox"/>	Storm4	<input type="checkbox"/>	G50	<input type="checkbox"/>
Bora	<input type="checkbox"/>	Dragon	<input type="checkbox"/>	Typhoon II	<input type="checkbox"/>
Mirage	<input type="checkbox"/>	Zephyr	<input type="checkbox"/>		
TDX	<input type="checkbox"/>				
Tornado	<input type="checkbox"/>	Typhoon	<input type="checkbox"/>	Annan	

Serienummer.....

Löpnummer.....

Underhållspunkt	OK	Åtgärd		Anmärkning
		Justering	Byte	
Rengöring				
Säkerhet				
Belysning				
Signalhorn				
Bromsprov inkopplad				
Bromsprov frikopplad				
Magnetbromsar släpper				
Magnetbromsar aktiveras				
Med joystick i olika riktningar				
Joystick				
Gummibälg				
Däckstryck				
Chassi				
Kontrollera att inga sprickor finns				
Mekanik				
Skrivar och muttrar				
Tippskydd				
Oljeläckage				
Missljud				
Elektronik				
Kablage				
Kontakter/Kabelskor				
Batterier fastsatta				
Batteri status				
Smörjning				
Provkörning				
Laddning				
Övrigt				

Datum.....

Signatur.....