


2006-05-22

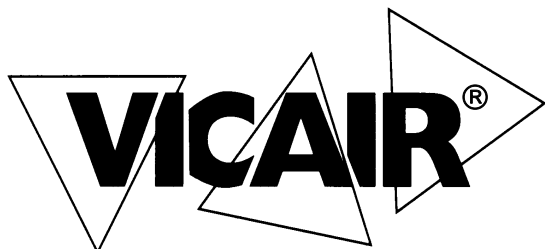

Bruksanvisning Vicair Academy Multi Functional Rygg



Återförsäljare:

Invacare AB

Box 66, Fagerstagatan 9 - 163 91 Spånga

Tel:08-761 7090 Fax: 08-761 8108

e-mail: sweden@invacare.com, www.invacare.se

Introduktion

Vicair® Academy Multi Functional Rygg är designad för att användas som beskrivet i denna bruksanvisning. Var vänlig läs hela bruksanvisningen innan dynan tas i bruk.

Ryggsystemet består av följande delar:

Innerdynan

Innerdynan är tillverkad i flera olika blixtlåsförsedda kamrar. Varje kammare är fylld med ett specifikt antal tetraformade luftfyllda SmartCells. Dessa flexibla luftceller har en låg friktion och glider därför lätt mot varandra och formar sig lätt efter kroppsformen. Velcro kardborrband sitter baktill på ytteröverdraget så att den kan fästas på rullstolens ryggskalet.

Ytteröverdrag

Ytteröverdraget är tillverkat i Comfair – ett luftgenomsläppligt tyg som kan sträckas i två riktningar. Ytteröverdraget har blixtlås mot innerdynan.

Montering

Vicair® rekommenderar att behörig personal monterar, installerar och justerar Academy dynan.

Kontrollera dynans storlek

Låt gärna din arbetsterapeut eller hjälpmedelskonsulent hjälpa dig att välja rätt storlek på dynan så att den passar din kroppsform och rullstol. Dynan skall passa bredden på sitsen och dimensionen på ryggskalet på rullstolen.

Montering av dynan i ryggskalet

- Avlägsna plastemballaget från dynan.
- Placera dynan i ryggskalet och markera Velcrobandens positionen.
- Montera de självhäftande Velcrobanden i den positionen på ryggskalet (fig.A).
- Monter dynan på Velcrobanden på ryggskalet. Se till att ryggetiketten är nedåt. (fig.B)

Installation

- Sitt i rullstolen i några minuter så att ryggdynan anpassas efter din kroppsform.
- Justera ryggsystemet till önskad position med hjälp av behörig personal.

Kontroll av sitta igenom

Svanskotan och bäckenet skall inte nå botten på dynan eller sidorna på ryggskalet. Kontroll av att "sitta igenom" skall ske vid första användningen och efter att luftjustering i dynan har anpassats.

- Sitt med ryggen mot dynan i ca 20 minuter.
- Luta dig lätt framåt i rullstolen.
- Låt en behörig personal sätta en hand mellan dynan och din rygg.
- Se till att ryggen har fullt stöd av åtminstone ett fullt lager av SmartCells.
- Använd inte dynan om man sitter igenom. I de flesta fall kan detta problem lösas genom att justera fyllnadsgraden i kamrarna.

Justering av fyllnadsgraden

Fastheten på ryggdynan kan justeras genom att ta bort eller lägga till luftceller i de olika kamrarna på innerdynan.

Stabilitet

Rullstolens stabilitet kan påverkas vid användning av Academy Multi Functional Rygg. Kontrollera och testa balansen och stabiliteten på rullstolen tillsammans med behörig personal.

Användning

Regelbunden kontroll av rodnad på huden

Kontrollera brukarens hud regelbundet mot rodnad speciellt under de första dagarna. Om rodnad uppstår och inte försvinner efter 15 minuter, fortsätt inte att använda dynan. Kontakta behörig personal.

Användning vid t ex flygresa och vid större höjder

I och med att varje cell i dynan är fylld med luft kan den fungera olika när den används vid större höjder eftersom lufttrycket förändras. Under sådana omständigheter kan dynans fasthet justeras genom att ta bort några luftceller från varje kammare. Vicair® rekommenderar att inte använda dynan över 2400m (8000ft) ASL (över havet).

Användning i fordon

Säkerhetstest av Vicair® dynor är för närvarande ej gjorda när det gäller användning i fordon. Därför uppmuntrar vi inte att använda dynan i fordon. Som ett alternativ kan Academy Allrounder, (som man fäster på brukarens kropp) användas om det behövs ytterligare stöd vid transport.

Överföring av dynan till annan brukare

Innan en annan brukare använder dynan rengör innerdynan och tvätta ytteröverdraget. Desinficera båda delarna. Se till att dynans luftjustering är korrekt och passar den nya brukaren.

Byta ut ytteröverdraget

Vid normal användning rekommenderar Vicair® att byta ut ytteröverdraget varje år. Ytteröverdrag kan köpas separat.

Antändlighet

Använd inte dynan nära en öppen brasa eller andra objekt med hög temperatur.

Underhåll och rengöring

OBS! Dynorna kan inte ångtvättas eller autoklaveras då de inte tål den starka hettan och trycket.

Kontroll av skadade luftceller

Kontrollera dynan var tredje månad efter skadade luftceller. Om en större skada skett och många luftceller har skadats, fortsätt inte att använda dynan. Kontakta behörig personal.

Rengöring av innerdynan

- Tvätta innerdynan med en fuktig trasa och en mild tvållösning. Svåra fläckar eller missfärgningar rengörs genom att första blöta fläcken och använd sen en mjuk borste för ta bort smutsen.
- Om det är nödvändigt att ta bort luftceller för rengöring, notera antal luftceller i varje kammare.
- Använd inte aggressiva rengöringsmedel med slipmedel i eller vassa objekt för att göra ren innerdynan.
- Lägg inte innerdynan i vatten eller annan vätska.
- Tvätta inte den fyllda innerdynan eller luftcellerna i tvättmaskin.

Rengöring av ytteröverdraget

Ytteröverdraget kan maskintvättas med avigsidan utåt och sen torktumlas. Läs instruktionen på etiketten som finns på insidan av överdraget.

Desinficering av dynan

Om dynan har utsatts för kroppsvätska eller om dynan skall överföras till annan brukare, skall den först rengöras och desinficeras för att undvika smitta.

- Gör ren innerdynan och ytteröverdraget som beskrivet ovan. Vid tvätt av ytteröverdraget använd ett antibakteriellt tvättmedel.
- Spraya desinfektionsmedel på både ytteröverdraget och innerdynan. Se till att medlet når ner i mellanrummet mellan kamrarna genom att böja kamrarna utåt.

Vicair garanti

Vicair ger en garanti på defekter i tillverkningen eller i materialet över en period på två (2) år efter försäljningsdatum, förutsatt att normal användning har skett. Varje skada som uppstår på grund av onormalt bruk som t ex ovarsam behandling, rengöring, vårdslöshet ingår ej i garantin.

Skulle en defekt i materialet eller tillverkningen uppstå inom de två (2) åren, från Invacares försäljningsdatum, vill Vicair på eget initiativ, reparera eller ersätta detta utan extra kostnader. Det yttre överdraget är exklusivt från denna garanti, men ersättningsöverdrag kan köpas separat.

Garantin täcker inte skador på grund av handhavandefel och övergår inte kostnaden för vad varan är såld.

Tillverkare:
Vicair BV
Koetsjerstraat 14, 1531 NX Nederlands
Tel. +31 (0)75 642 9992