

• Demontering

1. Bromsa sängens hjul.
2. Ställ sängen i lämpligt höjdläge.
3. Demontera alla tillbehör.
4. Kör sängen till markerad höjd, så att markeringarna på sänglyften och markeringen på saxen är placerade mot varandra.
5. Ta ut stickproppen ur vägguttag.
6. Ta bort spärranordningen från elektroniken.
7. Ta ur kontakter från rygg-, lår- och benmotor och kontrollera att ledningarna går fria från sänglyften.
8. Lyft upp sätesdelen.
9. Dra ut sängbottens huvudände till stopp och tippa/sänk dess gavelände mot golvet.
10. Lossa de två snäpplåsen på sängbottens bendel genom att dra ut spärren och vrida den åt höger.
11. Tippa upp sängbottens bendel, lyft av och placera den på golvet. Lyft av sängbottens huvudände och placera den på golvet.
12. Anslut stickkontakten till vägguttaget och sänk sänglyftens sax.



SB755™ sänglyft kan demonteras på detta sätt:

1. Demontera elektronik inklusive manöverdosa från snabb-fästet.
2. Spärranordningen i sänglyftens huvudände frigörs.
3. Lyft i handtaget och ta bort saxenheten från sänglyftsramen.
4. Montering sker i omvänd ordning.

Ident. no.: I525012
Version: 01 04.2009




Scanbed 755™

Yes, you can.®

- Användning av integrerad sängbottenförlängning
- Montering
- Placering av sängens delar i transportläge
- Demontering

- Användning av integrerad sängbottenförlängning

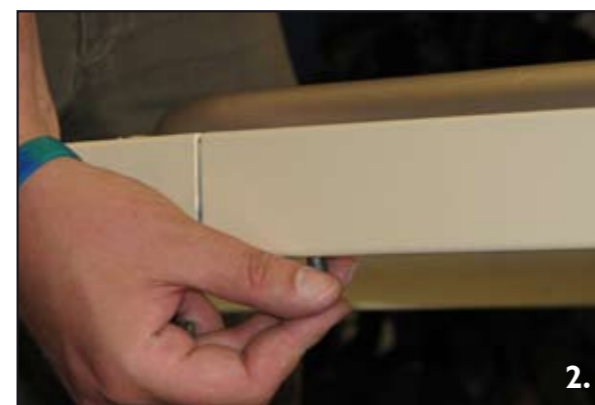

SB755™ kan förlängas 5 eller 10 cm i både huvud och fotände, 20 cm totalt. Vid förlängning används den medföljande insexnyckeln som ni finner vid sängens tvärbalk i huvudänden.

1. Ta bort sänggrinden
- 2a. Fotänden: Lossa de 2 skruvarna under vardera sidorör som håller gavelbeslagen med insexnyckeln..
- 2b. Huvudänden: Lossa de två insexskruvarna (ca 20 cm från huvudänden) med hjälp av medföljande insexnyckel.
3. Dra ut gavelbeslaget 5 eller 10 cm och skruva åt skruvarna igen.
4. Lossa de 2 skruvarna under madrassstödet på bendelen, dra ut madrassstödet 5 eller 10 cm och skruva åt skruvarna igen. Tänk på att madrassstödet avstånd till gaveln alltid skall vara minst 2,5 cm.
5. Lägg i en madrass eller en madrassförlängningsbit.
6. Montera sänggrindarna.

• Montering

1. Bromsa sängens hjul.
2. Se till att sänggrindar och gavlar är borttagna från transportkrokarna och att transportkrokarna är infällda.
3. Transportkrokarna och avståndspinnen fälls in.
4. Anslut sängens stickkontakt till vägguttaget.
5. Kör sängen till markerad höjd, så att markeringarna på sänglyften och markeringen på saxen är placerade mot varandra.



6. Placera huvudändan vid sänglyftens motsvarande sida och tippa ner huvudändan så att glidskena på sänglyften kommer in i sängbottens glidskena.

7. Placera bendelen så att dess låspärrar sitter på saxens motsvarande del. Det är viktigt att snabblåsen sitter riktigt och är låsta. Sängbottendelen tippas sedan ner till horisontalläge.



8. Lyft upp huvudändan och skjut den till stoppläge mot bendelen.

9. Sänk ner sätesdelen till låsläge.




10. Montera motorledningar till elektroniken och montera låskammen till elektroniken.

11. Montera grindar och andra tillbehör.

• Placering av sängens delar i transportläge

1. Sänglyftens sax måste vara i sitt lägsta läge. Sängens rygg och bendel hängs på sänglyftens krokarna. Det är oväsentligt vilken sektion som hängs på var sida.

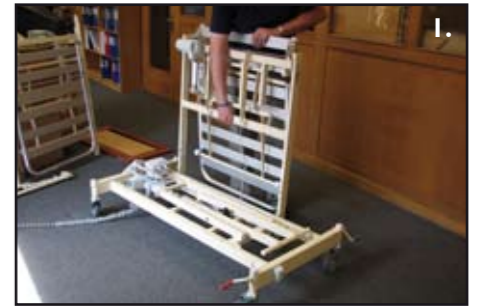

2. Sängen rygg och bendel lutas något inåt när de hängs på krokarna. När sängens sektioner står vertikalt står de av sig själva men skall låsas av avståndspinnen innan belastning.



3. Sängens rygg och bendel skall säkras med avståndspinnen.



4. Upphångningskrokarna fälls ut. Det är viktigt att avståndspinnen ovan sitter på plats innan upphångningskrokarna belastas.



5. Gavlar och grindar hängs på krokarna och ev. lyftbåge på sänglyftens fäste.



6. NB! Eventuell madrass kan placeras mellan rygg och bendel.