

MONTERINGSANVISNING FÖRHÖJNINGSDAPTER

AQUATEC ORCA, FORTUNA, BELUGA, ELAN, MINOR; MAJOR

Läs monteringsanvisningen noggrant innan du startar!

A. Montering av främre förhöjningsadapter

1. Tryck loss sugfotens röda låssnäppe från badkarslyftens bottenplatta. Ta bort sugfoten genom att dra den i spåret och lossa den (den skall inte användas mer).
2. Sätt tillbaka det röda låssnäppet i nyckelhålet i bottenplattan.
3. Sätt adaptorns hållare (4) med den fasade kanten nedåt, i nyckelhålet från bottenplattans ovansida, så att den passar i skåran i bottenplattan.
4. Skruva förhöjningsadaptorn (1) med den gängade "bulten" (2) från bottenplattans undersida i gängorna i adaptorns hållare (4).
5. Skruva den nya sugfoten (3) i förhöjningsadaptorns gängade bult (2).

B. Montering av bakre förhöjningsadapter

1. Skruva loss sugfoten från bottenplattan.
2. Skruva förhöjningsadaptorn (1) med den gängade "bulten" (2) från bottenplattans undersida i gängorna i bottenplattan.
3. Skruva sugfoten (den du skruvade loss) i förhöjningsadaptorns gängade bult (2).

