
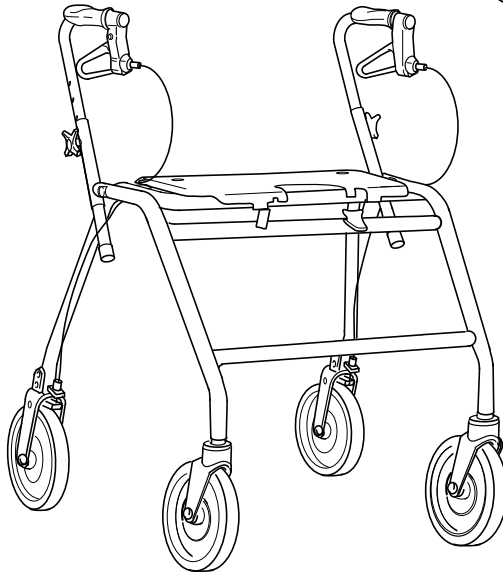




DOLOMITE MAXI+


Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport.



BRUKSANVISNING

Läs noga igenom bruksanvisningen **före** användning.
Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk.



SÄKERHET

- Det är förbjudet att stå på rollatorn samt att använda den för persontransport.
- Stå aldrig på rollatorn.
- Använd sitsen för att sitta på.
- Sitt aldrig och rulla dig fram med fötterna.
- Gå inte upp eller ner i trappor eller använd i rulltrappa.
- När du sitter på rollatorn ska båda bromsarna vara i parkeringsläge.
- Rollatorn ska vara helt utfärd när du går med den. OBS! Användes enbart som gångstöd.
- Iaktta försiktighet på lutande mark.
- Iaktta försiktighet när korgen är tungt lastad. Last är endast avsedd att transporteras i korgen eller på brickan. Maxlast i korgen 9 kg och på brickan 5 kg. OBS! Kontrollera att spärr/ fällspärr inte belastas av tryck från last i korg eller lasthylla.

TILLBEHÖR

- A) Montering av korgen.
- B) Montering av brickan med plastpluggar.

UPPFÄLLBAR SITS







Sitsen är uppfällbar för att ge ett större gångutrymme och för att öka åtkomligheten.

HOPFÄLLNING

1. Tryck ner spärren.
2. Drag sitsröret uppåt.

KÖRKLART LÄGE

Fäll ut rollatorn genom att trycka på sitsröret. Kontrollera att spärren är i låst läge före användning.

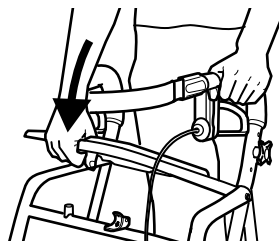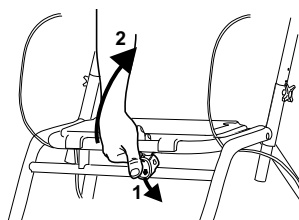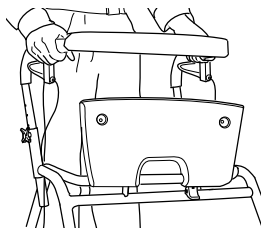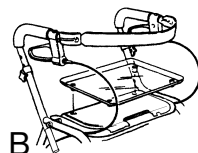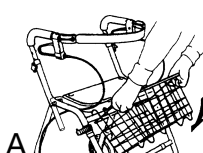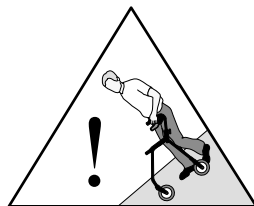

BROMSAR

Drag **båda** bromshandtagen uppåt för färd-broms.

PARKERINGSBROMS

Tryck bromshandtagen mjukt nedåt för parkeringsläge. Ett tydligt klick indikerar att bromsen är i rätt läge. Det är viktigt att båda bromsarna sätts i parkeringsläge. För att frigöra bromsen tryck bromshandtagen uppåt. När du sitter på rollatorn ska båda bromsarna vara i parkeringsläge.

JUSTERING AV BROMSVERKAN






Vid dålig bromsverkan justera bromsvajern. Lämpliga verktyg är fasta nycklar, 8 och 10 mm (medföljer ej).

KÖRHANDTAG

Stå bakom rollatorn och justera handtagen till önskad höjd.

Normalt skall handtagen vara placerade i handledshöjd. Vid speciella behov kontakta din ordinator.

För höjdjustering av handtag: Lossa låsmuttern helt. Ta ur skruven och justera handtaget till lämplig höjd. För tillbaka skruven i hålet, passa in den i det 6-kantiga hålet. Sätt tillbaka låsmuttern dra åt.

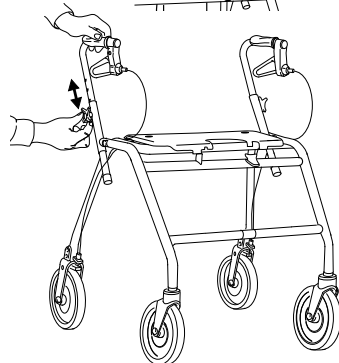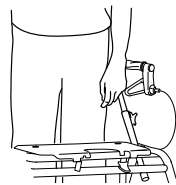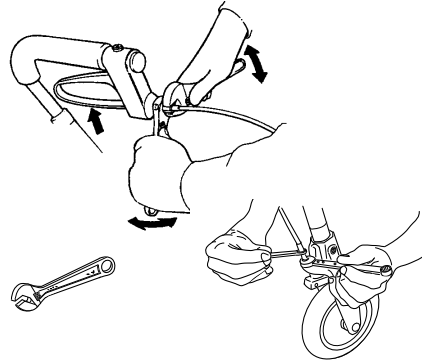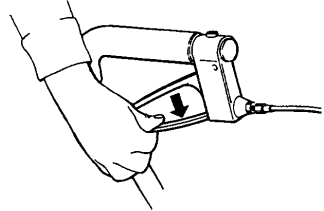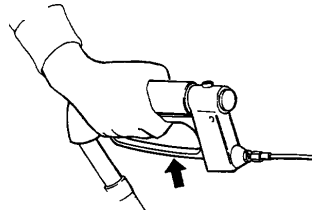

UNDERHÅLL – SÄKERHET

För att upprätthålla funktion och säkerhet bör Du regelbundet se till att nedanstående åtgärder utföres:

- Gör rent rollatorn med vanliga rengöringsmedel. Torka den torr. Håll hjulen rena.
- **Kontrollera att skruvar och reglage** är ordentligt åtdragna.
- **Om din rollator inte är i fullgod funktion - tag genast kontakt med din ordnatör.**
Defekt rollator får inte användas. Gör inga ingrepp själv!


OBS! Användes enbart som gångstöd. Användarens maxvikt: DOLOMITE MAXI+ 200 kg.
För ingrepp i rollatorn (anpassningar, bristfälliga reparationer), utan **DOLOMITEs** kontroll, ansvaras ej.

ANVISNING FÖR DESTRUKTION AV PRODUKT OCH FÖRPACKNING:

När produkten är förbrukad ska denna med tillbehör samt förpackningsmaterialet sorteras på rätt sätt. De enskilda delarna kan separeras och hanteras enligt materialbeteckningen.

På etiketten på **DOLOMITE MAXI+** finns all viktig teknisk information.

- 1: Artikelnummer
- 2: Produktnamn
- 3: Serienummer
- 4: Tillverkningsdatum
- 5: Max brukarvikt
- 6: OBS! Se bruksanvisning
- 7: Tillverkarens namn

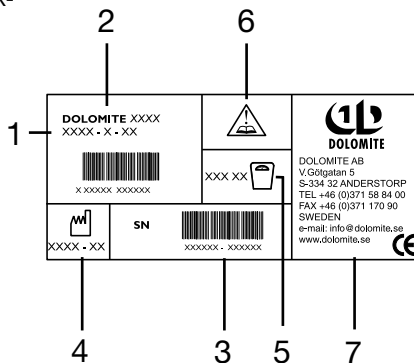

Tillverkare:
DOLOMITE AB, Box 55, 334 21 ANDERSTORP, SWEDEN
TEL +46 (0)371 58 84 00, FAX +46(0)371 170 90
E-mail: info@dolomite.se, www.dolomite.se

Säljbolag:
Invacare AB, Fagerstagatan 9, 163 53 Spånga,
Tel: 08-761 7090, Fax: 08-761 8108, www.invacare.se