

# Monteringsanvisning enhandsbroms på Dolomites rollatorer



Yes, you can.®

## Instruktionen gäller:

Dolomite Futura, Opal 200/2000/Futura  
Dolomite Symphony  
Dolomite Legacy  
Dolomite Maxi/Maxi+

## Verktyg:

Insexnyckel nr 2.  
Fast nyckel nr 8 alt skiftnyckel  
Fast nyckel nr 10 alt skiftnyckel  
Stjärnskruvmejsel



## MONTERING

### Enhandsbromsade sidan:

1. Lossa insexskruven som håller vajern i bromsklacken.
2. Lossa körhandtagsratten. Dra ur befintligt körhandtag inkl vajer och hölje och montera körhandtaget med enhandsbroms.
3. Drag en av vajrarna genom det nya korta höljet och genom hålet i nippeln på bakgaffelns framsida. Tryck ner höljet i hålet ordentligt.
4. Kontrollera att bromshandtaget är i neutralläge. Dra vajern ner i spåret/hålet på bromsklacken, se till att det är ca 3mm mellan hjulet och bromsklacken. Spänn vajern och lås den genom att dra åt insexskruven.

### Obromsade sidan:

5. Lossa insexskruven som håller vajern i bromsklacken.
6. **Alt. 1.** (Gäller Futura, Symphony, Harmony). Lossa de tre skruvarna på körhandtagets grå plastdel, tag bort bromshandtag inkl. vajer och hölje. Sätt tillbaka skruvarna igen.  
**Alt. 2.** (Gäller Legacy, Maxi+, Opal). Lossa skruven på bromshandtagets ovasida. Tag bort bromshandtag, vajer och hölje.
7. För den resterande enhandsbromsvajern genom det långa höljet och drag det under sitsen och över till motsatt sida. Fäst höljet med kabelklämman som skruvas i fällmekanismens skruv under sitsen.
8. Drag vajern genom hålet i nippeln på bakgaffelns framsida. Tryck ner höljet i hålet ordentligt.
9. Se punkt 4 ovan.
10. Fäst höljena mot ramen med buntband på båda sidor.
11. Finjustera bromsverkan enligt nedan.
12. Klipp av vajrarna.

### Finjustering av bromsen

Bromshandtaget skall vara i neutralläge.  
Använd fast nyckel nr 10 och lossa muttern (bild A) som låser bromsjusteringen.

Ställ in avståndet mellan bromsklack och hjul (bild D) genom att skruva med fast nyckel nr 8 på den sexkantiga nippeln (bild B) som sitter ovanför muttern du lossade.

Avståndet skall vara **3 mm** på en rollator med svart bromsklack och **2 mm** på en rollator med grå bromsklack (bild D).

Kontrollera att bromsen tar tillfredställande genom att lägga i parkeringsbromsen och sedan försöka snurra på hjulet.  
Om hjulet roterar – justera ytterligare och kontrollera igen.

Lås sedan avståndet du ställt in genom att använda fast nyckel nr 10 och dra åt muttern (bild C) som låser bromsjusteringen.

Lägg i parkeringsbromsen och kontrollera åter att bromsen tar tillfredställande genom att försöka snurra på hjulet.  
Om hjulet roterar – justera ytterligare.

