


2006-05-22

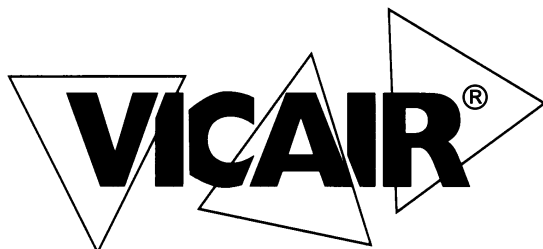

Bruksanvisning Vicair Liberty Dyna



Yes, you can.®

Återförsäljare:

Invacare AB

Box 66, Fagerstagatan 9 - 163 91 Spånga

Tel:08-761 7090 Fax: 08-761 8108

e-mail: sweden@invacare.com, www.invacare.se

Introduktion

Vicair® Liberty dynan är designad för att användas som beskrivet i denna bruksanvisning. Var vänlig läs hela bruksanvisningen innan dynan tas i bruk.

Dynan består av följande delar:

Innerdynan

Innerdynan är tillverkad i polyvinyl , fylld med ett specifikt antal tetraformade luftfyllda SmartCells. Dessa flexibla luftceller har en låg friktion och glider därför lätt mot varandra och formar sig lätt efter kroppsformen. En ventil är placerad på dynans bakre högra hörn.

Ytteröverdrag

Det finns två typer av ytteröverdrag:

- Comfair, tillverkad av ett luftgenomsläppligt tyg
- Inkontinens, tillverkad av ett vätsketätt inkontinens material.

Båda överdragen kan sträckas i två riktningar för att garantera optimal funktion och har ett antiglid material på undersidan.

Pelvic Stabiliser

Pelvic Stabiliser (PS) är ett tillbehör som kan användas tillsammans med Liberty PT modellen. Den hårda skumplattan förhindrar skjuvning och stabiliserar bäckenet och ger en mer upprätt och bekväm sittställning.

Montering

Kontrollera dynans storlek

Låt gärna en arbetsterapeut eller hjälpmedelskonsulent hjälpa dig att välja rätt storlek så att den passar din kroppsform och rullstol.

Bredd: Dynans storlek skall passa rullstolssitsen. Om rullstolen har armstöd eller sidoskydd som justeras i bredd kan dynan vara upp till 2 cm bredare. Se till att dynan inte är i vägen för ekerskydden.

Längd: Dynan skall passa rullstolssitsens längd eller vara upp till 2,5 cm längre.

Montera innerdynan i ytteröverdraget

- Ta bort det genomskinliga plastemballaget.
- Öppna blixtlåset på ytteröverdraget helt.
- Stoppa in innerdynan i ytteröverdraget. Instruktionen på dynan skall vara nedåt.
- Ventilen skall vara på dynans högra hörn.

Stäng blixtlåset på ytteröverdraget. Se till att det inte är några skador på innerdynan.

Använd alltid dynan med ytteröverdraget på.

Anpassa Pelvic stabiliser

Pelvic stabilizer skall användas tillsammans med dynmodellen Liberty PT.

- Öppna blixtlåset på ytteröverdraget helt.
- Passa in Pelvic stabiliser mellan innerdynan och botten på ytteröverdraget. Instruktionen som finns på Pelvic stabiliser skall vara uppåt.
- Spänn fast de två elastiska banden över Pelvic stabiliser (fig.A).
- Stäng ytteröverdraget.

Installation

Vicair® rekommenderar att installation och justering av Liberty dynan sker av behörig personal.

- Placera dynan på rullstolssätet. Se till att märketiketten är nedåt/bakåt på rullstolen.
- Öppna blixtlåset lite så att ventilen kan nås. Öppna ventilen.
- Sitt på dynan i några minuter så att luften i dynan anpassas efter kroppsvikten.
- Efter några minuter, stäng ventilen och tryck den nedåt. Stäng ytteröverdraget.
- Om nödvändigt justera fotstöden på rullstolen. Fötterna skall vila på fotstöden medan låren har full kontakt med dynan.

Kontroll av sitta igenom

Svanskotan och bäckenet skall inte nå botten på dynan. Kontroll av att "sitta igenom" skall ske vid första användningen och efter att luftjustering i dynan har anpassats.

- Sitt på dynan i ca 20 minuter.
- Under tiden som brukaren sitter på dynan luta brukaren framåt i rullstolen.
- Låt behörig personal sätta en hand mellan dynan och rullstolssitsen.
- Se till att stussen får fullt stöd av SmartCells.
- Använd inte dynan om man sitter igenom. I de flesta fall kan detta problem lösas genom att använda en annan modell eller storlek på dynan.

Användning

Regelbunden kontroll av rodnad på huden

Kontrollera brukarens hud regelbundet mot rodnad speciellt under de första dagarna. Om rodnad uppstår och inte försvinner efter 15 minuter, fortsätt inte att använda dynan. Kontakta behörig personal.

Användning av Vicair Dynan vid t ex flygresa och vid större höjder

I och med att varje cell i en dynan är fylld med luft kan den fungera olika när den används vid större höjder eftersom lufttrycket förändras. Vicair® rekommenderar att inte använda dynan över 2400m (8000ft) ASL (över havet).

Användning i fordon

Säkerhetstest av Vicair® dynor är för närvarande ej gjorda när det gäller användning i fordon. Därför uppmuntrar vi inte att använda dynan i fordon. Som ett alternativ kan Academy Allrounder, (som man fäster på brukarens kropp) användas om det behövs ytterligare stöd vid transport.

Överföring av dynan till annan brukare

Innan en annan brukare använder dynan rengör innerdynan och tvätta ytteröverdraget. Desinficera båda delarna. Se till att dynans luftjustering är korrekt och passar den nya brukaren.

Byta ut ytteröverdraget

Vid normal användning rekommenderar Vicair® att byta ut ytteröverdraget varje år. Ytteröverdrag kan köpas separat.

Antändlighet

Använd inte dynan nära en öppen brasa eller andra objekt med hög temperatur.

Underhåll och rengöring

OBS! Dynorna kan inte ångtvättas eller autoklaveras då de inte tål den starka hettan och trycket.

Kontroll av skadade luftceller

Kontrollera dynan var tredje månad efter skadade luftceller. Om en större skada skett och många luftceller har skadats, fortsätt inte att använda dynan. Kontakta behörig personal.

Rengöring av innerdynan

- Tvätta innerdynan med en fuktig trasa och en mild tvållösning .
- Använd inte aggressiva rengöringsmedel med slipmedel i eller vassa objekt för att göra ren innerdynan.
- Tvätta inte den fyllda innerdynan i tvättmaskin.

Rengöring av ytteröverdraget

Ytteröverdraget kan maskintvättas med avigsidan utåt och sen torktumlas. Läs instruktionen på etiketten som finns på insidan av överdraget.

Desinficering av dynan

Om dynan har utsatts för kroppsvätska eller om dynan skall överföras till annan brukare, skall den först rengöras och desinficeras för att undvika smitta.

Gör ren innerdynan och ytteröverdraget som beskrivet ovan. Vid tvätt av ytteröverdraget använd ett antibakteriellt tvättmedel.

Spraya desinfektionsmedel på både ytteröverdraget och innerdynan.

Vicair garanti

Vicair ger en garanti på defekter i tillverkningen eller i materialet över en period på två (2) år efter försäljningsdatum, förutsatt att normal användning har skett. Varje skada som uppstår på grund av onormalt bruk som t ex ovarsam behandling, rengöring, vårdslöshet ingår ej i garantin. Skulle en defekt i materialet eller tillverkningen uppstå inom de två (2) åren, från Invacares försäljningsdatum, vill Vicair på eget initiativ, reparera eller ersätta detta utan extra kostnader. Det yttre överdraget är exklusive från denna garanti, men ersättningsöverdrag kan köpas separat. Garantin täcker inte skador på grund av handhavandefel och övergår inte kostnaden för vad varan är såld.

Tillverkare:
Vicair BV
Koetsjerstraat 14, 1531 NX Nederlands
Tel. +31 (0)75 642 9992