

# Invacare® | *Vicair Academy Ryggar*



## **Optimal tryckavlastning, stöd och stabilitet**

Med hjälp av flera hundra små luftfyllda celler ger *Invacare Vicair ryggarna* en optimal tryckfördelning, stöd och stabilitet till många olika brukargrupper. Ryggdynan är enkel att använda och har en mängd olika spännande möjligheter.



**Yes, you can.®**



### Unik design

I Invacare **Vicair ryggdynor** används Invacare **Vicair Technology™**, en unik och innovativ metod som ger dynamisk yta och stöd. Ryggdynorna innehåller flera hundra små tetraformade luftfyllda celler **SoftCells™**. Dessa flexibla celler har en låg friktion och glider därför lätt mot varandra och formar sig lätt efter kroppsformen. Resultatet ger en optimal kombination av tryckfördelning, stöd och stabilitet.

### Optimal sittställning

Fler och fler inser betydelsen med ett bra ryggstöd. **Vicair ryggarna** ger god komfort samtidigt som de ger ökad stabilitet, rörelsefrihet samt förhindrar felställningar. **Vicair ryggarna** är indelade i flera sektioner med olika fyllnadsgrad och kan justeras individuellt för optimal anpassning.

### Många möjligheter

Inga brukare är lika varför det finns olika behov av positionering. **Vicair** serien består av flera olika modeller som täcker de flesta behoven.

Alla **Vicair Academy ryggar** är enkla och säkra att använda. Ryggarna har en mycket låg vikt och monteras enkelt av och på rullstolen.

### Ryggversioner



#### **Academy Multifunktional Rygg**

Placeras direkt i ryggskåpet och passar en mängd stolar t ex komfortoch elektriska rullstolar. Ryggen består av en ryggdyna som är indelad i 8 sektioner. Specialtillverkad serie finns till Invacare's komfortstolar.



#### **Liberty Rygg**

Är tillverkad på samma sätt som Liberty dynorna med ett silikonlag mellan cellerna. **Liberty Rygg** ger ökat stöd och mycket god komfort.



#### **Academy Ryggssystem**

Monteras enkelt mot stolens ryggrör och är höjd, vinkel och djupställbar. Ryggen består av ett anatomiskt format plastskal och ryggdynan är indelad i 9 sektioner.

## Anpassning



### Storlek

Vilken storlek på **Academy Rygg** och **Liberty Rygg** man behöver får man genom att mäta avståndet mellan ryggrörena.



### Anpassning av Academy Rygg

**Academy Rygg** monteras och anpassas enkelt med hjälp av 4 fästen, två nedre och två övre. Ryggvinkeln justeras genom att föra de övre fästena upp eller ned innan ryggen låses i rätt position.



### Anpassning av Liberty Rygg

**Liberty Rygg** passar de flesta velcro ryggar med hjälp av kardborrband. Ryggen justeras genom att lossa eller dra åt kardborrbanden.

## Tillbehör



### Academy Butterfly

Passar de flesta ryggar, inte bara rullstolar. Ryggen består av 3 sektioner och ger ökad stabilitet och stöd till nedre delen av ryggen. Placeras direkt på befintlig rygg.



### Academy Multifunctional Huvudstöd


Monteras på huvudstödet utan polstring. Huvudstödet består av 1 sektion.



### Tillbehör Academy Ryggssystem

Kan förses med sidostöd och/eller ryggförlängning. Ryggförlängningen är triangelformad så att brukarens rörelsefrihet behålls.

## Tekniska data

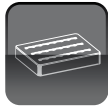

	Storlek: (b x h)	Vikt:	Max. brukarvikt	Rengöring överdrag
<b>Academy Multifunctional</b>	36 x 45	1,25 kg	250kg	60°
	41 x 45			
	46 x 45			
	37 x 54			
	40 x 54			
	45 x 54			
	50 x 54			
<b>Academy Butterfly</b>	40 x 20	0,55 kg	120 kg	60°
	45 x 20			
	50 x 20			
<b>Academy Rygg (b)*</b>	31 - 34	2,70 kg	180 kg	60°
	33,5 - 36,5			
	36 - 39			
	38,5 - 41,5			
	41 - 44			
	43,5 - 46,5			
	46 - 49			
	48,5 - 51,5			
<b>Liberty Rygg (b)*</b>	36 / 40 x 45	0,70 kg	150 kg	60°
	40 / 44 x 45			
	44 / 48 x 45			

**Anm.:**

(b)\* Minst - störst avstånd mellan ryggrörena.  
Vanligtvis ca 5 cm mindre än sittbredden.

**Garanti: 2 år**