

## JUSTERING AV GASKOLV PÅ **AQUATEC OCEAN VIP**

Stegen måste utföras i den ordning de visas för att säkerställa säkerheten för brukaren.

1. Lossa kontramuttern på vajerhöljet. Skruva in justerhysan så långt det går och dra åt kontramuttern.

*Kontramuttern skall endast dras åt så att den ej lossnar, för hård åtdragning kan skada gasfjädern.  
Detta gäller alla kontramuttrar på gasfjädrarna och dess manöverdon.*



2. Lossa kontramuttern på vajerhöljet vid vajerfördelaren. Skruva in justerhysan så långt det går och dra åt kontramuttern.



3. Kontrollera om de utförda åtgärderna har resulterat i önskvärd hastighet i fällningen (detta skall kontrolleras med stolen belastad med den tilltänkta brukarvikten)

Om ytterligare justering behövs görs detta enligt steg 4ff nedan.

4: Lossa kontramuttrarna på gasfjädrarnas manöverdon (se bild nedan)



5. Fäll stolen till sitt nedersta läge bakåt (35°), ta bort fotstöden.

6. Använd en tång för att vrida gasfjäders kolv 180° moturs.  
Var noga med att ej skada kolven, använd så låg klämkraft som möjligt.  
Upprepa proceduren på gasfjäders på andra sidan.



7. Kontrollera om önskad effekt uppnåtts. Om inte, upprepa steg 6.
8. Dra åt kontramuttrarna på gasfjädrarnas manöverdon
9. Om ytterligare justering behövs, återupprepa steg 4 till 8 till dess önskad funktion erhålles.

*Fällhastigheten hos stolen ökar med ökande fällvinkel. Detta beror på gasfjädrarnas karakteristik och kan ej justeras.*