

Instruktioner för rekonditionering av DOLOMITE MELODY & SOPRANO

Följande punkter skall gås igenom och kontrolleras vid rekonditionering av Dolomites rollatorer.
Uppdatering jämfört med tidigare utgåva markerat i texten med understrykning.

HJUL

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
1	hjulagret ej är skadat och att lagerfett finns.	Hjulet ska snurra lätt annars skall det bytas ut. Vid återinfettning av lager bör smörjfett SKF LGEP2 användas.	Vid hjulbyte fram, måste låsmutter bytas.	
2	slitbanan ej är skadad. Sliten eller ojämnt slitage runt slitbanan.	Hjulet byts ut.	Vid hjulbyte fram, måste låsmutter bytas.	
3	hjulbultar är ordentligt åtdragna.	Drag åt skruvarna, (limmas med Lexeal 5503 om ej låsmutter finns tillgänglig)	Vid hjulbyte fram, måste låsmutter bytas.	
4	Framhjulgaffeln har rätt åtdragningsmoment.	Drag åt framgaffeln i stativet med 60 Nm.		
5	framhjulgaffeln ej har några skador.	Byt gaffel. Drag åt framgaffeln med 60 Nm eller limma med stark gänglåsning tex Lexeal 5503 och hårdare Loxeal attivatore 18.		
6	<u>Produkt är tillverkad före 2005-05 utrustad med välvd bricka mellan stativ och gaffel.</u>	<u>Gaffeln skall limmas med stark gänglåsning tex Lexeal 5503 och hårdare attivatore 18.</u>	Soprano ska skrotas	

BROMS

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
1	avstånd mellan klack och hjul ej överstiger 1 mm.	Vid behov justera		
2	Full bromseffekt erhålls.	Justera bromseffekten på bromsklacken om det inte fungerar skall körhandtaget ersättas.		
3	Bromshandtaget sitter utan glapp på handtagsröret.	Ersätt med nytt körhandtag.		
4	Bromshuset/handtag ej är skadat.	Ersätt med nytt körhandtag.		
5	Bromshandtagsröret ej är böjt	Ersätt med nytt körhandtag		

FÄLLMEKANISM

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
1	Rollatorn låser och stannar i utfällt läge samt att fälläges brickan inte är skadad.	Byt fällspärrsatsen		
2	Att de ej är glapp i fäll leden	Återmontera skruven med stark gänglåsning tex Loxeal 5503 och hårdare loxeal attivatore 18		

HANDTAGSGREPP

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
1	Handtagsdynor ej är skadade.	Byt ut handtagsdynorna.		

LÅSRATTAR

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
1	Höjjusteringsratt låser handagsrören riktigt.	Byt höjjusteringsratt och mutterbricka		

STATIV

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
1	inga lackskador finns	Reparera lackskadorna med Dolomites bättringsfärg.		
2	inga mekaniska skador har uppstått på stativet.	Kassera rollatorn.		

SITS

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
1	Sitsen gnisslar vid användning av fällfunktion.	Spraya rörliga delar med silikon.		
2	Sitsen inte är skadad	Byt ut sitsen		
3	Förstärkningsstag på SOPRANO är ordentligt åtdraget och ej skadat.	Dra åt skruvarna, alternativt byt till ny sits.		
4	Att sitsen sitter ordentligt fast i ramen (får ej glappa)	Byt sits		

RYGGBAND

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
1	Ryggband och infästningarna ej är skadade och försäkra att skruvarna är riktigt åtdragna.	Byt ut ryggbandet eller drag åt skruven.		

PLANHET

1	alla hjul är i kontakt på ett plant underlag.	Justera bakhjulen genom att flytta bakgaffeln upp el. ned.		
---	---	--	--	--

KONTROLL AV ROLLATORN ENLIGT SKÖTSELROUTINER OVAN SKA UTFÖRAS REGELBUNDET.

FREKVENSEN SKA AVGÖRAS AV VILKEN GRAD OCH PÅFRESTNING ROLLATORN HAR ANVÄNTS.

Kontroll utförd av:

Namn: _____

Rollatormodell: _____

Datum: _____

Serienummer: _____

Namnteckning: _____

DOLOMITE AB - V. Götgatan 5, 334 32 ANDERSTORP - Tel: 0371 58 84 00 Fax: 0371 170 90