

Rekonditioneringsanvisning för Volaris rollator

Börja med att göra rent rollatorn genom att tvätta med mildt rengöringsmedel eller i tvättkabinett (60 grader i 45 minuter). Låt rollatorn torka ordentligt.

Hjulen

- Kontrollera att hjulen eller slitbanan ej är skadade, att de rullar lätt och att inte kullagret låter illa.
- Kontrollera och säkerställ att hjulskruvarna inte är lösa.
- Kontrollera att framgaffeln sitter fast ordentligt i stativet.
- Inspektera framgaffeln så att den inte har några skador.

Bromsar

- Kontrollera att bromsklacken inte är sliten.
- Justera distans mellan bromsklack och hjul till 1mm.
- Smörj vajer för att säkerställa att bromsen tar ordentligt.
- Kontrollera att bromshandtag inte är skadat.
- Säkerställ att skruvarna kring bromshandtaget sitter ordentligt i aluminiumprofilen.
- Kontrollera att höjdjusteringen låser i alla lägen.

Handtag

- Kontrollera att höjdjustering av handtag går lätt att justera upp och ner, och att den inte har orsakat skada på aluminiumprofilen.
- Kontrollera att handtagsgreppen inte är skadade.

Fällmekanism

- Smörj med lite fett vid krysset för att säkerställa att fällmomentet blir enkelt.
- Kontrollera att fällspärren låser och känns enkel att handha.
- Inspektera att det inte finns skador på krysset.

Sits

- Kontrollera att sitsen går att justera och låsa eller inte är skadad.

Extra kontroll vid Volaris RA

- Kontrollera att handtagsgrepp och armstödsplattor inte är skadade.
- Kontrollera att skruvarna för armstödsplattorna är åtdragna.
- Kontrollera att vinkeljusterskruven för armstödsplattorna är åtdragna.
- Kontrollera att säkerhets/låsartarna för armstödet höjdjustering är åtdragna.
- Säkerställ att skruvarna som håller handtags- och armstödsmekanismen sitter ordentligt i aluminiumprofilen.

Tillbehör: Ryggband

- Kontrollera att ryggband och infästning inte är skadade och att skruvarna är åtdragna.

Slutkontroll

- Kontrollera att rollatorn är stabil, att alla hjulen står stadigt och gör en provkörning.
-

Rollator modell: _____

Serienummer: _____

Service gjord av:

Namn: _____

Datum: _____

Signatur: _____