




Service manual

- servicepunkter, anpassningar, återanvändning

Innehållsförteckning	
Byte av armstöd	3
Byte av armstödsplattor	3
Byte av sida på rotationsspaken - gas	4-5
Byte av sida på rotationsspaken - el	6-7
Byte av multirygg	8
Byte av ryggstolpe multirygg	8
Byte av ryggplatta	9
Byte av ryggstolpe	9
Byte av rygg	10
Byte av sida för lyftspak	11-12
Byte av sida för manöverdosa	13-15
Hjul - byte fram (Flexbase)	16
Hjul - byte bak (Flexbase)	16-17
Hjulbyte fram (Steel)	18
Hjulbyte bak (Steel)	19
Sidbyte av broms (Flexbase)	20
Sidbyte av bromsspak (Steel)	21
Demontering av chassi - Steel	22
Demontering av chassi - Flexbase	22
Demontering av fotring - Steel	23
Demontering av fotring - Flexbase	23
Byte av ställdon - el	24-25
Byte av gaskolv	26
Byte av sits	27
Tvättråd	28
Byte av batteri	29-30

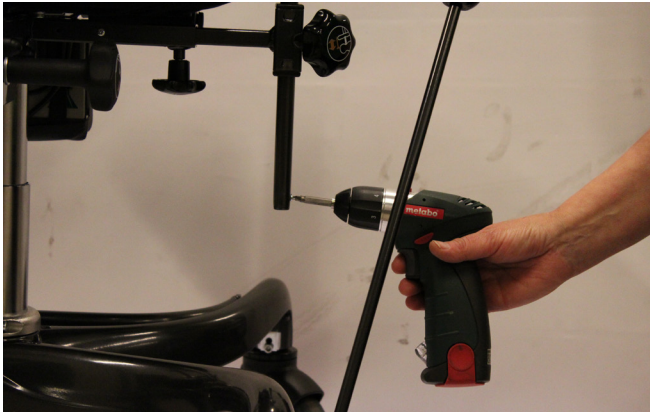

BYTE AV ARMSTÖD

Tidsåtgång: 1-2 minuter

1) Lossa stoppskruvarna med en stjärnskruvmejsel.



2) Lossa ratten vid höjdjusteringen och drag upp armstödet.



BYTE AV ARMSTÖDS- PLATTOR

Tidsåtgång: 1-2 minuter

1) Lossa skruvarna i höjdjusteringen med insexnyckel nummer 5.



2) Lyft upp höjdjusteringen och tag bort armstödsplattan.



3) Skruva dit höjdjusteringen på den nya armstödsplattan med insexnyckel nummer 5. Skruva åt ordentligt.





BYTE AV SIDA PÅ ROTATIONSSPAKEN - GAS


Tidsåtgång: 10 minuter

1) Lossa två skruvar i chassit med insexnummer 6 mm. Lyft upp sitsen och lägg upp den.


2) Använd två 13 mm nycklar för att lossa de två genomgående skruvarna

3) Tag bort skruvarna.

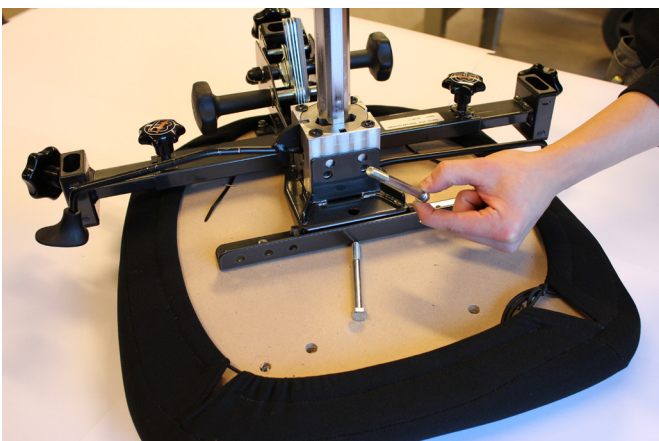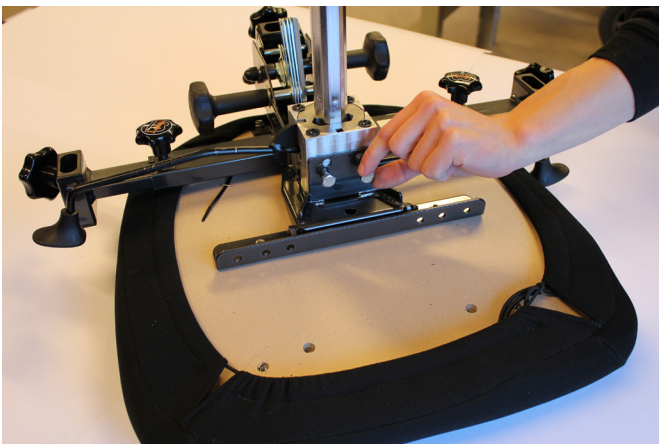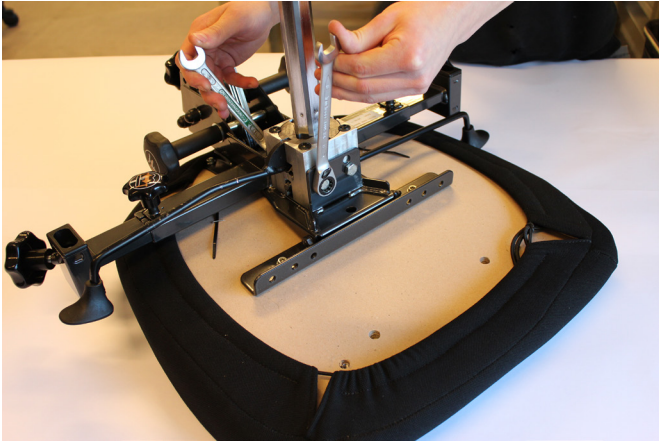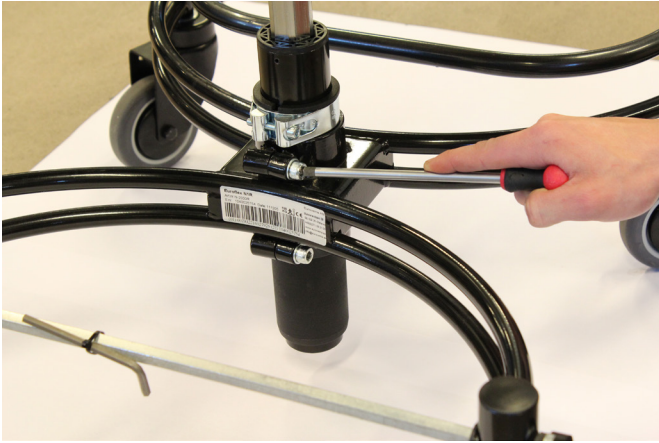


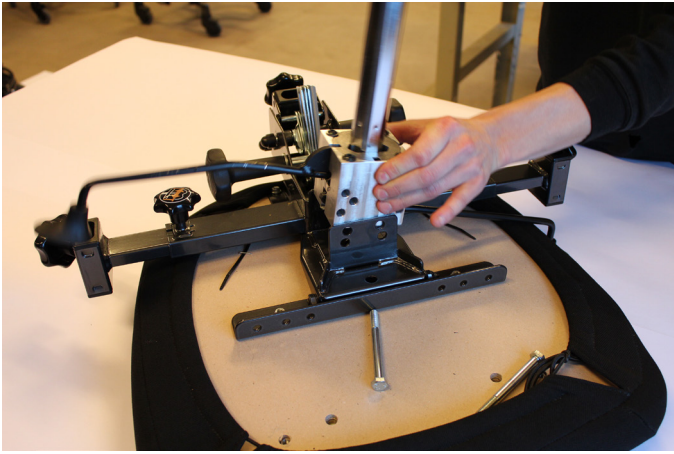

4) Lyft upp rotationen och vrid 90°

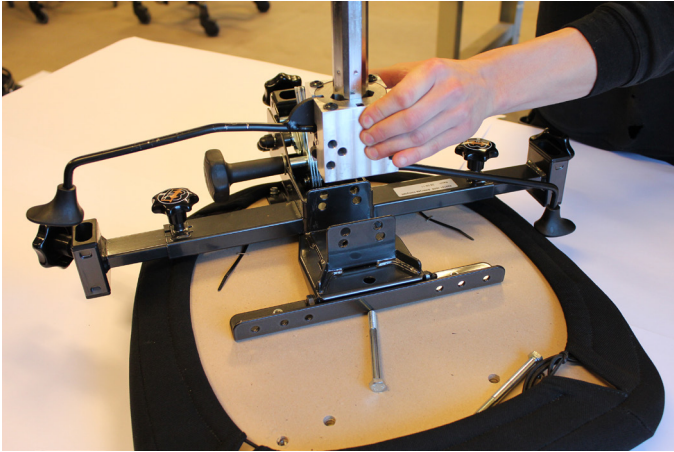

5) Montera sedan i omvänd ordning. Se till att stolens sits hamnar rakt i chassit. Skruva åt de två M8-skruvarna i chassit med 35 Nm.

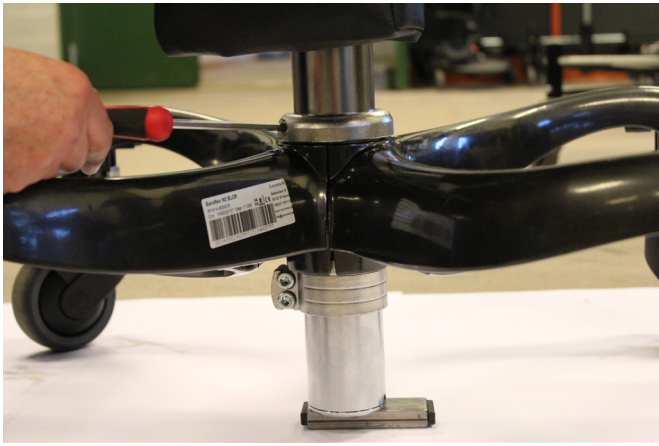


BYTE AV SIDA PÅ ROTATIONSSPAKEN- EL

Tidsåtgång: 30 minuter


1) Lägg dit en motkloss ca 15 mm under ställdonet innan du lossar skruvarna. (Klämrisk). Lossa övre skruv med nyckel nr 5 mm.




2) Lossa de två undre skruvarna i chassit med 6 mm insexnycklar. Lyft upp sitsen.

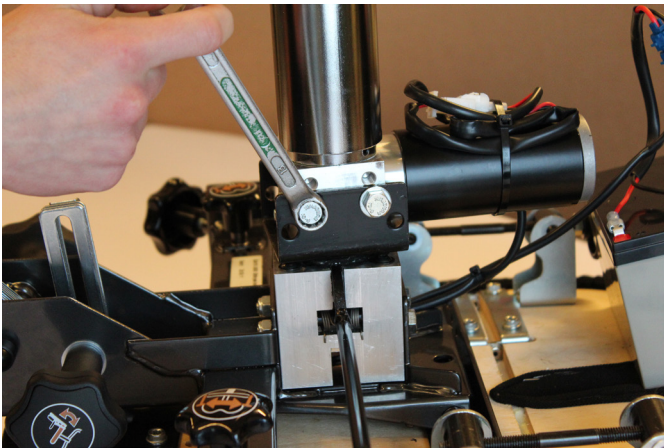

3) Lossa skruvarna på motsatt sida. Använd 13 mm nycklar, dra åt med 35 Nm.

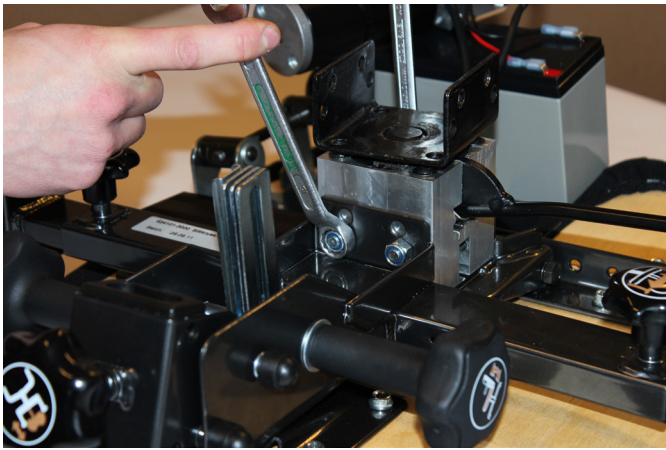

- 4) Lossa de två genomgående skruvarna och muttrarna på andra sidan med 13 mm nyckel.

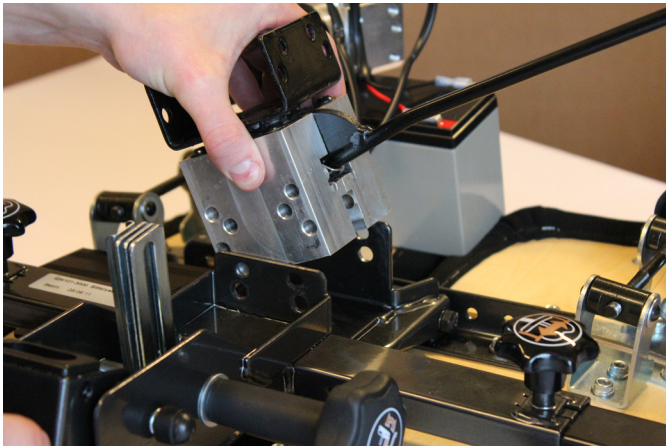

- 5) Tag loss rotationsbackarna och skifta sida. Montera i omvänd ordning. Dra åt med 35 Nm.



BYTE AV MULTIRYGG

Tidsåtgång: 10 minuter

1) Lossa skruven som håller fast multiryggens undre rör med hjälp av en #13 ring nyckel.



2) Dra ut multiryggens undre rör. Montera tillbaka i omvänd ordning



BYTE RYGGSTOLPE MULTI-RYGG.

Tidsåtgång: 1-3 minuter

1) Lossa spaken och håll fast ryggstödet så att den faller inte ner.



2) Tryck in fjäderkulan och dra ut ryggstolpen. Montera tillbaka i omvänd ordning.



BYTE AV RYGGPLATTA


Tidsåtgång: 0,5-2 minuter.

Kan göras utan verktyg.

- 1) Lossa den översta ratten, tills du kan lyfta upp ryggen.




- 2) Tag bort ryggen. Sätt dit den nya ryggen och drag åt ratten.

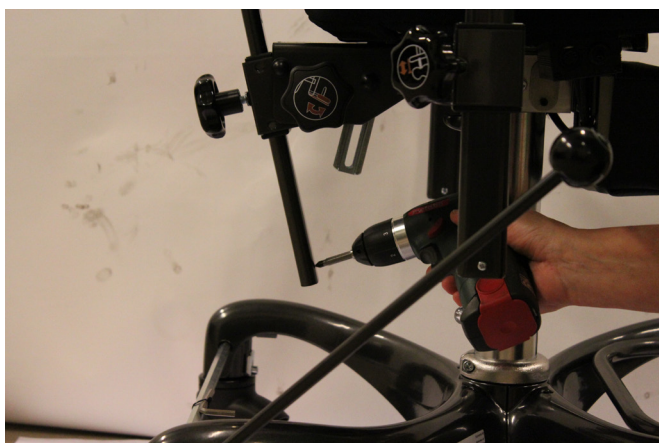

BYTE AV RYGGSTOLPE

Tidsåtgång: 1-3 minuter

- 1) För att lossa hela ryggstolpen till ryggen, skruva bort stoppskruven först med en stjärnskruvmejsel.

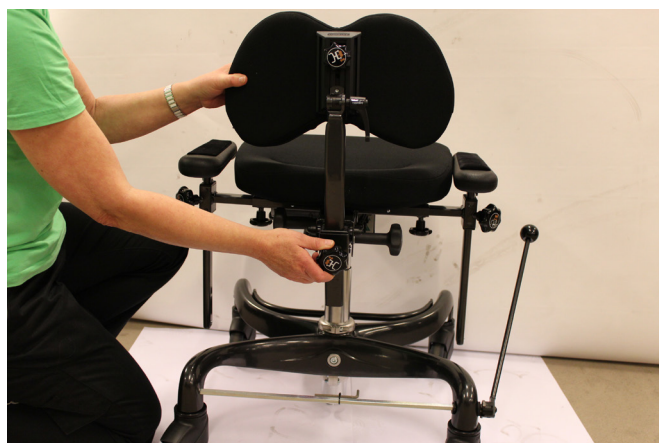

- 2) Lossa den stora ratten och drag upp ryggstolpen. Sätt dit den nya ryggstolpen och skruva åt ratten och sätt dit stoppskruven.



BYTE AV RYGG

Tidsåtgång: 1 minuter.

Kan göras utan verktyg.

1) Lossa på ratten för att byta rygg.




2) Lyft bort ryggen och sätt dit en ny. Skruva åt ratten när du fått den i rätt höjd.




BYTE AV SIDA FÖR LYFTSPAK

Tidsåtgång: 10 minuter


1) Använd två 13 mm nycklar och lossa de två genomgående skruvarna.

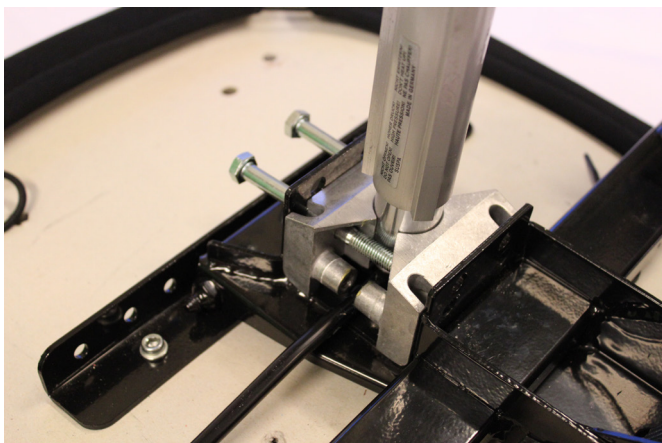


2) Drag ut skruvarna.

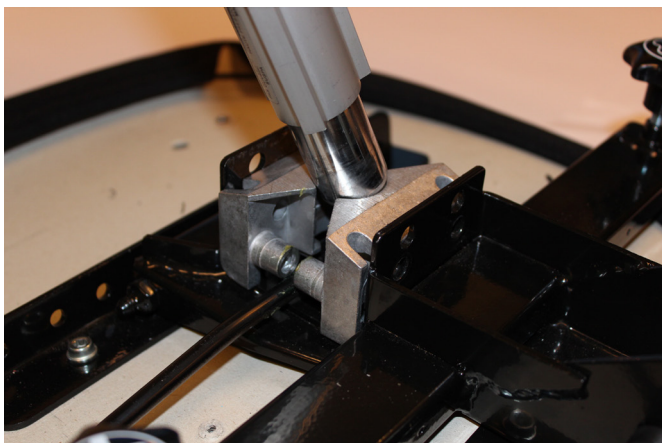


3) Lyft upp ställdonet.

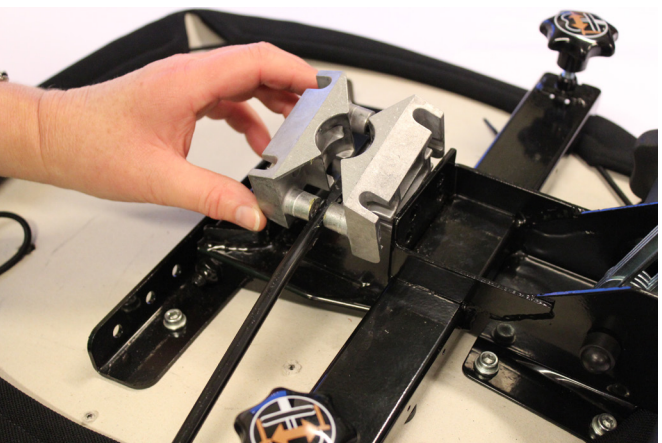


4) Lyft upp klämbäckarna.

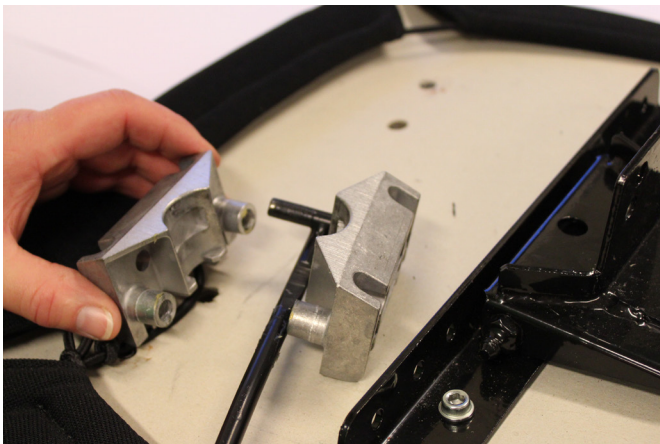

5) Tag loss lyftspaken.

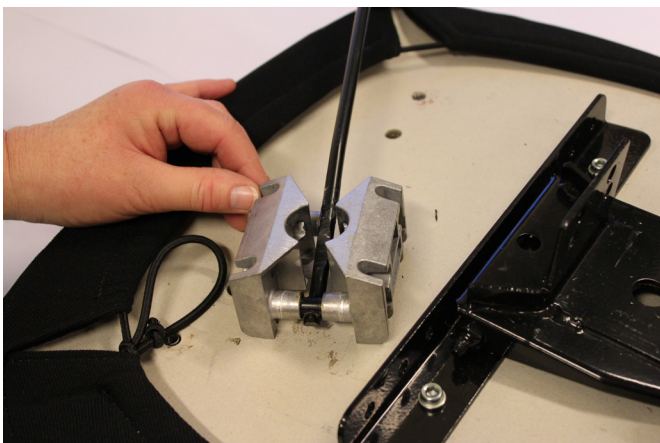

6) Byt sida på lyftspaken.

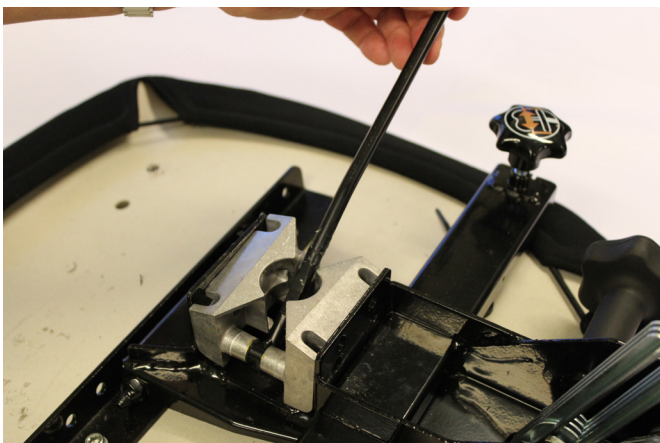


7) Sätt tillbaka klämbäckarna.



8) Sätt tillbaka ställdonet och drag åt alla skruvar med 35 Nm.

BYTE AV SIDA PÅ MANÖVERDOSA


Tidsåtgång: 5 minuter

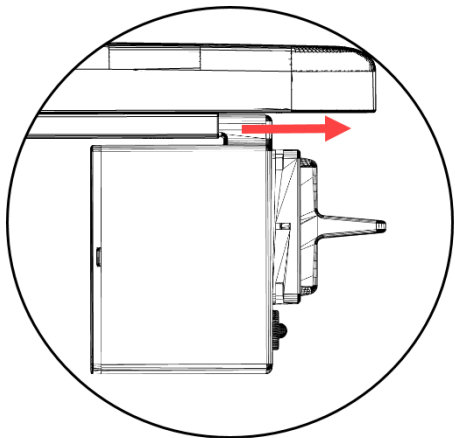

1) Skjut ut manöverdosan rakt ut genom att trycka i bakkant på manöverdosan.



2) Dra sladden över till andra sidan av stolen.

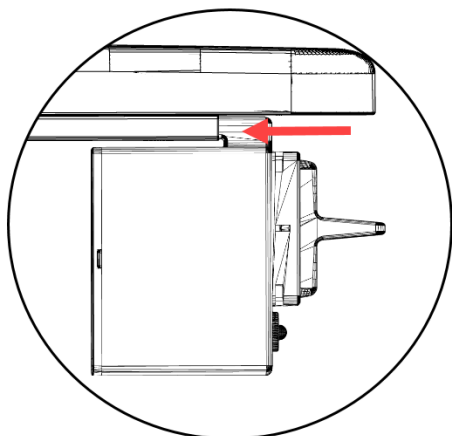

3) Tryck manöverdosan in i armstödet rakt tills ett klick hörs.

BYTE AV SIDA PÅ MANÖVERDOSA

Tidsåtgång: 15 minuter

1) Lossa stoppskruven på
armstödet.



2) Lossa armstödet med ratten och
lyft av det.




3)




4) Tag bort manöverdosan.




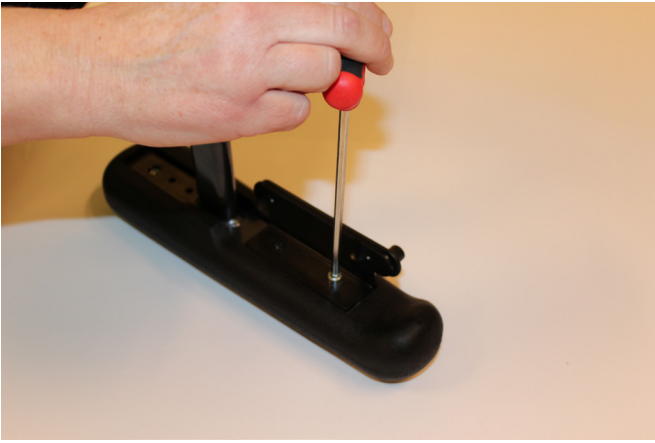

5) Skruva loss två skruvar på undersidan av armstödet med insexnyckel nr 5 mm.

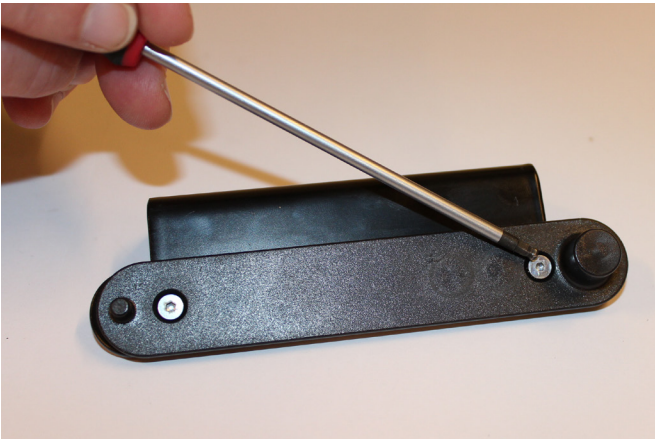

6) Lossa skruvarna från metallblecket till manöverdosan med insexnyckel nr 2 mm.

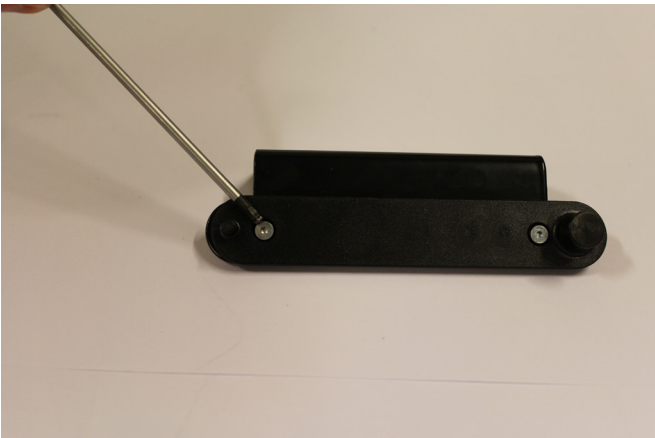

7) Vänd magnetlisten och skruva dit skruvarna med insexnyckel nr 2 mm.



8) Byt sida på armstödet och sätt tillbaka skruvarna och skruva fast dem ordentligt allt i omvänd ordning. Kom ihåg stoppskruven, skruvas fast med en stjärnskruvmejsel.




HJUL - BYTE FRAM FORMA

Tidsåtgång: 5 minuter

1) Lossa skruven i metallbrickan med insexnyckel nr 5 mm.



2) Drag loss hjulet. Byt hjul. Kom ihåg att limma skruven och drag åt med 15 Nm.

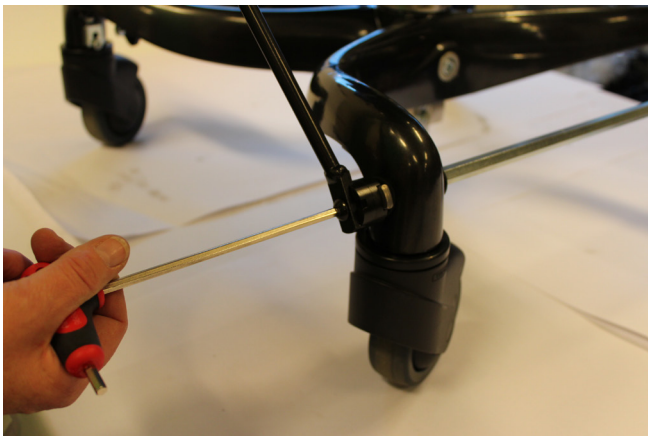

HJUL - BYTE BAK FORMA

Tidsåtgång: 10 minuter


1) Lossa skruven i bromsspaken med insexnyckel nr 5 mm och tag bort bromsspaken och kugglåsen.



2) Lossa segersäkringen med en skruvmejsel och tag bort den.



3) Drag bort plastbrickan från sexkantstången.

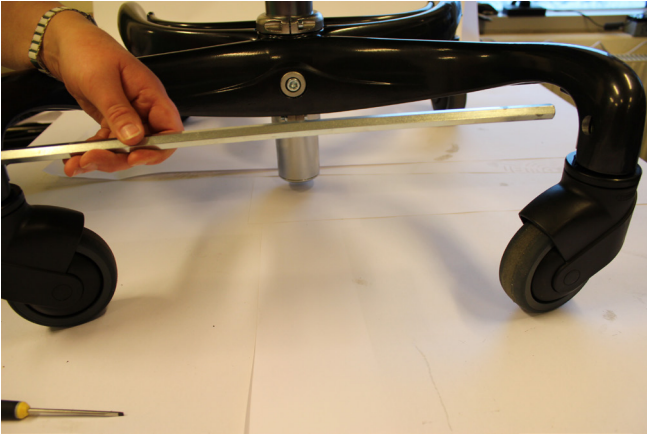

4) Drag ur sexkantstången från chassit.



5) Lossa skruven i metallbrickan med insexnyckel nr 5 mm.



6) Byt hjul. Kom ihåg att limma skruven och drag åt med 15 Nm. Sätt dit allt igen i omvänd ordning.

HJULBYTE - FRAM STEEL

Tidsåtgång: 2 minuter

1) Lossa skruven och muttern med två fasta nycklar nummer 13.

2) Drag ut skruven och byt hjul. Gör allt i omvänd ordning och skruva åt med 25 Nm.




HJULBYTE - BAK STEEL

Tidsåtgång: 5 minuter



1) Lossa spärryttaren på bromsstången.

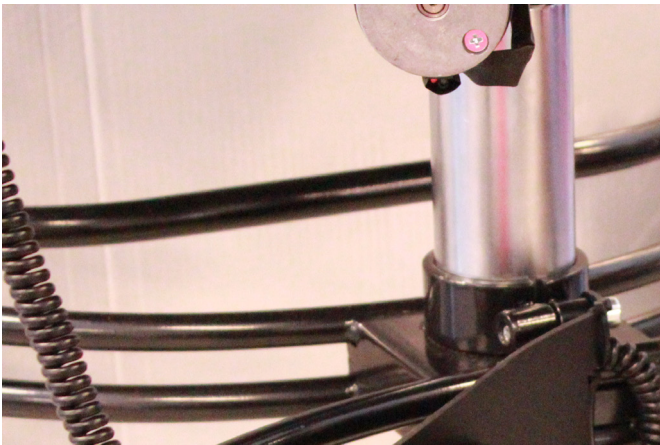

2) Drag ur bromsstången från chassit.



3) Lossa skruven som håller i hjulet med insexnyckel nummer 5.




4) Drag ut hjulet och montera i omvänd ordning. Dra åt med 15 Nm.



SIDBYTE AV SPAKBROMS

Tidsåtgång: 5-10 minuter

1) För att byta bromsen från höger till vänster sida låt stolen stå obromsad.

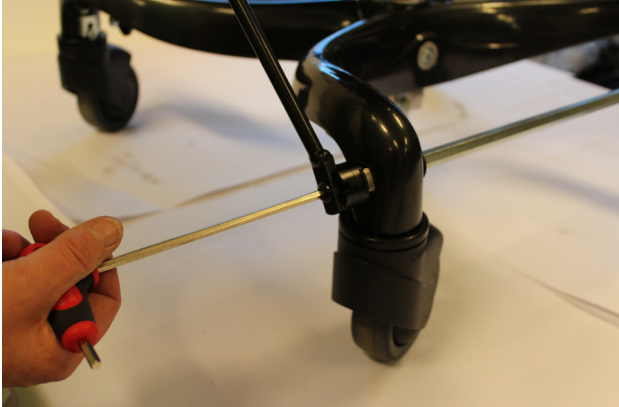


2) Lossa skruven i bromsspaken med insexnyckel nr 5 mm.




3) Lossa segersäkring med en skruvmejsel och tag bort den.



4) Tag loss plastbrickan som sitter innanför segersäkringen. Drag av brickan från sexkantstången.

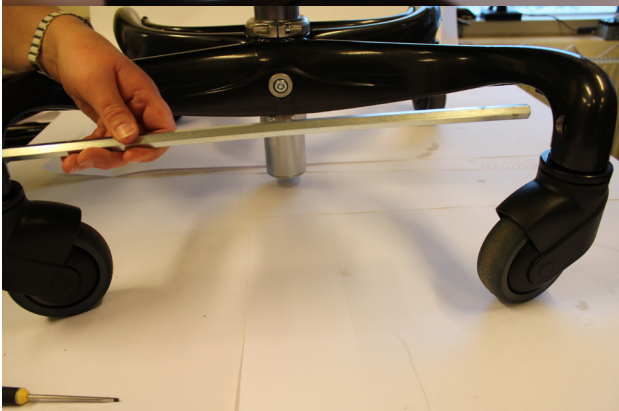

5) Drag ur sexkantstången och byt sida. Montera och skruva i omvänd ordning

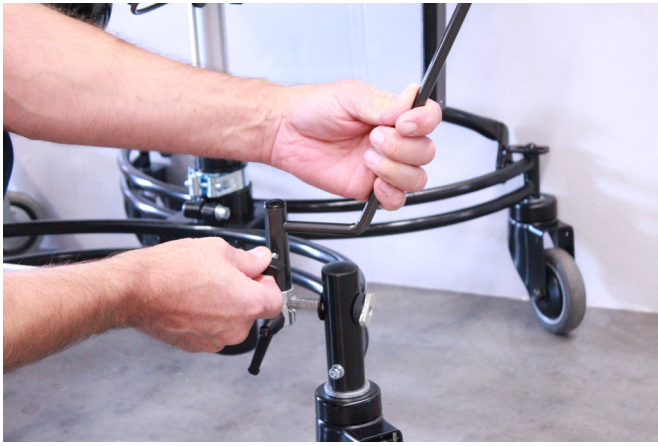


SIDBYTE AV MITTMON- TERAD BROMSSPAK (STEEL)

Tidsåtgång: 5 minuter


1) Lossa på ratten.



2) Drag upp bromsspaken från
adaptorn.

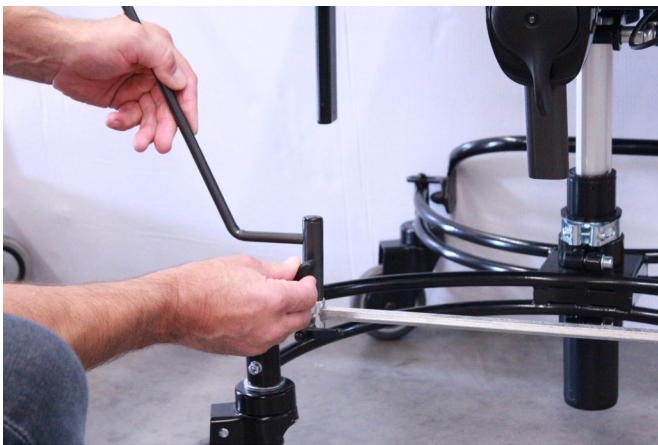

3) Byt till andra sidan och gör allt i
omvänd ordning.

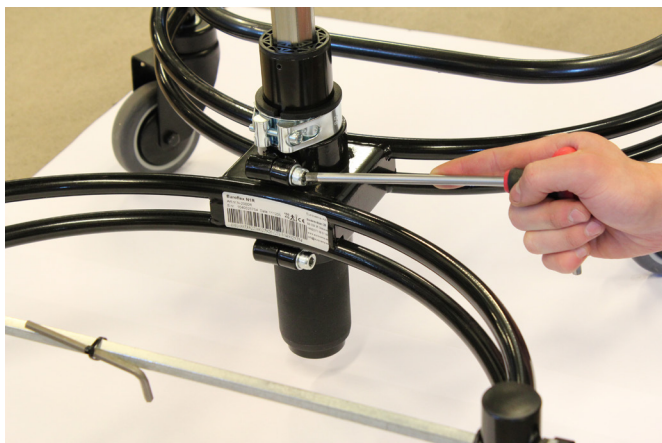

DEMONTERING AV STEEL-CHASSI

Tidsåtgång: 3-5 minuter


- 1) Lossa skruvarna med insexnyckel nr 6 mm.



DEMONTERING AV FLEXBASE-CHASSI

Tidsåtgång: 5 minuter


- 1) Lägg dit en motkloss ca 15 mm under ställdonet innan du lossar skruvarna. (Klämrisk). Lossa övre skruv med insexnyckel nr 5 mm.

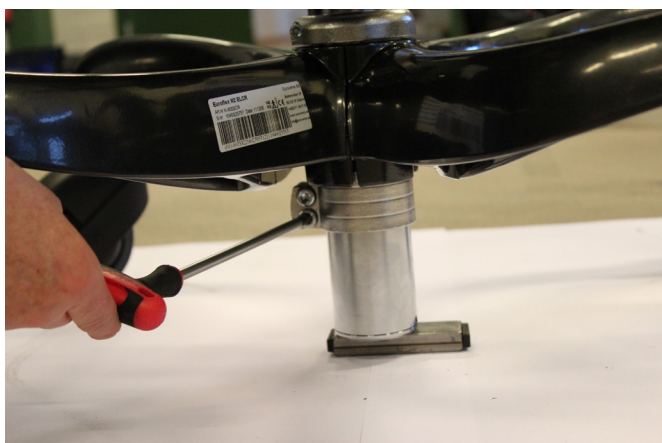

- 2) Lossa de två nedre skruvarna med insexnyckel nr 6 mm.



- 3) Lyft upp ställdonet.

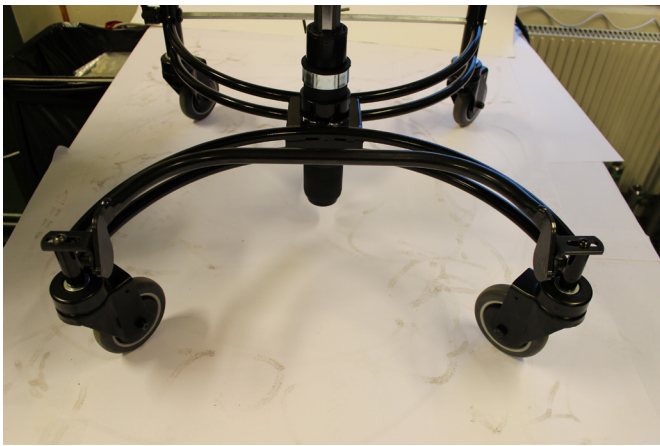

DEMONTERING AV FOTRING - STEEL

Tidsåtgång: 1-3 minuter

1) Fäll upp fotringen.




2) Lossa skruven med insexnyckel nr 5 mm på båda sidorna.



DEMONTERING AV FOTRING - FLEXPBASE

Tidsåtgång: 1-3 minuter

1) Fäll upp fotringen.

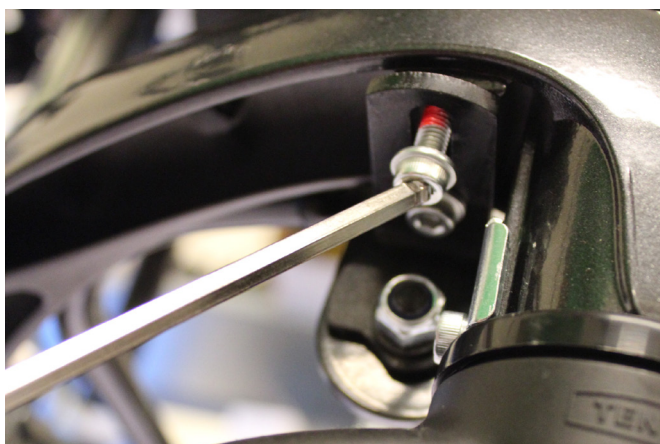

2) Lossa de fyra skruvarna på undersidan med insexnyckel nr 5 mm.



BYTE AV STÄLLDON - EL

Tidsåtgång: 25 minuter


1) Lägg dit en motkloss ca 15 mm under ställdonet innan du lossar skruvarna. (Klämrisk). Lossa övre skruv med insexnyckel nr 5 mm.




2) Lossa de två undre skruvarna i chassit med 6 mm insexnycklar. Lyft upp sitsen.



3) Tag loss kabeln till ställdonet.

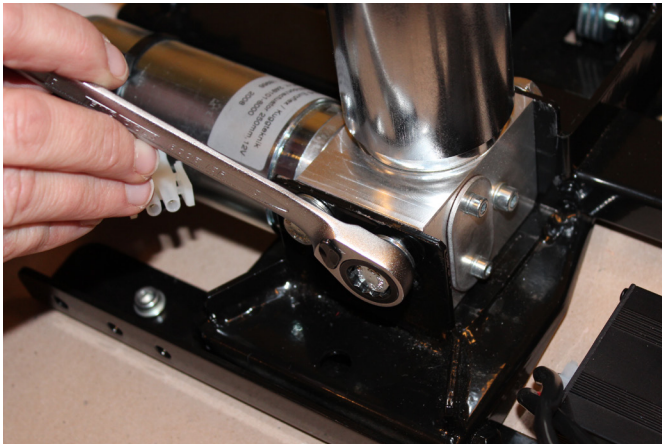


4) Lossa och tag bort skruvarna.

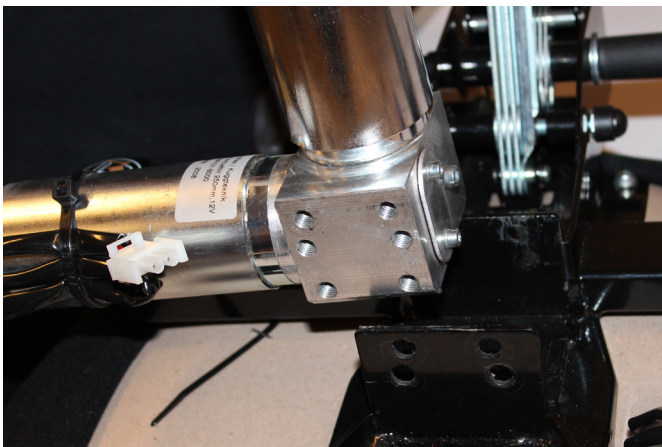

5) Lyft bort och byt ställdonet.
Skruva och sätt tillbaka allt i
omvänd ordning.

M6 15 Nm


M8 35 Nm

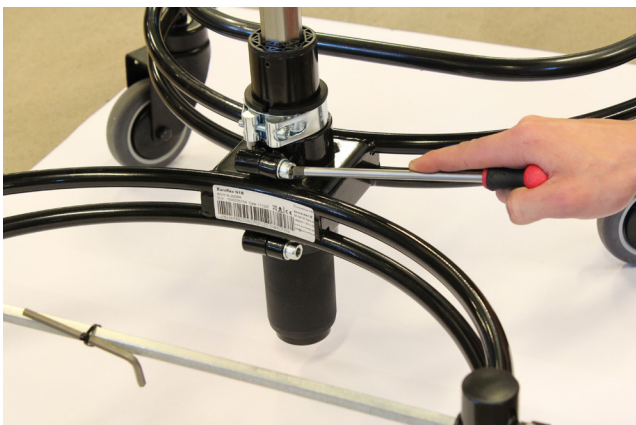

BYTE AV GASKOLV

Tidsåtgång: 15 minuter


1) Lossa två skruvar i chassit med insexnyckel nr 6 mm.

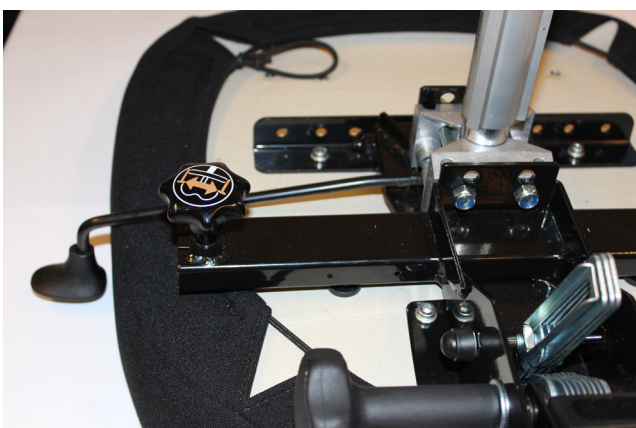

2) Lyft upp sitsen.



3) Lossa de två genomgående skruvarna, håll en 13 mm insexnyckel på muttern och en på skruven och lossa.

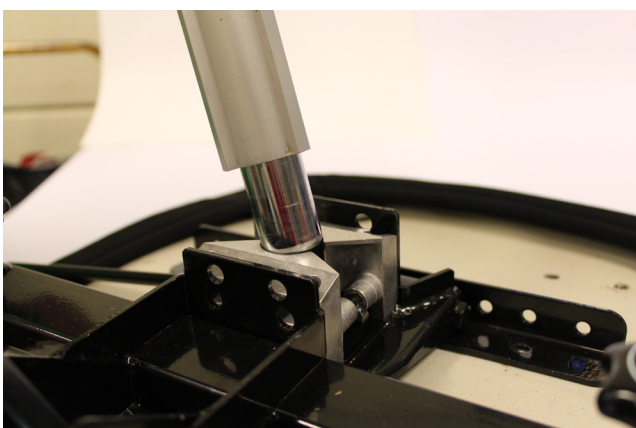

4) Lossa gaskolven ur klämbacken. Byt och skruva tillbaka i omvänd ordning. Dra åt med 35 Nm.

BYTE AV SITS

Tidsåtgång: 5 minuter


1) Sits sett underifrån.




2) Lossa på alla 6 skruvarna med insexnyckel nr 5 mm under sitsen. Lyft bort sitsen och byt till ny.



3) Skruva åt alla 6 skruvarna med 15 Nm.

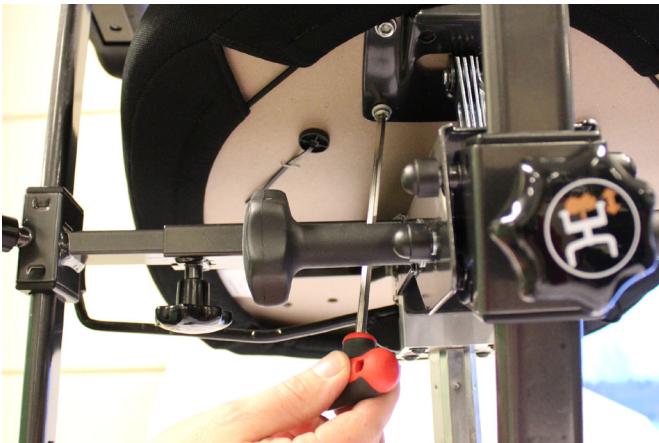

4) Se till att alla skruvarna är åtskruvade med 15 Nm.

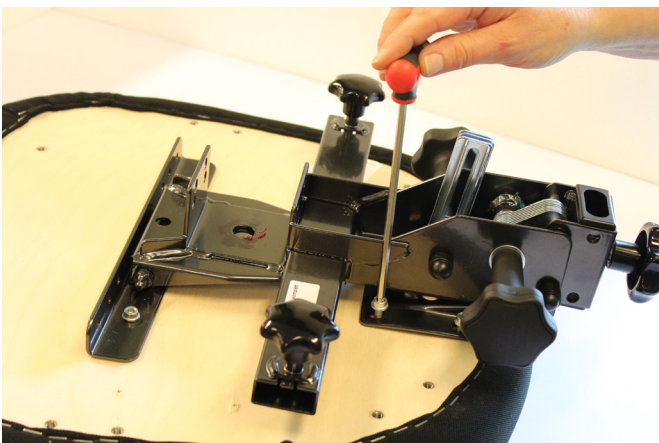



TVÄTTRÅD

- 1) Alla produkter som är avtagbara är uppmärkta med tvättråd.




BYTE AV BATTERI

Tidsåtgång: 10 minuter

1) Ta bort batteriskyddet för att komma banden som är spända runt batteriet.



2) Koppla isär batteriet från elektroniken. Kontakterna ligger innanför batteriskyddet.

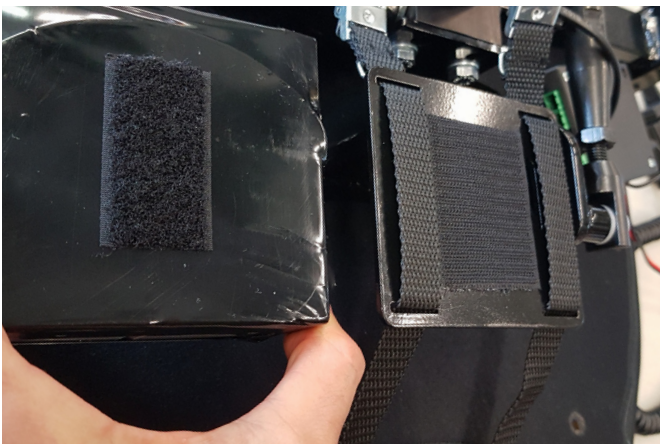

3) Lossa banden för att frigöra batteriet. Batteriet sitter även med kardborre.



4) Montera det nya batteriet. Batteriet ska alltid monteras med svarta kablar ihop och röda ihop.



5) Spänn fast batteriet med banden igen fäst kablar och sedan sätt på batteriskyddet.

*Euro*vema

Eurovema Mobility AB

Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sverige

Tel. +46 371 390 100 | info@eurovema.se | www.eurovema.se