

comco

BRUKSANVISNING

# Mjukfibernadrass



## Innehåll

Säkerhetsföreskrifter.....	3
CE-Märkning.....	3
Introduktion.....	3
Uppackning.....	3
Användning.....	4
Fakta Mjukfibermadrass.....	4
Storlekar.....	4
Tillbehör.....	4
Rengöring.....	4
Garanti.....	5
Destruering.....	5
Retur och reklamationer.....	5
Tillverkare.....	5

## Säkerhetsföreskrifter

- Läs föreskriften noggrant och spara den för framtida bruk.
- Stick inte in vassa föremål i madrassen.
- Använd endast madrassen för det den är avsedd till enligt instruktioner i denna manual.
- Undvik skador genom att hålla madrassen borta från varma källor eller eld.
- Placera madrassen noggrant och kontrollera att rätt storlek används.
- Madrassen ska användas så att den inte blir skadad eller klämd

## CE-Märkning

COMCO's Mjukfiber madrass är CE-märkt enligt MDR (Medical Device Regulation) (EU) 2017/745 medicintekniska produktdirektivet klass 1. Med CE-märkning säkerställer COMCO AB att produkten uppfyller kraven i lagen om medicintekniska produkter. Enligt dessa föreskrifter är vi skyldiga att rapportera olyckor och tillbud som rör våra produkter. Vi ber er därför att rapportera till COMCO AB om en olycka eller tillbud inträffar som rör våra produkter.

## Introduktion

COMCO's Mjukfiber madrass placeras vid användning på en annan befintlig madrass. Madrassen är lämplig att använda i vård- och omsorgsmiljö samt i hemmiljö. Madrassen är fylld med silkoniserad polyesterhålfiber och de glatta fibrernas egenskaper ger en skön känsla och motverkar risken för skjuv.

## Uppackning

Våra madrasser levereras rullpackade/komprimerade i återvinningsbar plast. Innan påbörjande av uppackning kontrollera att madrassen ej är skadad. Avlägsna sedan plasten försiktigt. Användning av vassa föremål vid öppnandet bör undvikas då man riskerar att skada madrassen. Efter avlägsnandet av plasten bör madrassen placeras ca 1-3 timmar i plant läge för att återhämta sin normala ursprungliga form. Madrassen går även att använda direkt efter uppackning.

## Användning

Mjukfiber madrassen placeras ovanpå en befintlig madrass. Madrassen fixeras sedan med hjälp av resårband som finns i varje hörn. Bäddflikarna viks under för bättre stabilitet.

## Fakta Mjukfiber madrass

Fyllning silkoniserad polyesterhålfiber

Tyg: Microfiber 104g/m<sup>2</sup>

Förpackning: Rullpackad i klar plast

Färg: Vit

Rekommenderad brukarvikt 0-75kg

Etikett med leverantörsnamn, anvisningar om tvätt, brukarvikt, artikelnummer, storlek, och tillverkningsdatum är placerad på madrassen

Madrassen är Öko-tex certifierad

## Storlekar

80x200cm, artikelnummer STCOM080200

90x200cm, artikelnummer STCOM090200

105x200cm, artikelnummer STCOM105200

120x200cm, artikelnummer STCOM120200

Specialstorlekar kan även tillverkas efter önskemål

## Tillbehör

Madrasskydd/Hygienöverdrag finns att beställa som tillbehör till mjukfiber madrassen. Överdraget är ångpermeabelt, men släpper inte igenom fukt/kroppsvätskor. Överdraget träs över madrassen och har en resår runt om som gör att det sitter fast.

Madrasskydd/Hygienöverdrag finns i följande storlekar:

80x200cm, artikelnummer HM-080200

90x200cm, artikelnummer HM-090200

105x200cm, artikelnummer HM-105200

120x200cm, artikelnummer HM-120200

Specialstorlekar kan även tillverkas efter önskemål

## Rengöring

Madrassen tvättas i 60 °C (kan tvättas i fullängdsprogram i en tvättmaskin avsedd för hemmiljö) och kan även torktumlas på låg värme till stryktorr. Överdraget tvättas i upp till 90 °C och kan även torktumlas.

## Garanti

Mjukfiber madrassen har 2 års garanti


## Destruering

Mjukfiber madrassen samt emballage sorteras under brännbart avfall.

## Retur och reklamationer

Alla avvikelser skall rapporteras till COMCO AB. Reklamation får göras först när avvikelsen är rapporterad till oss. Returnering sker då enligt våra instruktioner. Vid transportskadat gods skall även anmälan göras till berört transportbolag. När reklamationen är COMCO tillhanda sker återrapportering till kunden gällande hur reklamationen skall åtgärdas.

## Tillverkare

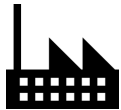

**COMCO AB**

### **Kontakt:**

Telefon: 040 45 47 87

Fax: 040 45 47 99

E-post: [info@comco.se](mailto:info@comco.se)

### **Postadress:**

COMCO AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

### **Godsadress:**

COMCO AB

Radiatorvägen

Gate 8

283 43 Osby

### **Support:**

Helgfria vardagar 8.00-17.00