

DEXCOM

G4[®]

PLATINUM

Checklista vid start av Dexcom G4 Platinum

Förberedelser innan patienten kommer

1. Ladda mottagaren 4-5 timmar.
2. Kontrollera datum och tid (se under Inställningar).
3. Kontrollera att sändarens ID är korrekt inlagt i mottagaren (se under Inställningar/ Sändar-ID alt Enhetsinfo).
4. Kontrollera att ljudet står på Normal (se under Profiler).
5. Torka av undersidan på sändaren med en spritsudd.



Tillsammans med patienten

1. Visa de olika delarna i systemet: mottagaren, sändaren och sensorn.
2. Sätt sensor. Se lathund för sättning av sensor. Sprittvätta huden nogga för att få bort fett och smuts. Torka torrt.
3. Sätt fast sändaren. Kontrollera att du hör 2 "klick" och att sändaren sitter fast under båda "klackarna".
4. Starta sensorn genom att gå in i menyn och tryck på "Starta sensor".
5. Gå igenom lathunden för kalibrering. Träna på att lägga in ett kalibreringsvärde i mottagaren. Det påverkar inte värdena när det görs inom 2 timmars start-upp-perioden.
6. Ställ vid behov in larmgränser.



Information till patienten

1. Lämna lathundar för Första kalibrering och för Sensorsättning.
2. Paracetamol (Alvedon, Curadon och liknande) är kontraindicerat vid användning av Dexcom G4 Platinum. Välj andra alternativ, t ex Ipren.
3. Kontrollera dagligen att häftan sitter bra. Förstärk vid behov runt om sändaren (täck inte över sändaren, det kan skapa kondens).
4. Magnetröntgen är kontraindicerat. Kontrollera att magnetröntgen inte är inplanerad under de kommande sju dagarna.
5. Mottagaren ska laddas var 4–5 dag.