


DEXCOM

G4[®]
PLATINUM

Sätta fast sändaren

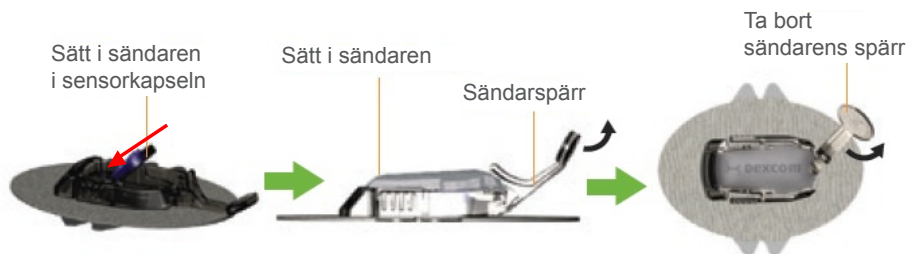

1. Tvätta av undersidan på sändaren med en fuktig sudd eller en spritsudd. Låt torka.
2. Sätt i sändaren i sensor kapseln med den platta delen nedåt. För in den smala delen först (som att sätta en skidpjäxa i bindningen). Sändaren ska föras in framför den lilla "vingen", se röd pil.
3. Håll ett finger ovanpå sändaren och tryck sändarspärr framåt så att sändaren pressas fast i sensor kapseln. Du skall höra 2 "klick" som ett bevis på att sändaren sitter fast ordentligt under båda "klackarna" på sensor kapseln.
4. Ta bort sändarens spärr genom att vrida den ett kvarts varv.



Rött stoppljus i statusfönstret:

Innan du startar en ny sensor måste du kontrollera att förra sensorn är stoppad.



Ta loss sändaren

Ta bort sensorn genom att dra loss tejen från huden och placera sensor kapseln på ett bord (se bild). Välj mellan att använda säkerhetslås/sändarfrigöraren för att ta loss sändaren eller att med pekfingrarna fälla ut flikarna så att sändaren "poppar" ur sensor kapseln.

1. Tryck ner säkerhetslås/sändarfrigöraren mellan flikarna och sändaren, enligt bilden, tills det tar stopp. Sändaren "poppar" upp ur sensor kapseln.
2. Du kan också använda pekfingrarna och fälla ut flikarna baktill på sensor kapseln. Sändaren "poppar" upp ur sensor kapseln.

