



Skala (1:1)

CE
0476

CRONO S-PID 50

Bärbar infusionspump

UPPDATERAD MODELL

BESKRIVNING AV PUMPEN

CRONO S-PID 50 är en bärbar infusionspump för kontrollerad subkutan administration av immunglobuliner och läkemedel i allmänhet.

CRONO S-PID 50 förenar senaste teknik och innovativ design. Det lilla formatet och den låga vikten gör att den är perfekt för användning i hemmet, så att patienten är fri att utföra sina vardagssysslor under behandlingen.

CRONO S-PID 50 använder enskilda reservoarer på 50 ml.

Pumpens viktigaste funktioner är:

- Möjlighet att välja programmeringsläge för tid eller flödes hastighet.
- Möjlighet att dela upp läkemedelsvolymen i sprutan till flera infusionsställen (denna funktion är endast tillgänglig i flödes hastighetsläget).

Matningsmekanismen verkar direkt på reservoarens gummikolv, vilket gör att pumpen både får ett högt tillförseltryck och stor noggrannhet vid administration av läkemedlen.

CRONO S-PID 50 har en LCD-display som visar användbar information för läkaren och patienten om pumpens inställningar, drift och diagnostik.

TEKNISK SPECIFIKATION

Pumpens mått	84 x 55 x 42 mm (3,31 x 2,17 x 1,65 tum).
Vikt	139 g (4,47 uns), inklusive batteri.
Batteri	Litium CR 123 A 3 V (batteriet räcker för cirka 60/80 infusioner).
Enskild reservoar för engångsanvändning	Med 50 ml volym och ett universellt "Luer-lock"-säkerhetsfäste.
Delvolym i bruksanvisningen	Valbar från 1 till 50 ml i steg om 1 ml.
Tidsläge (infusionens varaktighet)	Valbart från 30 min. till 500 tim.
Flödes hastighetsläge	Valbart från 0,1 till 100 ml/h.
Antal infusionsställen (endast i flödes hastighetsläget)	Valbart från 1 till 5 ställen.
Tillgänglig primnings-volym	1,5 ml.
Flödes hastighetens precision	+/-3 %.
Ocklusionstryck	3,0 bar +/-1,5.
Dosvolym	20 mikroliter (dos: mängd som administreras för varje motorrotation).
Bolus efter ocklusion	Ca 1,8 ml.
Inställningsminne	Alla inställningar lagras automatiskt på ett flashminne och finns kvar även om batteriet tas bort från enheten.
Display	LCD-skärm – 11 x 28 mm; 0,43 x 1,0 tum.
Motor	Sladdlös likströmsmotor, vars rotation kontrolleras av ett infrarött system.
Inställningslås	Två inställbara nivåer.
Elektronikkrets med dubbla mikrokontroller	Säkerställer ett tillförlitligare och säkrare infusionssystem.
Skyddskretsar	Kontrollerar att enheten fungerar korrekt genom att avge ljudsignaler och visa meddelanden på displayen om någon avvikelse skulle uppstå.
Kapslingsklass för pumpen	IP 42
Medföljande utrustning	Bärbar infusionspump, infusionsbärväska, elastiskt bälte, bärrem, tygfodral, 2 batterier, verktyg för att öppna batteriluckan och bruksanvisning.
Garanti	Två år för tillverkningsfel. NordicInfu Care ger 5 års garanti.

Distributör:

NordicInfu Care AB Box 1225 SE-131 28
Augustendalsvägen 60 Nacka Strand Sverige
Tel.+46 8 601 24 40 Fax +46 8 601 24 42
www.infucare.se e-post info@infucare.se



CANÈ S.p.A. Medical Technology
Via Cuornghè 42/a 10098 Rivoli (TO) Italien
Tel. +39 011 9574872 – Fax +39 011 9598880
www.canespa.it E-post: mailbox@canespa.it