

# CRONO S-PID 50

Bärbar infusionspump











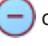

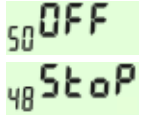
## SNABBGUIDE



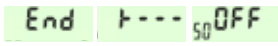

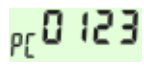



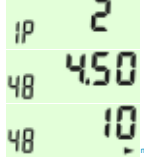

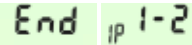
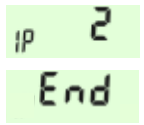
**Knapparna har en inbyggd säkerhetsfunktion:** de måste hållas intryckta i flera sekunder innan kommandot utförs.

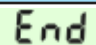

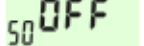
Denna snabbguide är inte något alternativ till att läsa informationen i bruksanvisningen utan är endast en grundläggande, kort sammanfattning av pumpens funktioner.

	KNAPPAR	FUNKTION	DISPLAY
SÄTTA I BATTERI		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visa alla displaysegment</li> </ul>	
	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visa programmeringstypen (flödes hastighet/tillförsel tid)</li> <li>• Åtkomst av val av flödes hastighet/tillförsel tid (endast tillgängligt med <b>åtkomstnivå L 0</b>).</li> <li>• Ändra inställningen för flödes hastighet/tillförsel tid</li> <li>• Automatisk positionering av kolven vid infusionsstart</li> <li>• Avstängning av pumpen</li> </ul>	    
PUMPEN INSTÄLLD PÅ OFF	 1:a tryckningen  2:a tryckningen  3:e tryckningen  4:e tryckningen 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pumpen är avstängd med åtkomstnivån <b>L 0</b></li> <li>• Programmering av tid/flöde</li> <li>• Åtkomst av val av larm vid slut på infusion</li> <li>• Åtkomst av val av antal infusionsställen – <b>IP</b> från <b>1</b> till <b>5</b> – (endast i "F"-läget)</li> <li>• Åtkomst av val av partiell volym/läkemedels volym</li> <li>• Ändra värdet för föregående inställningar</li> </ul>	      
	PUMPEN INSTÄLLD PÅ ON	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slå på pumpen</li> <li>• <i>Primningsfas</i></li> <li>• Visa den partiella volymen (om den har ställts in)</li> <li>• Visa antalet infusionsställen (endast i "F"-läge)</li> <li>• Starta infusion</li> </ul>
 håll intryckt  tryck in samtidigt		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Primningsdos</i> (max 1,5 ml)</li> <li>• Avstängning av pumpen</li> </ul>	   

	KNAPPAR	INSTÄLLNING AV TILLFÖRSELLTID	DISPLAY
PUMPEN INSTÄLLD PÅ ON	 /   / 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tillförseltid Infusions tid</li> <li>• Åtkomst programmering av infusionens varaktighet (funktionsläge "t")</li> <li>• Minska/öka tillförseltiden/infusions tid</li> </ul>	
	 /   / 	<p align="center"><b>PROGRAMMERA FLÖDESHASTIGHETEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flödes hastighet</li> <li>• Åtkomst programmering av flöde (funktionsläge "F")</li> <li>• Minska/öka flödes hastigheten</li> </ul>	
	 och  tryck in samtidigt	<p align="center"><b>STÄNGA AV PUMPEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avstängning av pumpen</li> </ul>	

	KNAPPAR	TIDIG ÅTERGÅNG AV KOLVEN/ANTAL INFUSIONER	DISPLAY
PUMPEN INSTÄLLD PÅ OFF	 och  tryck in samtidigt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avbryta en aktiv infusion och dra tillbaka kolven till läget för infusionsstart.</li> </ul>	
	 tryck in i 4 sekunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antal infusioner (PC: Partiell räkning)</li> </ul>	

	KNAPPAR	INFUSIONSSTART	DISPLAY
PUMPEN INSTÄLLD PÅ ON		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Starta infusion</li> <li>• När pumpen är i drift visas tillförseltiden på displayen.</li> <li>• Visa inställd flödes hastighet</li> <li>• Om antalet infusionsställen är inställt på mellan 2 och 5, t.ex. 2, fortsätter pumpen så här:</li> <li>- 50 % av läkemedelsvolymen i sprutan tillförs på det första infusionsstället.</li> <li>- Vid slutet av den partiella tillförseln visar displayen <b>End</b> omväxlande med 1-2. Nu går det att ändra infusionsställe.</li> <li>- Omstart av infusionen och tillförsel av återstående 50 % av tillgängligt läkemedel.</li> <li>- Vid slutet av den partiella tillförseln visar displayen <b>End</b> och efter några sekunder dras kolven tillbaka till positionen för infusionsstart.</li> </ul>	
			
			

	KNAPPAR	SLUT PÅ INFUSION	DISPLAY
SLUT PÅ INFUSION		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slut på infusionen</li> <li>• Automatisk tillbakadragning av kolven</li> <li>• Avstängning av pumpen</li> </ul>	
			
			

**Distributör:**  
NordicInfu Care AB Box 1225 SE-131 28  
Augustendalsvägen 60 Nacka Strand Sverige  
Tel.+46 8 601 24 40 Fax +46 8 601 24 42  
www.infucare.se e-post info@infucare.se



  
CANÈ S.p.A. Medical Technology  
Via Cuornè 42/a 10098 Rivoli (TO) Italien  
Tel. +39 011 9574872 – Fax +39 011 9598880  
www.canespa.it E-post: mailbox@canespa.it