

**Kompress gasväv**  
60-pack, höggradigt ren



**Ingående delar/material**

**Färg**

<b>Gasväv:</b>	100% bomull, peroxidblekt (17 trådar/cm <sup>2</sup> )	Vit
<b>Autoklaverbar:</b>	Kan steriliseras i EO och ånga 135°C	

Produkten innehåller inte PVC eller latex.

**Förpackningar**

**Material**

**Avfallshantering\***

Avdelningsförpackning AFP  
Transportförpackning TFP

kartong  
kartong

kartong  
kartong

\*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Produkten uppfyller ISO standard SS-EN 14079 Medicintekniska produkter - Krav på egenskaper och provningsmetoder för absorberande gasväv av bomull och bomull/viskos och gasväv av rayon

Art.nr.	Stl cm	Lager	St/AFP	St/TFP	MBA
1220006	5 x 5	8	60	100 x 60 = 6000	TFP
1220007	7,5 x 7,5	8	60	100 x 60 = 6000	TFP
1220008	10 x 10	8	60	100 x 60 = 6000	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

### Indikation

Kompressen används vid sårrengöring och omläggning. Inga kända kontraindikationer.

### Bruksanvisning





Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna avdelningsförpackningen genom att trycka in lådans ena kortsida för att skjuta ut den.
2. Skjut bara ut så mycket av lådan att en kompress blir synligt.
3. Använd rena händer/handskar/pincett för att ta ut en kompress.
3. Stäng genast lådan för att minimera risken att kontaminera kvarvarande kompresser.



### Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014 med förkortad processtid.
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass I, Notified Body: 0197 TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

### Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



#### Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd  
Paojiang Industrial Zone  
Shaoxing, Zhejiang  
China

#### Importer:

AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)

#### EC-REP:

Obelis S.A.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels  
Belgium