

Plattork gasväv ren



Ingående delar/material

Färg

Gasväv: 100% bomull, peroxidblekt (17 trådar/cm²) Vit

Produkten innehåller inte PVC eller latex.

Autoklaverbar: Kan steriliseras i EO eller ånga 121°C alt. 135°C.

Förpackningen kan öppnas och återförslutas.

Förpackningar

Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

plastpåse
kartong

Avfallshantering*

mjukplast
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Produkten uppfyller ISO standard SS-EN 14079 Medicintekniska produkter - Krav på egenskaper och provningsmetoder för absorberande gasväv av bomull och bomull/viskos och gasväv av rayon

Art.nr.	Stl mm	Utvikt stl cm	St/AFP	St/TFP	MBA
1418121	30 x 30	12 x 15	250	40 x 250 = 10000	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Kompressen används vid sårrengöring och omläggning. Inga kända kontraindikationer.

Bruksanvisning




Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna avdelningsförpackningen genom att dela zip-förslutningen på påsen.
2. Använd rena händer/handskar/pincett för att ta ut en tork.
3. Förslut genast påsen för att inte kontaminera kvarvarande tork.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass I, Notified Body: 0197 TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium